


Mepore® Film

Ångpermeabelt, transparentt och självhäftande förband

Mepore Film är ett transparent, självhäftande filmförband som är idealiskt som fixerande ytterförband och primärt förband till olika typer av rena sår.

Mepore Film är enkelt att applicera.

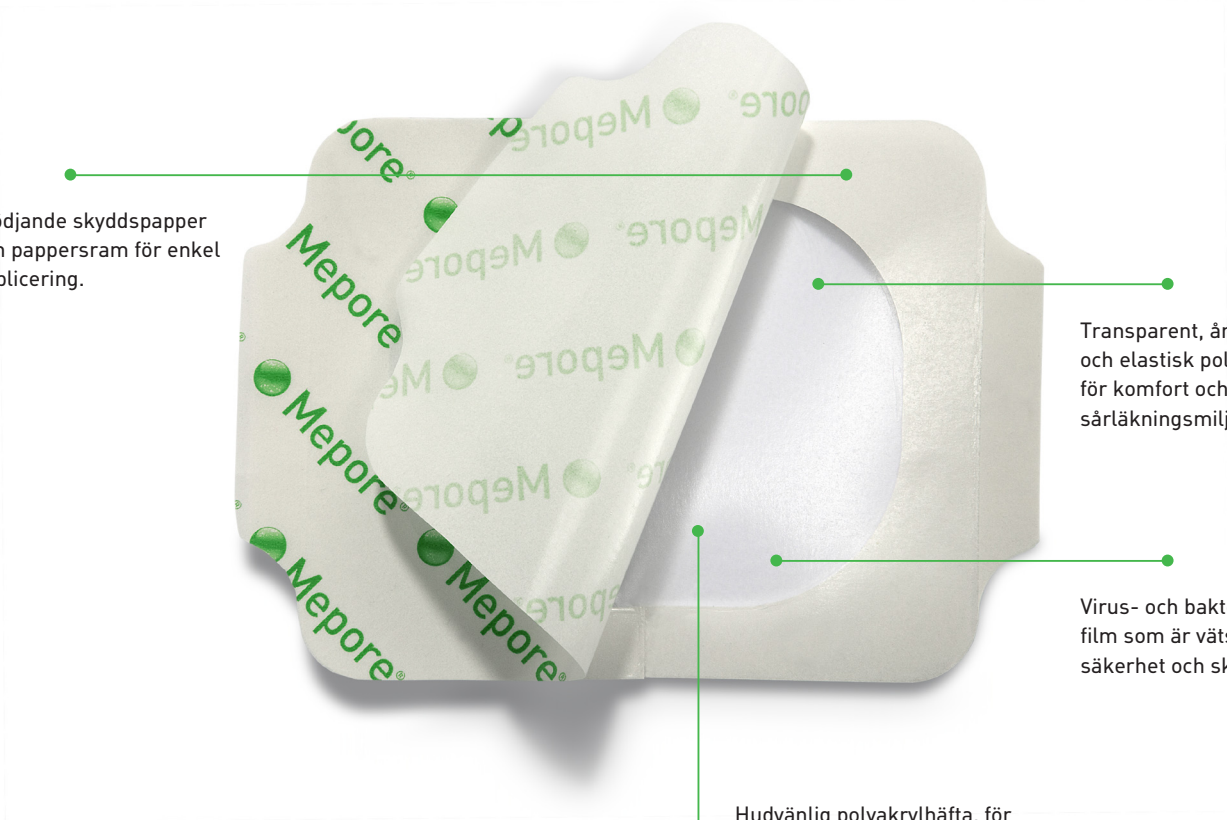

Stödande skyddspapper och pappersram för enkel applicering.

Transparent, ångpermeabel och elastisk polyuretanfilm, för komfort och optimal sårhämningsmiljö.

Virus- och bakterietät film som är vätsketät för säkerhet och skydd.

Hudvänlig polyakrylhäfta, för varsam och säker fixering.

Så här fungerar Mepore Film

Mepore Film formar sig väl efter kroppskonturen, skyddar sårytan och bildar en barriär mot läckage och bakterier. Mepore Film bibehåller fuktig sårmiljö samtidigt som den höga permeabiliteten tillåter avdunstning av överflödigt fuktighet från såret och den omkringliggande huden.

Användningsområden

Mepore Film kan användas till olika rena, granulerande sår såsom:

- Ytliga brännskador
- IV-ställen
- Skrubbsår
- Slitsår
- Tagställen
- Ytliga trycksår
- Suturerade kirurgiska sår
- Skyddar mot hudskador

Mepore Film kan även användas för fixering av kanyler och katetrar av olika slag och som profylax mot vävnadsskada. Mepore Film fungerar även bra som ytterförband.


Så här används Mepore Film



Gäller endast för storlekarna 10x25 cm och 15x20 cm: Ta bort det utskurna skyddspappret i mitten.



Den självhäftande ytan är skyddad av skyddspapper (med trycket Mepore) Ta bort skyddspappret.

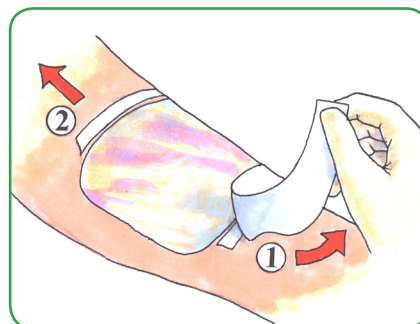


Applicera Mepore Film och avlägsna den återstående ramen av skyddspapper. Sträck inte förbandet vid applicering.

Fördelar med Mepore Film

- Hög permeabilitet
- Lätt att applicera, även om man har på sig handskar
- Minimerar risken för skador på nybildad vävnad
- Formar sig väl efter kroppskonturer
- Hudvänlig vidhäftning
- Säker fixering
- Bibehåller fuktig sårmiljö
- Barriär mot läckage och bakterier
- Skyddar mot friktionsskador

Observera

Mepore Film bör inte användas på fullhudssår eller på sår med muskler, senor och ben blottlagda. Mepore Film bör heller inte användas på tredje gradens brännskador. Mepore Film bör inte användas av personer som är känsliga för polyakrylat.

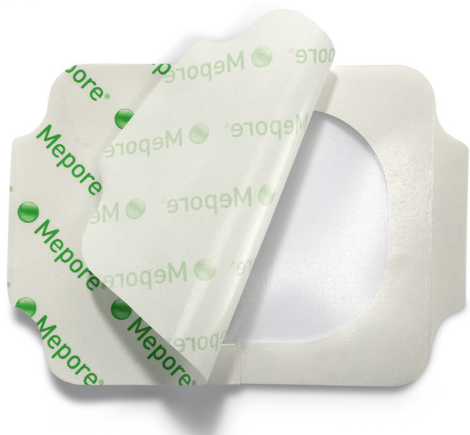

Mepore Film levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
270600	6 × 7	100	600
270670	6 × 7	10	50
271500	10 × 12	70	210
271570	10 × 12	10	70
272500	10 × 25	20	100
272570	10 × 25	10	50
273000	15 × 20	10	50
273500	20 × 30	5	30

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00
www.molnlycke.com

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.