

# Pipelle® Mark II

erol ab



## Användningsområde

- Screening av endometriecancer och hyperplasi.
- Detektering av defekt gulkroppsfas.
- Övervakning av hormonbehandling.
- Menorragi med eller utan hormonbehandling.
- Sen menopaus.
- Endometriehypertrofi.
- Polyper.
- Undersökning i samband med behandling med tamoxifen.
- Bakteriologisk odling.

## Beskrivning

Provtagaren består av:

Ett böjligt, transparent polypropenhölje, med en lateral öppning med diametern 2,1 mm i den distala delen. Provtagaren har fyra markeringar 4, 7, 8 och 10 cm från spetsen.

Provtagaren har från den laterala öppningen i spetsen en 3 cm lång, sträv yta som provmaterialet fastnar på.

Höljet har ett stopp 2 cm från den distala ändan.

En inre kolv glider då den förflyttas med ett böjligt skaft av acetalharts. Provmaterial kan aspireras in i provtagaren.

Pipelle Mark II kan formas innan den tas ut förpackningen. Det svagt elastiska motståndet gör att den håller sig böjd så att den passar en anteflexion eller en retroflexion av livmodern.

Pipelle Mark II är 235 mm lång och har en yterdiameter på 3,1 mm och en innerdiameter på 2,6 mm.

## Beställningsinformation

Art nr	Benämning
230	Pipelle Mark II®

*För engångsbruk.*

*Levereras i 25 individuella förpackningar.*

*Sterilt förpackade enheter.*

Erol AB, S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö.  
Telefon: 042-21 07 90 | E-post: kontakt@erol.se | Web: www.erol.se

erol ab



## Rekommendationer

- Läs hela bruksanvisningen före användning.
- Använd inte exemplar vars förpackning brutits eller skadats eller som är skadade till följd av transport, olämplig förvaring eller felaktig hantering.
- Kontrollera datummärkning och att förpackningen är hel.
- Öppna förpackningen genom att avlägsna pappret vid pilmarkeringen.

Pipelle Mark II är en medicinsk utrustning och bör endast användas av personer som har utbildning i gynekologiska undersökningsmetoder och som känner till de sjukdomar och komplikationer som kan uppstå.

Efter användningen kastas provtagaren och emballage i enlighet med de föreskrifter som finns för medicinskt avfall.

För andra användningsområden, kontrollera först om provtagaren är lämplig för ändamålet.

## Handhavande

Desinficera cervix noggrant.

I de flesta fall behövs ingen Pozzi-peang.

Lokalbedövning med Xylocain kan underlätta provtagningen på postmenopausala kvinnor med cervixstenos.

För varsamt in Pipelle Mark II genom cervix och upp till fundus uteri (4 cm-markeringen visar var uterus-kaviteten börjar). I de flesta fall kan 7 cm-markeringen nås, såvida det inte finns något cervikalt hinder.

Dra tillbaka kolven helt för att skapa ett undertryck.

Stryk sakta fundus uteri flera gånger upp till cervix inre öppning med regelbundna fram och tillbakagående rörelser samtidigt som provtagaren roteras så att provet omfattar hela uterus-kaviteten.

Fortsätt ca 30 sekunder, tills fragment av livmoderslelhinnan syns inuti höljet.

Dra ut Pipelle Mark II. Ta först hand om det cytologiska materialet och därefter det histologiska materialet.

## Cytologi-prov

Skär av den sträva, distala spetsen på Pipelle Mark II, ca 3 cm och lägg i burk med en lösning för cytologi.

Smear-baserad cytologi. Stryk ut provet som har samlats på den sträva ytan på ett objektglas och fixera.

## Histologi-prov

Tryck på kolven för att tömma ut innehållet i höljet i en lösning för histologi.

## Steriliseringsmetod

Etylenoxid.

## Förvaring

Rekommenderad lagringstemperatur är 20° C med tillåten variation mellan 5° C och 30° C.

## Provtagaren får ej återanvändas!