



Slitslakan med Drisite[®] Plus för bukkirurgi

- BARRIER[®] slitslakan är funktionellt utformade och är vätsketätt över hela ytan för att minimera risken för vätskegenomsläpp under operationen
- Förstärkt material i den kritiska zonen för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- Det patenterade Drisite Plus-systemet förbättrar absorptionen över hela ytan och minimerar risken för bakterieöverföring, blod och andra vätskor på operationsgolvet
- Det nya uppdukningsmaterialet från BARRIER är gjort i ett mjukt och behagligt material som formar sig naturligt efter kroppen. Detta säkerställer optimal vidhäftning och minimerar risken för läckage



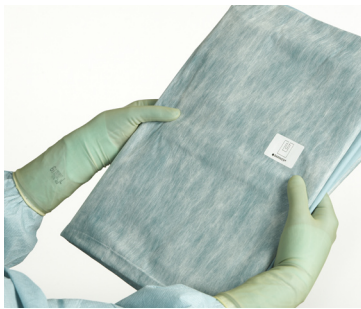

1 Håll slitslakanet mot patienten på det sätt som framgår av instruktionsetiketten.

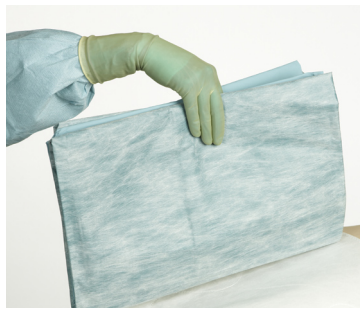

2 Placera slitslakanet mitt över buk-området.



3 Vik ut slitslakanet från sida till sida.



4 Vik ut slitslakanet mot fotändan.



5 Ta bort skyddspapperet.



6 Fäst den självhäftande kanten, en sida i taget



7 Placera det självhäftande op-lakanet i önskad position och vik ut sidorna.



8 Vik därefter ut operationslakanet över narkosbågen.

Art. nr.	Beskrivning
60503	Slitslakan 200 × 260 cm, slits 7 × 102 cm
60504	Slitslakan 200 × 260 cm, slits 20 × 102 cm
60506	Slitslakan 200 × 290 cm, slits 7 × 102 cm
60502	Slitslakan 200 × 150 cm, slits 7 × 65 cm
Art. nr.	ProcedurePak®-komponenter
70503	Slitslakan 200 × 260 cm, slits 7 × 102 cm
70504	Slitslakan 200 × 260 cm, slits 20 × 102 cm
70506	Slitslakan 200 × 290 cm, slits 7 × 102 cm
70502	Slitslakan 200 × 150 cm, slits 7 × 65 cm
70508	Slitslakan 230 × 150 cm, slits 7 × 65 cm, förstärkt
70509	Slitslakan 150 × 260 cm, slits 7 × 65 cm, förstärkt
70511	Slitslakan 230 × 330 cm, slits 20 × 102 cm
76409	OP-lakan 240 × 175 cm, förstärkt
76410	OP-lakan 300 × 175 cm, förstärkt

För er information, samtliga komponenter ovan går att lägga i ProcedurePak.



Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Fax 031-722 34 01. www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Cares namn och logotyp samt BARRIER®, Drisite® och ProcedurePak® är registrerade varumärken som tillhör Mölnlycke Health Care AB.