

Bruksanvisning

ETHICON™ BENVAX – STERILT –

BESKRIVNING

ETHICON™ benvax är en steril blandning av bivax, paraffin och isopropylpalmitat, ett vaxuppmjukande medel. Det är ogenomskinligt och doftar vax.

INDIKATIONER

Benvax är avsett att användas för att stoppa blödningar från sågade, borrarade eller skadade benkanter genom att fysiskt plugga igen benkanalerna som innehåller de blödande kapillärerna.

ANVÄNDNING/EGENSKAPER

Benvax uppnår lokal hemostas i ben genom att bilda en mekanisk barriär (tamponad). Det verkar inte biokemiskt och resorberas inte.

KONTRAINDIKATIONER

Benvax ska ej användas om snabb nybildning av benvävnad och sammanväxning är önskvärd.

VARNINGAR/FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/ INTERAKTIONER

Benvax får ej utsättas för kraftig värme.

Benvax bör användas sparsamt och överskott ska avlägsnas från operationsstället.

Benvax kan hämma osteogenesen och kan verka som en fysisk barriär för reparationsprocessen.

sv

Förpackningen med benvax får inte öppnas förrän omedelbart före användning för att minimera risken för kontamination och överdriven uttorkning.

Får ej omsteriliseras/återanvändas. Återanvändning av denna produkt (eller delar av denna produkt) kan skapa en risk för produktförsämring som kan resultera i funktionsfel och/eller korskontamination vilket kan leda till infektion eller överföring av blodburna patogener till patienter eller användare.

BIVERKNINGAR

Biverkningar som förknippas med användningen av denna produkt inkluderar lindriga inflammatoriska reaktioner i vävnaden i anslutning till implantationsplatsen och hämning av osteogenesen. I likhet med alla främmande kroppar kan benvax förvärra en befintlig infektion.

DOSADMINISTRERING

Benvax bör användas omedelbart efter uttag ur förpackningen. Benvaxet bör värmas under aseptiska förhållanden genom att knåda det med fingrarna till önskad konsistens. Det mjuka benvaxet appliceras sedan på benkanterna efter de kirurgiska förhållandena och kirurgens preferenser.

LEVERANS

Benvax levereras sterilt i individuellt tillslutna förpackningar med överdrag, vardera innehållande en folieförpackning på 2,5 g.

STERILITET

Benvaxet är steriliserat genom strålning. Får ej omsteriliseras. Får ej användas om förpackningen är öppnad eller skadad. Kassera öppnat, oanvänt benvax.

FÖRVARING

Inga särskilda lagringsförhållanden krävs. Använd ej efter utgångsdatum.

SYMBOLER ANVÄNDA VID MÄRKNING



Får ej återanvändas



OBS



Används före –
år och månad



Tillverkare



Steriliserad med
strålning



Antal kuvert
i förpackningen



Satsnummer



Katalognummer



CE-märke och identifieringsnummer för anmält organ. Produkten uppfyller de väsentliga kraven i direktivet för medicinsk utrustning, 93/42/EEG



Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen