

Vätskeuppsamling



ENGÅNGS- OCH FLERGÅNGSSYSTEM FÖR UPPSAMLING AV VÄTSKA



För effektiv och hygienisk vätskeuppsamling

Precious life – Progressive care

Engångssystem för uppsamling av vätska

Enkel att använda

Medelas engångssystem för uppsamling av vätska har många fördelar som gör det enkelt att börja använda på sjukhus och kliniker. Placera helt enkelt påsen i behållaren och systemet kan börja användas på några sekunder. Eftersom vakuumslutningen sitter direkt i behållaren kan påsen enkelt bytas ut utan att ta bort behållaren. En låshake håller behållaren säkert på plats så att påsen enkelt kan avlägsnas med en hand. Om stora mängder vätska behöver sugas upp kan systemet serieanslutas eller användas med övergångsventilen. Logistiken underlättas tack vare att det bara finns två olika påsstorlekar: 1,5 l och 2,5 l.

Hygieniskt

Systemet har i varje påse ett inbyggt överströmningsskydd/bakteriefilter, med ett extra förfilter för att förhindra att det stängs för tidigt på grund av rök eller partiklar, samt en backventil med vätskereglering som förhindrar tillbakaflöde och minskar skumning/stänk. Materialet i påsen består av två lager som gör den hållbar och förhindrar dålig lukt. En specialfunktion är den påse som håller kvar förtjockningsmedlet tills påsen används. Detta innebär att personalen slipper spill.

Färgkodade behållare och sugpåsar med eller utan förtjockningsmedel

Distinkt färgkodning för att undvika förväxling: orange påse i orangefärgad behållare och gul påse i gulmärkt behållare.



Sugpåse och flaska, 1,5 l

Sugpåse och flaska, 2,5 l



- a) Endast en vakuumslutning på behållaren
- b) Låshake på behållaren för att säkra den i hållaren
- c) Backventil med vätskereglering
- d) Överströmningsskydd/bakteriefilter med stänkskydd
- e) Tredje anslutningen för seriekoppling
- f) Handtag för höger- och vänsterhänta
- g) Vinklad koppling som förhindrar "knickning" av patientslangen
- h) Filterkammare med förfilter och bakteriefilter/överströmningsskydd

Snabbfakta

- Enkel att förbereda och klar för användning på några sekunder.
- Påsen kan avlägsnas från flaskan utan att påverka vakuumslangen.
- Överströmningsskydd/bakteriefilter i varje påse. Förfiltret förhindrar för tidig avstängning på grund av partiklar eller rök från diatermi.
- Backventilen hindrar uppsuget sekret från att flöda tillbaka. Vätskeregleringen minskar skumningen.
- Seriekoppling som möjliggör uppsugning av stora mängder vätska.
- Förtjockningsmedel i påse som håller kvar förtjockningsmedlet tills påsen används.
- 1,5 l och 2,5 l för enkel förvaring och logistik.

Flergångssystem för uppsamling av vätska

Enkelt handhavande

Medelas flergångssystem för uppsamling av vätska är tillverkat av hållbara komponenter av hög kvalitet. För kunder som föredrar ett flergångssystem underlättar det här systemet uppsamling av vätska. Det består av olika autoklaverbara PSU-sugbehållare och lock med inbyggt överströmningsskydd. En stor fördel är att de fyra olika storlekarna på behållare – 1, 2, 3 och 5 liter – har samma lockstorlek vilket underlättar hantering och logistik.

Flexibel användning

Baserat på vår långa erfarenhet inom medicinsk vakuumteknik utformar vi och tillverkar våra sugpumpar, vätskeuppsamlingssystem och tillbehör för att passa en mängd olika kliniska miljöer och användningsområden. Oavsett om du behöver ett komplett system eller specifika komponenter, hjälper vi gärna till.



Flergångsbehållare på 1, 2, 3 och 5 liter

Snabbfakta

- Flexibelt system med flera olika komponenter och tillbehör för att passa dina behov.
- Behållare tillverkade i högkvalitativt och stöttåligt polysulfon.
- Polysulfonbehållare lämpar sig för alla vanligt förekommande desinfektions- och steriliseringsmetoder.
- Lättavlästa markeringar som visar vätskevolymen.
- Lock som passar alla storlekar på behållare, tillverkade av förstärkt polyamid med Santoprene-tätning.
- Mekaniskt överströmningsskydd inbyggt i locket.

Tillbehör

Oavsett om du väljer ett flergångs- eller ett engångssystem för uppsamling av vätska erbjuder Medelas produkter en hygienisk, användarvänlig och ekonomisk vätskehantering. Dessutom kan vi erbjuda ett stort utbud av tillbehör som passar just dina behov av uppsugning av vätska.

Autoklaverbara behållare 0,25/0,5 l

för små mängder
uppsugen vätska.



Engångsvävnadsfälla

som enkelt kan anslutas
till patientslangens port för
insamling av vävnadsprov.



Stativ

för mobil användning av
vätskeuppsamlingsystemen
och deras tillbehör.



Engångsfilter

skyddar pumpen från
överströmning, skyddar
miljön från bakterier och
neutraliserar lukt.



Klove/väggfäste

för snabb och säker fastsätt-
ning av behållare och andra
tillbehör på standardskenor
eller väggar.



Slangar

tillverkade i silikon eller
PVC med flera anslut-
ningar att välja mellan.




Seriekoppling

för uppsugning av stora
volymerna vätska. Automatisk
växling från en påse till nästa.



Omslagsventil med klove

för uppsugning av stora
volymerna vätska. Manuell
växling från en påse eller
flaska till nästa.

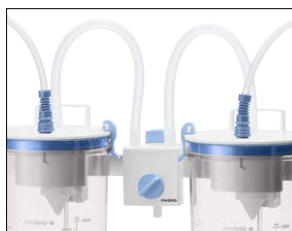

CE 0123

Medicinsk vakuumpump för vårdpersonal

**Kontakta oss eller din lokala Medela-
representant för mer information.**

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Schweiz
www.medela.com

Lokal kontakt:

Medela Medical AB
Mällslingan 18 A
Box 7266
187 14 Täby Sverige
Telefon +46 (0)8 588 03 200
Fax +46 (0)8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

Australien
Medela Pty Ltd
Medical Technology
3 Arco Lane
Heatherton, Vic 3202
Australien
Telefon +61 (0) 3 9552 8600
Fax +61 (0) 3 9552 8600
contact@medela.com.au
www.medela.com.au

Kanada
Medela Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, Ontario
L5L 0A1
Kanada
Avgiftsfritt nummer 800 435 8316
Avgiftsfritt faxnummer 800 995 7867
info@medela.ca
www.medela.ca

Storbritannien
Medela UK Ltd.
Huntsman Drive
Northbank Industrial Park
Irlam, Manchester M44 5EG
Storbritannien
Telefon +44 (0)161 776 0400
Fax +44 (0)161 776 0444
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

USA
Medela Inc.
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050
USA
Telefon +1 877 735 1626
Fax +1 815 363 2487
suction@medela.com
www.medelasuction.com

ENGÅNGSSYSTEM TILLBEHÖR (se samtliga tillbehör för engångssystem på sid 11)

077.0082	Behållare, 1,5 liter polykarbonat
077.0083	Sugpåse, 1,5 liter utan gel
077.0084	Sugpåse, 1,5 liter med gel
077.0085	Behållare, 2,5 liter polykarbonat
077.0086	Sugpåse, 2,5 liter utan gel
077.0087	Sugpåse, 2,5 liter med gel
077.0571	Engångs överströmningsskydd-/bakteriefilter med medelakoppling, 10-pack
077.0094	Vävnadsfälla, 10-pack

FLERGÅNGSSYSTEM TILLBEHÖR (se samtliga tillbehör för flergångssystem på sid 9)

077.0110	Behållare, 1 liter polysulfon
077.0120	Behållare, 2 liter polysulfon
077.0130	Behållare, 3 liter polysulfon
077.0420	Lock med 6-10 mm patientanslutning
077.0571	Engångs överströmningsskydd-/bakteriefilter med medelakoppling, 10-pack
077.0562	Vävnadsfälla, patientanslutning, Ø 6-10 mm, 10-pack
077.0564	Vävnadsfälla, patientanslutning, Ø10-14 mm, 10-pack

ENGÅNGSSYSTEM TILLBEHÖR

077.0082 Behållare 1,5 liter, polykarbonat



077.0085 Behållare 2,5 liter, polykarbonat



077.0083 Sugpåse 1,5 liter
Transportförpackning: 40 st.



077.0086 Sugpåse 2,5 liter
Transportförpackning: 40 st.



077.0084 Sugpåse 1,5 liter, med gelgranulat
Transportförpackning: 30 st.




077.0087 Sugpåse 2,5 liter, med gelgranulat
Transportförpackning: 30 st.



FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

077.1018 Hankoppling, rak
10-pack

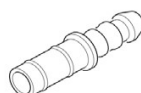

077.1019 Hankoppling, vinklad 90°
10-pack



077.1013 Fästclips till flergångssystem och
överströmningsbehållare
10-pack



810.0098 Honkoppling, enstegs





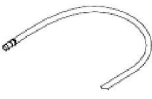

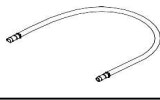
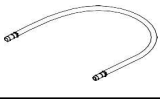



810.0010 Honkoppling, tvåstegs



077.1021 Överströmningsskydd, flottör
10-pack

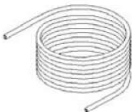

SLANGAR

077.0900	Silikonslang, Ø 7x12 mm 25 meter, utan hankopplingar		AUTO-CLAVE
077.0900/1	Silikonslang, Ø 7x12 mm Per meter, utan hankopplingar		AUTO-CLAVE
077.0912	Silikonslang, Ø 7x12 mm 60 cm, med en hankoppling		AUTO-CLAVE
077.0913	Silikonslang, Ø 7x12 mm 100 cm, med en hankoppling		AUTO-CLAVE
077.0921	Silikonslang, Ø 7x12 mm 30 cm, med två hankopplingar		AUTO-CLAVE
077.0922	Silikonslang, Ø 7x12 mm 60 cm, med två hankopplingar		AUTO-CLAVE
077.0931	Silikonslang, Ø 7x12 mm 25 cm, en rak och en vinklad hankoppling		AUTO-CLAVE
077.0970	Silikonslang, Ø 5x10 mm 25 m, utan hankopplingar		AUTO-CLAVE
077.0951	Engångsslang med fingertoppsreglage 180 cm, PVC		⊗