

Tilläggsbeskrivning till Serres sugpåsar förfyllda med pulver



1. Avvikelser vid avläsning av volym

Vid avläsning av volymen i förfyllda sugpåsar är det viktigt att komma ihåg att pulvrets volym ska räknas bort vid avläsning enligt nedan:

Artikelnummer:	Beskrivning	Volym pulver	
6057557	1 liters påse	25 ml	pulver i påse
6057567 -0	2 liters påse	50 ml	pulver i påse
6057587-0	3 liters påse	85 ml	pulver i påse

Pulvret i sig expanderar inte.

2. Seriekoppling av förfyllda sugpåsar

Om Serres sugpåsar med pulver seriekopplas är det **mycket** viktigt att vacuumsugen är påslagen under hela den tid som sugen används.

Separat Pulver

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp.
6057550	Pulver till sugpåse 25 g/påse	24/288
6057553	Pulver till sugpåse 2 kg/fp	1/1

