

BD Microtainer™ rör med Microgard™ propp



Indispensable to
human health



BD Microtainer™ rör med Microgard™ propp

Serum



Art.nr./ beskrivning	Fyllnadsvolym	Centrifugering	Tillsats
365964 Utan tillsats	250-500 µl	Låt provet koagulera i 30 minuter innan centrifugering. Centrifugera i 2000 G i minst 3 minuter.	Utan tillsats



365968 SST	400-600 µl	Blanda röret 5 gånger efter provtagning. Låt provet koagulera i 30 minuter innan centrifugering. Centrifugera i 6000-15000 G i minst 1,5 minuter.	Gel
365979 SST Amber			



365986 PST	400-600 µl	Blanda röret 10 gånger efter provtagning. Centrifugera i 6000-15000 G i minst 1,5 minuter.	Li-Heparin + gel
365988 PST Amber			

Plasma



365966 LiH	200-400 µl	Blanda röret 10 gånger efter provtagning. Centrifugera i 2000 G i minst 3 minuter.	Li-Heparin
---------------	------------	--	------------



365993 NaF+Na ₂ EDTA	400-600 µl	Blanda röret 10 gånger efter provtagning. Centrifugera i 2000 G i minst 3 minuter.	NaFlourid + Na ₂ EDTA
------------------------------------	------------	--	----------------------------------

Glukos



365975 EDTA	250-500 µl	Blanda röret 10 gånger efter provtagning.	K ₂ EDTA
----------------	------------	---	---------------------

Hematologi



365976	Rörförlängare		
--------	---------------	--	--

Avdelningsförpackning: 50 st, transportförpackning 200 st

BD Vacutainer Systems, Preanalytical Solutions
Instrumentvägen 19 - Box 32054 - 126 11 Stockholm
Telefon 08 775 51 00 - Fax: 08 645 08 08
www.bd.com / pas_swe@europe.bd.com

