

Bakteriebindande och svampbindande kirurgiskt förband

Produktbeskrivning

Filmförband med pad som har Sorbacts bakteriebindande effekt. Förbandet häftar följsamt mot huden samtidigt som bakteriebindning sker. Sorbact kirurgiskt förband består av en polyuretanfilm som andas men inte släpper igenom vatten samt en viscos pad ytbeklädd med acetatväv. Förbandet kan användas på ytliga, torra till lätt vätskande orena sår samt för att skydda och minska risken för infektioner i rena sår.

Bruksanvisning

Se till att huden är torr. Ta bort skyddsfilmerna på baksidan och sätt på förbandet. Ta bort stabiliseringsfilmen genom att börja vid det blå strecket. Förbandsbyte, orena sår, dagligen till 2 gånger per vecka. Postoperativa sår, 1 gång per vecka eller enligt ordination.



Användningsområde

Alla typer av torra till lätt vätskande ytliga sår där huden går att häfta på, t ex:

- Akuta sår
- Som skydd för rena sår
- Som postoperativt förband.
- Runt ingångsöppningar vid externa fixationer, drän etc

Fördelar

- Bakteriekontroll
- Skyddar och håller såret rent
- Ingen risk för resistensutveckling
- Enkelt att använda
- Duschbart

Produkt	Varunr	Storlek förband	Storlek pad	Antal förp.
Kirurgiskt förband	98140	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	100
Kirurgiskt förband	98141	8 x 10 cm	4 x 6,5 cm	20
Kirurgiskt förband	98142	8 x 15 cm	4 x 11 cm	20
Kirurgiskt förband	98143	10 x 20 cm	5 x 15 cm	20
Kirurgiskt förband	98144	10 x 25 cm	5 x 20 cm	20
Kirurgiskt förband	98145	10 x 30 cm	5 x 25 cm	20
Kirurgiskt förband	98146	10 x 35 cm	5 x 30 cm	20