

Produktfaktablad TENA Lady InstaDRY™

Användningsområde

TENA Lady InstaDRY™ är läckagesäkra, bekväma och diskreta skydd för medelstora urinläckage. Finns i två absorptionsnivåer, Extra Plus och Maxi.



Produktegenskaper

Tack vare InstaDRY™ teknologin är produkten mindre och mer kroppsformad för ökad komfort och diskretion. Detta utan att ge avkall på läckagesäkerheten. Skyddet har en anatomisk form med fasade kanter (tunnare fram- och bak) för förbättrad passform och bekvämlighet. Mjuk sidoelastik skålförmar produkten och bidrar till god passform, vilket ökar läckagesäkerheten.

Produkten har ett silkeslent ytskikt närmast huden (Silky Softness) och ett andningsbart spärrskikt på baksidan som är klätt med textilliknande nonwoven för ökad komfort och god hudmiljö. Färgmönstret på produkten visar produktens hela uppsugningsyta och hjälper användaren att se vad som är fram och bak. TENA Lady InstaDRY™ har Fresh Odour Control. Unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred långsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produkt/storlek och illustrationer som visar vilken del som är fram på produkten, vilket underlättar korrekt fixering.



TENA Lady InstaDRY™

Tillsammans gör vi skillnad

Produktfaktblad TENA Lady InstaDRY™

TENA Lady								
Uppsugningsnivå/ storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart halvpall	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Extra Plus ID	34	12,4	28,1	24	192	16	614	76 16 50
Maxi ID	38	12,6	36,5	12	144	16	814	76 09 38



TENA Lady ger trippelt skydd från läckage, lukt och fukt.



Ögonblicklig absorptionszon - för en mycket hög läckagesäkerhet och diskretion.



Fresh Odour Control
- unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Användarinstruktion

Ta skyddet ur enstycksförpackningen och vik upp det.

Läs på skyddspappret på baksidan av bindan vad som är fram, vänd den rätt och dra bort skyddspappret.

Fäst skyddet i åtsittande trosor eller fixeringsbyxa, InstaDRY™ zonen bör vara vid urinrörsmynningen. Se till att skyddet behåller sin skålform.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.



TENA Lady InstaDRY™

Tillsammans gör vi skillnad

Produktfaktablad TENA Lady InstaDRY™

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

ELASTIK

Material: Polyuretan

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålförm

SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Lady skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.



TENA Lady InstaDRY™

Tillsammans gör vi skillnad