

## Absorba Lakansskydd Lina

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket starka, och ger en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet består huvudsakligen av bomull vilket känns behagligt och bekant. Lakansskydden har bäddflikar.


**Bruksanvisning:** Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen. Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används som draglakan – ta i stället ett stadigt grepp om den tjocka, laminerade delen.

**Miljö:** Kan kastas i soporna. Den plast som ingår (polyuretan) bildar endast vattenånga vid förbränning.

Absorbas lakansskydd är flamspridningstestade och klarar alla gränsvärden med god marginal.



	Absorba Lakansskydd Lina
Sanicare art nr	1168V2
Antal produkter/avd fp, st	3
Antal produkter/trsp fp, st	3
Absorptionskapacitet, ml/m <sup>2</sup>	2000
Storlek totalt, cm	85x190
Storlek liggyta, cm	85x90
Material liggyta	100 % bomull
Material absorptionsskikt	65 % polyester, 35 % rayon
Tvättråd	90°C (ej blekmedel, sköljmedel eller kemtvätt), torktumlas vid 70°C. Klarar c:a 450 tvättar (hushållstvätt) Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.

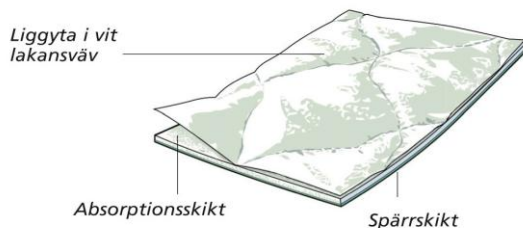

sanicare 