

Bakteriebindande absorptionsförband

Produktbeskrivning

Absorptionsförband med Sorbacts bakterie- och svampbindande effekt.

Förbandet är lämpligt att använda på ytliga, vätskande sår.

Sorbact absorptionsförband består av ett absorberande material med en vätskespärre ytterst.

Acetatväv.



Bruksanvisning

Lägg förbandet direkt på sårytan med den gröna sidan nedåt. Fixera.

Observera att den gröna Sorbactväven skall ha direkt kontakt med sårytan.

Klipp inte i förbandet.

Förbandsbyte, beroende på exudatmängd, dagligen till två gånger per vecka.

Användningsområde

Alla typer av sår där upprensning av mikroorganismer och samtidig vätskehantering önskas t ex:

- Trycksår, bensår, fotsår
- Akuta traumatiska sår
- Postoperativa sår

Fördelar

- Bakteriekontroll
- Allt-i-ett förband
- Hög vätskehantering
- Vätsketätt ytskikt som andas
- Ingen risk för resistensutveckling

Produkt	Varunr	Storlek	Antal förp.
Absorptionsförband	98224	7 x 9 cm	20
Absorptionsförband	98222	10 x 10 cm	20
Absorptionsförband	98223	10 x 20 cm	10