

# Ynolens Parfymfri Lukt borttagare



## Bidrar till livskvalitet.



Är isoton, med låg buffertkapacitet för användning på:

- ✓ Kroniska sår
- ✓ Luktande sår
- ✓ Hud och fistlar
- ✓ Urin och avföring
- ✓ Aterosklerotiska sår
- ✓ Diabetessår
- ✓ Cancersår
- ✓ Trycksår (liggsår)
- ✓ Venösa bensår
- ✓ Kroppslukter
- ✓ Palliativa patienter



Max 30 graders lutning vid användning.

### Få lukten tillbaka som en indikation på sår- och hälsotillstånd.

#### Användning och egenskaper:

##### Temperatur:

Det rekommenderas att temperera produkten innan den används på hud och i sår. Man kan lagra användarenheten/flaskan i ett värmeskåp eller om det inte finns, så kan varmt vatten användas.

##### Sårmiljö:

Produkten är isoton, så den ger inte en brännande känsla eller irritation i såret eller på huden. Produkten har en låg buffertkapacitet, så den förändrar inte pH värdet i sår eller på hud. Produkten ändrar inte sårmiljön och kan användas på alla områden där isotont vatten används.

**Nitrogen (Kväve)** som drivmedel, i kombination med att användarenheten är under tryck, gör att innehållet inte kommer att bli kontaminerat. Enheten kan lagras i ett värmeskåp, så att användningen inte ger skador eller ändrar sårmiljön.

#### Produktinformation:

##### Ren procedur:

Produkten uppfyller kraven för ren sårprocedur

##### Användarenheter:

**Aluminium** är vald på grund av densitet och återvinning. Enheten är under tryck, så att det inte kommer in returluft.

##### Användning:

Används direkt på hud och i sår (ref. sår procedur sidorna 2 och 3), för att inaktivera lukt molekyler. Vädring eller nedkylning innan användning bör undvikas för bästa effekt. Detta bidrar till att livskvaliteten för patienter och deras familjer ökar, samt förbättrad arbetsmiljö för vårdgivare.

Ynolens bidrar till att oönskad lukt kraftigt reduceras under och efter behandlingen.

Ynolens löser bland annat luktproblem för följande patientgrupper:

Sår – Cancer – Hud – Stomi – Palliativ

# SÅR – HUD – PALLIATIV – STOMI

# SÅR

## Ynolens Parfymfri Luktbottagare för **ren** sår procedur

Ynolens med **BLÅ** etikett uppfyller REN-proceduren.

Produkterna är avsedda att användas vid kroniska sår och luktande sår, såväl som fistlar.

Exempel på sårlukter som produkten tar bort: Cancersår, trycksår, venösa bensår, diabetessår och aterosklerotiska sår.


Produkten är isoton och har en låg buffertkapacitet.

För maximal effekt på sårvård i offentliga institutioner eller hemma, så rekommenderar vi följande steg:


Viktigt med korrekt flasktemperatur före användning i sår. Kan förvaras och lagras i värmesåp vid 37 ° C.



**1** Används vid **REN** procedur:

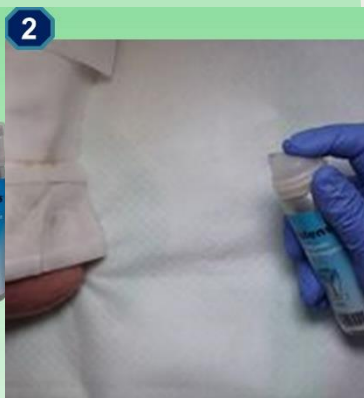

**2** Spraya på förbandet innan det avlägnas om det finns lukt. Avstånd ca 15 cm.

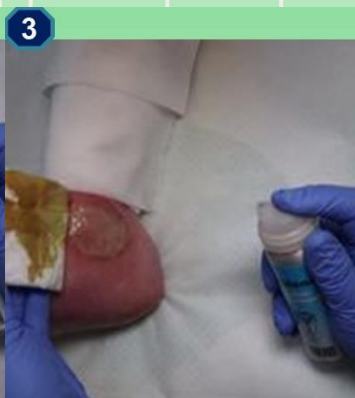

**3** Spraya när förbandet tas bort, både på förbandet och såret. Avstånd ca 15 cm.



**4** Spraya på det använda förbandet innan det kastas så att det inte luktar.




**5** Spraya på såret och huden runt, **FÖRE** tvätt av såret. Avstånd ca 15 cm.



**6** Gör en tvätt / rengöring som planerat.



**7** Nytt bandage.

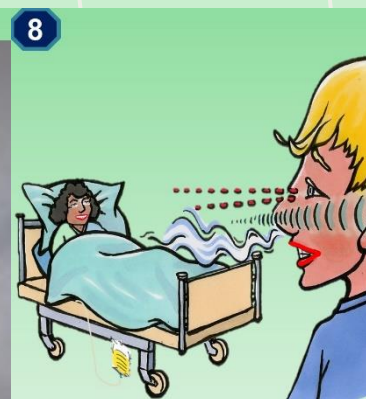

**8** Ynolens gör att lukten blir en indikator på sårstatus.

Används **före** någon ventilation, eftersom **värme** ökar effekten av produkten

# HUD

Vid olika cancerformer och hudsjukdomar, liksom hos palliativa patienter, så kommer lukt att vara en del av sjukdomsbilden. Detta skapar onödig belastning för patienten och anhöriga.

Lukten finns inte bara på huden, utan sitter ofta djupare i huden, vilket gradvis kan bli starkare med tiden, när lukten inte försvinner med regelbunden kroppsvätt.


Genom att använda Ynolens i sårvård och kroppsvätt, kommer luktprofilen bli kraftigt reducerad och det kommer bara att bli ny lukt vid nästa sårvård / kroppsvätt.

Detta innebär att lukt kan vara en hälsotillståndsparameter och ge en snabb indikation på förändringar i hälsotillståndet.

Produkten påverkar inte hud- eller sårkulturen, utan avlägsnar bara lukten utan att använda några skadliga aktiva substanser eller parfym.

Genom att använda produkten varje dag, så kommer lukten på hud och sårytan att försvinna, då lukten som är djupare i huden, transporteras upp till huden och reduceras genom jämviktsprincipen.

Piktogrammet nedan visar metoden för att använda Ynolens för kropps kroppsvätt och hur lukt tas bort och hur jämviktsprincip fungerar.

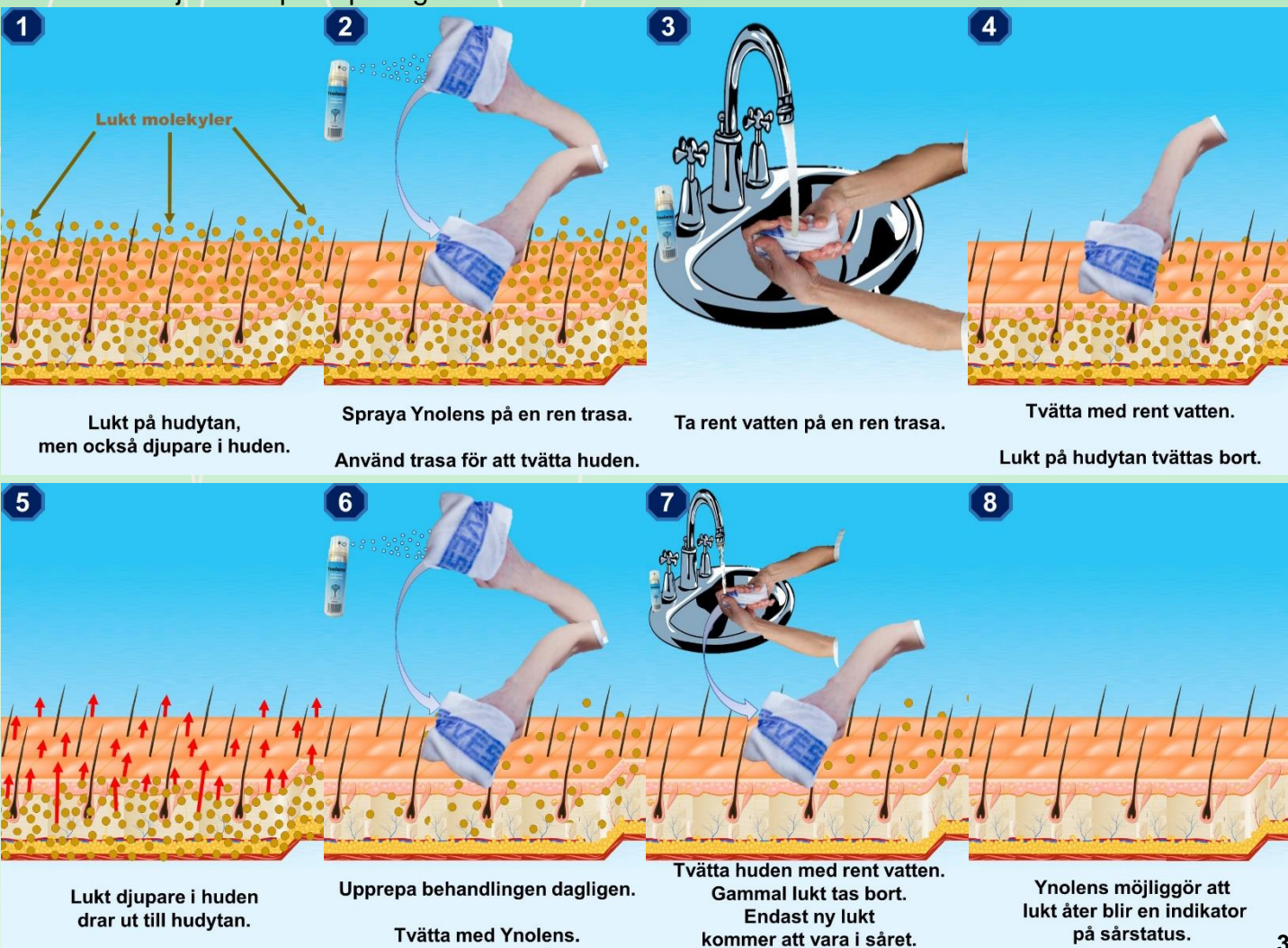

# PALLIATIV

## Lukt påverkar socialisering och livskvalitet.

Hos palliativa patienter är lukt en del av sjukdomsbilden. Detta skapar onödig belastning för patienten och deras anhöriga.

Genom att använda Ynolens i sårvård och kroppstvätt kommer luktprofilen att reduceras kraftigt och det kommer bara att bli ny lukt vid nästa vård / tvätt.

Vid användning av produkten i palliativ vård, kommer både patienter och deras familjer att få bästa möjliga värdiga avslutning.

### Ger möjlighet till ett värdigt avslut för patienten och deras anhöriga.



Lukt påverkar socialiseringen.



Spraya på en ren trasa och tvätta kroppen.



Ren trasa som fuktats med rent ljummet vatten.



Spraya på sängkläder, i luften och på kateterpåsen och golvet, om det behövs.



Ger möjlighet till bättre socialisering och avslutning.

Tvätta över kroppen med rent vatten eller som planerad kroppstvätt.

Förskrivningsbar  
för stomi  
Varu nr.: 735340

# STOMI

På generellt  
stomirecept

## Stomi - Påsdeodorant


Används i olika situationer, bland annat:

Påsbyten  
I hemmet  
På textilier

I påsen  
På jobbet  
På huden

Vid läckage  
På resa  
På kläder

### Tar bort lukt och är enkel att använda

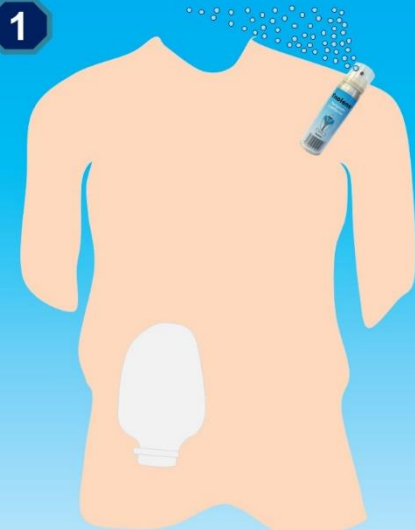

Spraya kort först ut i luften  
så att produkten finns i luften  
när påsen töms och tas bort.




Sätt flaskan på diskbänken eller ett bord.  
Använd handflatan för att trycka ner  
spraymunstycket medan du håller öppningen till  
en ny stomipåse framför ventilen.



Spraya ut i luften  
innan man lämnar toaletten  
vid behov.


### Om det blir vått på golvet har du sprutat för mycket.

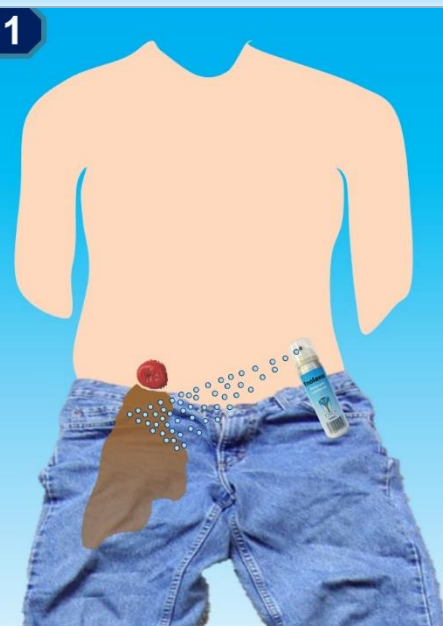

Vid läckage som är på kläder  
Spraya kort mot luktkällan.



Tvätta / torka bort luktkällan.

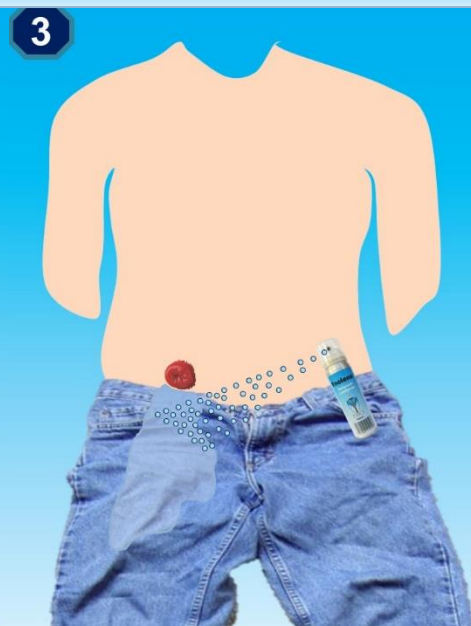

Spraya kort mot området efter tvätt.  
Upprepa om det behövs.

# Ynolens Parfymfri Luktbottagare

För olika patientgrupper kommer lukt att vara en del av sjukdomsbilden. Detta skapar onödig belastning för patienten och anhöriga.

Ynolens löser alla luktproblem utan att lämna några nya lukter eller skadliga effekter på individer eller miljön.

Detta innebär att lukt kan vara en hälsotillståndsparemeter och ge en snabb indikation på förändringar i hälsotillståndet.

Våra kliniska prövningar visar att patienter som använder Ynolens kommer att ha ökad aptit och fler besökare (ökad socialisering), på grund av att lukten är kraftigt reducerad.

Detta kommer i sin tur att ge bättre livskvalitet i en svår livssituation för båda patienter och anhöriga.

**Ynolens Parfymfri Luktbottagare 50 g. \***  
– Ren procedur

\* Förskrivningsbar för stomi (TLV - 735340)

Tillfredsställer rena procedurer och är avsedd att användas på hud och sår som luktar.

Förpackad på 12 flaskor.



 S2 Medical

**Distributör i Sverige:**

**S2Medical AB**

+46 (0)8-70 000 50

Mail: [hello@s2m.se](mailto:hello@s2m.se)

WEB: [www.s2m.se](http://www.s2m.se)

**YNOLENS AS** producerar allt i Norge.

Kvalitetssystemet fokuserar på :

- **Miljö:** Ynolens AS är medlem i Grønt punkt.
- **Etik:** Vi ser etik som en integrerad del av verksamheten, och vi är kända för höga etiska standarder.
- **Verifiera:** I samarbete med Institutt for Energiteknikk (IFE) ved Kjeller utanför Oslo, säkerställer de att produkterna oppfyller internasjonella krav på sterila produkter.
- **Kontroll:** Testas hos EUROFINS för:
  - Mikroorganismer - Mögel - Svamp



 eurofins

**Producent:**  
**YNOLENS AS**  
NORWAY

