

# SORBACT® ROUND SWAB

Infektionsförebyggande rundtork



## MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN I SMÅ SÅRHÅLOR

Sorbact® Round Swab är ett sterilt bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager format till en rundtork och hålls ihop av en silikonring.

Produkt	Art. nr	Storlek	St/förp.
Sorbact® Round Swab	98126	diameter 3 cm	70 (5 x 14)



## AVSEDD ANVÄNDNING


Sorbact® Round Swab är lämplig vid rengöring av sår eller som sårfillare vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade vätskande sår, såsom mindre kaviteter.

## BRUKSANVISNING - RENGÖRING AV SÅR

1. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
2. Fukta Sorbact® Round Swab i tvättilösningen och krama ur överflödigt vätska.
3. Rengör såret varsamt i enlighet med lokal klinisk praxis.

## BRUKSANVISNING - SÅR

1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
3. Vid kaviteter appliceras förbandet så att det har direktkontakt med hela sårytan.
4. Applicera ett lämpligt sekundärförband.
5. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

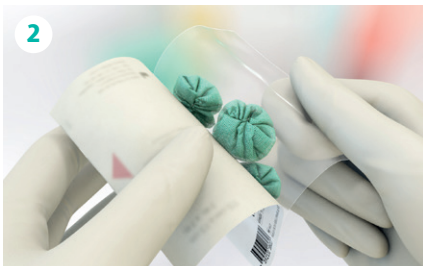

## SORBACT® – FÖREBYGGER INFEKTION

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen på naturlig väg. Mikroorganismerna binds irreversibelt till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts