

3M Hälsovård

3M wSteri-Drape Slanghållare 1115



3M Steri-Drape Slanghållare 1115

Slanghållare 1115 hjälper dig att organisera slangar och sladdar av olika storlek och hålla dem på plats. Slanghållaren är självhäftande och går att fästa på bord, vagnar och annan utrustning i op-salen. Då den fästs på 3M Steri-Drape draperingsmaterial kan slanghållaren vid behov flyttas och återfästas utan att skada draperingen.

3M Steri-Drape Slanghållare 1115

Håller ordning på slangar och sladdar.



Återförslutningsbart häftämne tillåter dig att flytta, lägga till eller ersätta slangar och sladdar enkelt.

Slangar och sladdar kan fästas så att de tillåts rörlighet under slanghållaren genom att den övre fliken viks på mitten (se bild).

Användaranvisningar



1. Tag av linern på slanghållarens baksida.



2. Fäst slanghållaren på önskad plats. Öppna slanghållaren genom att lyfta den blå fliken.



3. Placera slangar och sladdar i önskad position. För att fästa slangarna/sladdarna återförs den blå fliken till sitt ursprungliga läge.



4. Vid behov av flytt av slanghållaren, lyft slanghållaren i den slutna (vita) änden.

Beställningsinformation		
Art nr	Storlek cm	Ant/lev fp
1115	14 × 4 cm	400

Material; Polyetylen, polyester
Häftämne; Akrylatbaserat
Tillverkningsland; USA
Hållbarhet; 5 år
Steriliseringsmetod; ETO
Produkten är CE-märkt och steril
Förvaring; I normal rumstemperatur och luftfuktighet

3M

Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00
Fax: 08-92 22 89
www.3Mhealthcare.se

3M och Steri-Drape är registrerade varumärken hos 3M Company. Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige.
©3M 2015. Alla rättigheter förbehålles. PB53 0036-2 SE 151019