




# Gipsöppnare

Snabbt och enkelt • Praktiskt - dammfritt  
Bekvämt för patienten • Inga risker för skador




Surgical Perfection

## Anbringande

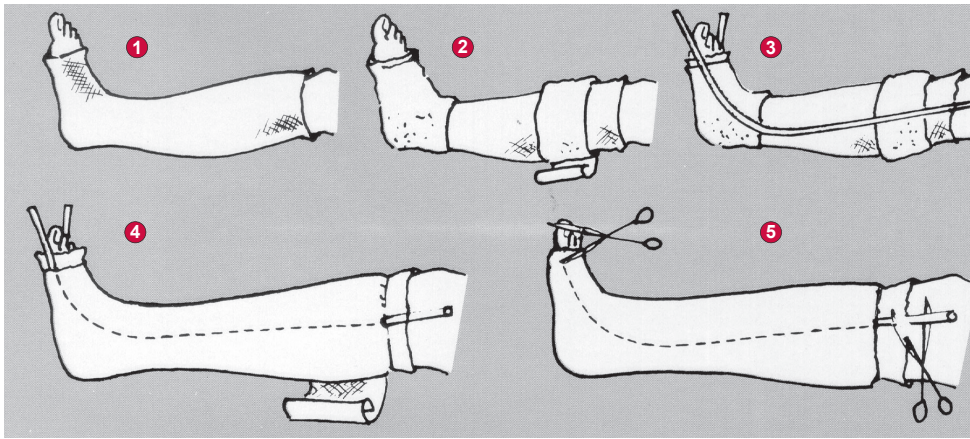

1. Trä på trikåstrumpan.
2. Polstra.
3. Fäst den självhäftande plastprofilen på extremiteten. **OBS!** Plastprofilen måste vara något förskjutet åt böjsidan och läggas i så mjuk böj som möjligt. **Den får ej anbringas bakom eller på malleoler eller andra utskjutande bendelar.**
4. Anlägg gipsen enligt vanlig rutin.
5. Klipp av eventuella utskjutande delar av plastprofilen vid gipsen, utan att sågtrådens införande förhindras.

## Avlägsnande

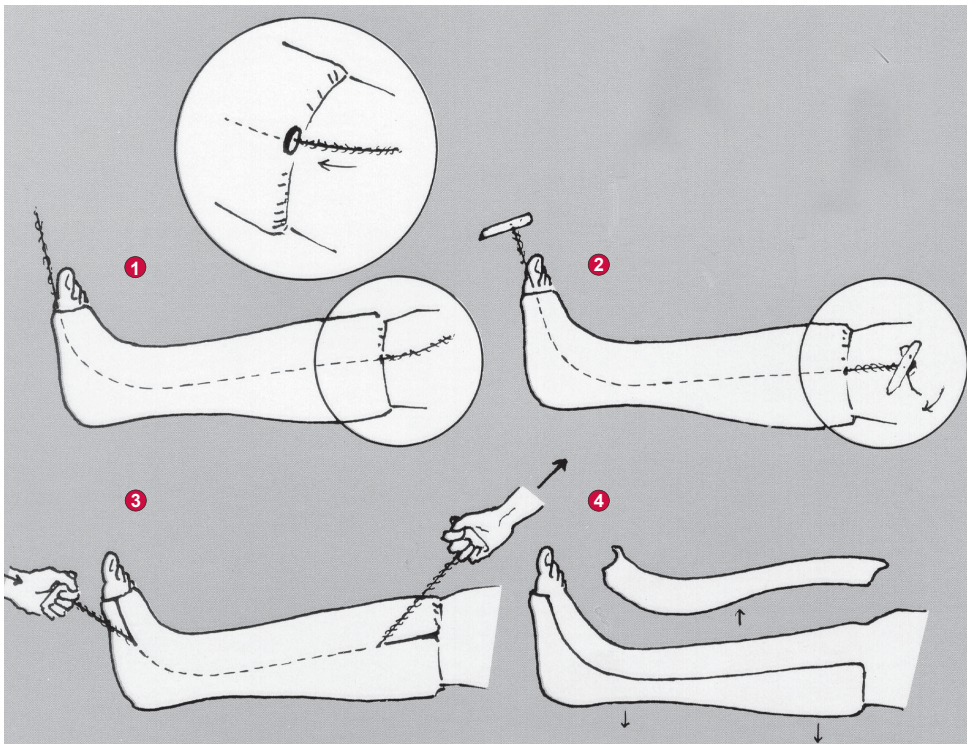

1. För in sågtråden genom plastprofilen.
2. Fäst ett handtag i vardera ändan av sågtråden.
3. Såga med försiktiga rörelser genom gipsen - inifrån och ut. Börja sågrörelsen parallellt med extremiteten och öka sedan angreppsvinkeln genom att höja sågtråden till maximalt 45°. Såga upp gipsen genom att dra handtagen fram och tillbaka. Om sågtråden går trögt, sänk handtagen och såga parallellt igen. **OBS!** Skulle patienten säga att det känns varmt vid sågrörelserna, avvakta en liten stund och börja åter såga.
4. Sedan båda sidor genomsågats avlägsnas gipsen genom att det lösa locket avlyftes och trikåstrumpan och polstringen klipps upp, varefter extremiteten togs ur den bildade gipsskenan.

## STILLE gipsöppnare

Artikelnummer	
413-2500-2	Handtag för STILLE gipsöppnare metall ledat t-form
413-2502-85	Sågtråd STILLE 85 cm förp om 100 st
413-2502-125	Sågtråd STILLE 125 cm förp om 100 st
413-2504-85	Plastprofil STILLE 85 cm förp om 100 st
413-2504-125	Plastprofil STILLE 125 cm förp om 100 st



Surgical Perfection

**STILLE AB**  
 Ekbacken 11  
 SE-644 30  
 Torshälla, Sweden  
 Phone: +46 8 588 580 00  
 Fax: +46 8 588 580 05  
 sales@stille.se

**STILLE Surgical Inc.**  
 915 Parkview Blvd  
 Lombard, IL 60148  
 United States  
 Phone: 1.800.6651614  
 sales.us@stille.se

**Distributed by:**

[www.stille.se](http://www.stille.se)