

the difference is clear

Vitalograph copd-6

KOL screening instrument

Vitalograph copd-6

För tidig upptäckt av KOL - snabbt, enkelt och exakt

- ☛ Identifierar patienter som riskerar KOL vid ett så tidigt skede som möjligt för att möjliggöra tidiga medicinska ingrepp och få bättre kliniska resultat
- ☛ Utesluter den vars FEV₁ är normalt, och som därför inte har KOL, utan risk för falskt negativa provsvar
- ☛ Underlättar urvalet av patienter som behöver spirometriundersökning, till dem som är mest sannolika att få diagnosen KOL
- ☛ Visar de viktigaste parametrarna för klinisk tolkning inklusive obstruktivt index och KOL klassificering (stadium I - IV)
- ☛ Visar FEV₁, FEV₆, kvoten och % av förväntat värde, obstruktivt index, KOL klassificering samt lungålder
- ☛ Enkel rengöring av flödes huvudet
- ☛ Kan användas med hygieniska SafeTway® munstycken eller BVF™ bakteriefilter
- ☛ Kräver endast minimal instruktion före användning
- ☛ Inbyggd kvalitetskontroll
- ☛ Stor, lättläst display
- ☛ Språkoberoende
- ☛ Uppfyller ATS / ERS: 2005 Spirometri Guidelines



copd-6 är mycket lätt att använda:

- ☛ Ange ålder, längd och kön
- ☛ Blås i 6 sekunder (enheten piper efter 6 sekunder)
- ☛ Blås 3 gånger
- ☛ Tryck "Enter" för att visa resultat

copd-6™ levereras komplett med:

- ☛ 3 SafeTway munstycken
- ☛ Förvaringspåse
- ☛ Manual för sjukvårdspersonal
- ☛ 2 AAA-batterier

Tekniska specifikationer:

Produkt: Andningsövervakning

Modellnummer: 40200

Parametrar som visas: FEV₁ / FEV₆ / kvoten och % av förväntat värde

Indikerar blås/testkvalitet: Ja

Obstruktivt index: mild, måttlig, svår (FEV₁ % av förväntat)

KOL Klassificering: Normal (ej KOL); Stadium I, II, III och IV (FEV₁ % av förväntat värde)

Lungålder indikering: Ja

Noggrannhet: Bättre än +/- 3%

Omfång: 0 - 9,99 L BTPS

Sensor: rotor

Flow Impedans/flödesmotstånd: Bättre än 0,15 kPa/L/s vid 14 L/s

Strömförsörjning: AAA-batterier

Display: flytande kristaller

Storlek: 113 x 63 x 48 mm

Vikt: 55 g

Standard: ISO 26.782: 2009; ISO 23747: 2007; ATS // ERS 2005

Drifttemperatur: 17-37°C

Säkerhetsstandarder: IEC 60601 1: 2005

Medicinsk säkerhetsstandard: MDD 93/42/EEC

Design & tillverkning under: ISO 13485:2003, FDA 21CFR820

Artikelnummer Vitalograph:

40200 4000 Vitalograph copd-6

20242 2024 SafeTway® munstycke (200)

28350 2820 BVF™ bakteriefilter (50)

20303 2030 Näsklämma (200)

36020 2040 3 L kalibreringsspruta


Your respiratory partner

Vitalograph Ltd. UK
Maids Moreton, Buckingham
MK18 1SW
England
Phone: (01280) 827110
Fax: (01280) 823302
e-mail: sales@vitalograph.co.uk
www.vitalograph.co.uk

Vitalograph Ltd. Export
Maids Moreton, Buckingham
MK18 1SW
England
Phone: +44 1280 827120
Fax: +44 1280 823302
e-mail: sales@vitalograph.co.uk
www.vitalograph.eu

Vitalograph GmbH
Rellinger Straße 64a
D-20257 Hamburg
Germany
Phone: (040) 547391-0
Fax: (040) 547391-40
e-mail: info@vitalograph.de
www.vitalograph.de

Vitalograph Inc.
13310 West 99th Street
Lenexa, Kansas, 66215
USA
Toll Free: 800 255 6626
Phone: (913) 730 3200
Fax: (913) 730 3232
e-mail: vitcs@vitalograph.com
www.vitalograph.com

Vitalograph (Ireland) Ltd.
Gort Road Business Park
Ennis, Co. Clare
Ireland
Phone: +353 65 6864100
Fax: +353 65 6829289
e-mail: sales@vitalograph.ie
www.vitalograph.ie