



# Humid-Vent® 1

## Fuktvärmeväxlare för barn och vuxna

- Tidalvolym 50-600 ml
- Dead-space 10 ml
- Vikt 9,4 g
- Kopplingar 15-22/15 mm, ISO 5356-1
- Medium: Hygroskopiskt, naturligt mikrowellpapper  
Bakteriostatiskt
- Flödesmotstånd:  
vid 20 l / min - max 0,3 cm H<sub>2</sub>O  
vid 40 l / min - max 0,7 cm H<sub>2</sub>O
- Befuktningseffektivitet:  
vid V<sub>T</sub> 300 ml - 29 mg H<sub>2</sub>O / l luft  
vid V<sub>T</sub> 600 ml - 24 mg H<sub>2</sub>O / l luft  
Testmetod: ISO 9360
- Förpackning: Enstycksförpackade  
Avdelningsförpackning: 50 st,  
Transportförpackning: 500 st
- LOT-nummer finns på samtliga förpackningsenheter
- Svensk instruktion/bruksanvisning i varje avdelningsförpackning
- Latexfri

### OBS!

- Byte rekommenderas var 24:e timme
- Byt fuktvärmeväxlare vid tecken på obstruktion
- Endast för engångsbruk

### Kontraindikationer!

- Humid-Vent® 1 ska inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
- Humid-Vent® 1 ska inte användas i samband med aktiva befuktare eller vid nebulisering.
- Förfukta inte.

### Artikelnummer:

Utan port	10012514	Hygienförp.
Med port	10012515	Hygienförp.

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

Produkt	Material	Vikt i gram	Rest efter förbränning
Hylsa	Polypropen	7,8	Koldioxid och vatten
Medium	Papper, impregnerat med CaCl <sub>2</sub>	1,6	Koldioxid och vatten
Förpackning - ytterkartong			
A) Övre delen	Papper	0,3	Koldioxid och vatten
B) Nedre delen	Flerskikts plastfilm av Polyeten-copolyamid	0,8	Koldioxid och vatten och Kväveoxid (< 1,7 % av volymen, 2,7 % av vikten)
Avdelningsförpackning	Papper	107,0	Koldioxid och vatten
Transportförpackning	Papper	537,0	Koldioxid och vatten

*Förbränning av Humid-Vent® 1 ger lika mycket som 29,14 g CO<sub>2</sub> eller 73 minuters normalandning.  
En person ( 70 kg ) utandas ungefär 24 g CO<sub>2</sub> / timme.*

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)