


Hudvänligt hudskyddsförband

- Mepitel Film är ett mjukt, transparent och andningsbart hudskyddsförband som skyddar huden. Det kan användas separat eller tillsammans med andra produkter.
- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte.^{1,2,3,4,5,6}
- Formbart och enkelt att applicera.

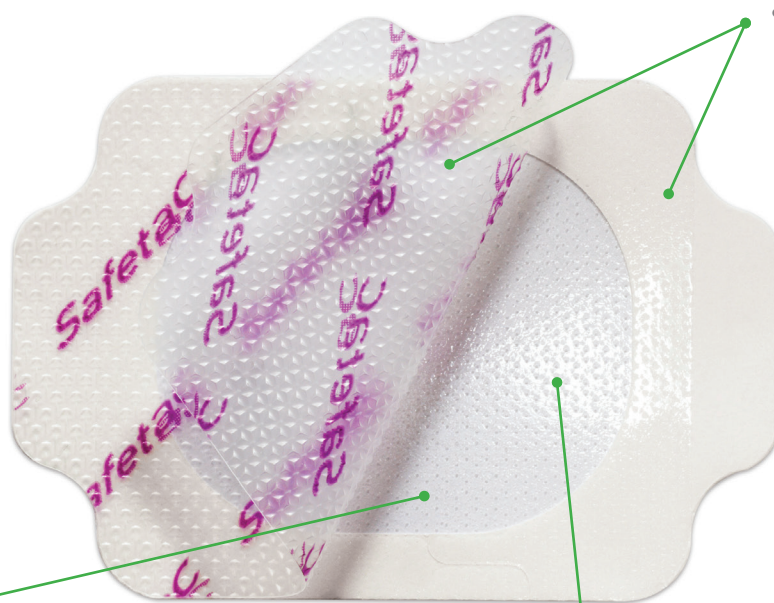

- Skyddspapper och pappersram för enkel applicering

Safetac® yta


- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte^{2,3,5,6}
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden²
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration^{3,4}
- Transparent, andningsbar, elastisk polyuretanfilm för komfort och optimal sår läkningsmiljö
- Duschbart
- Virus- och bakteriebarriär*

* mikrober större än 25 nm


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information www.safetac.com

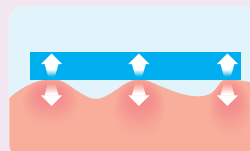

Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhäfta aggressivt för att sitta på plats

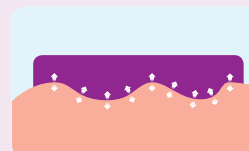

Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna

Så här används Mepitel® Film



Torka huden/hudområdet grundligt.
Avlägsna skyddspappret (med Safetac-tryck).



Applicera förbandet. Mepitel Film kan
ompositioneras så länge pappersramen är
intakt. Avlägsna den vita pappersramen.
Sträck inte förbandet vid applicering.
För bästa resultat ska Mepitel Film överlappa
den omkringliggande torra huden med minst
1-2 cm för storlekar upp till 10x12 och 5 cm för
större storlekar.



Stryk ut förbandet på huden. Mepitel Film
kan avlägsnas utan att orsaka hudstrippning
och smärta.

Så här fungerar Mepitel Film

Mepitel Film ger ett flexibelt och transparent skydd för huden/såret och förhindrar mikrobiell kontaminering. Förbandet fungerar även som en barriär mot vätska och formar sig väl efter kroppens konturer. Mepitel Film bibehåller en fuktig sårmiljö och den höga andningsbarheten tillåter överflödigt fukt att avdunsta. Safetac® gör att Mepitel Film vidhäftar omedelbart vilket minskar behovet av extra tryck för fixering. Vidhäftningen med Safetac® ger ingen vävnadsskada vid förbandsbyte. Förbandet lämnar inga rester vid avlägsnandet.

Fördelar med Mepitel Film

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Minskar risken för skada på nybildad vävnad
- Transparensen gör det enkelt att inspektera såret
- Formar sig väl efter kroppens konturer
- Virus- och bakteriebarriär*
- Liten risk för hudirritation och allergi
- Lämnar inga rester
- Skyddar mot extern kontamination
- Duschbar

Bytesfrekvens

Mepitel Film kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets och den omkringliggande hudens tillstånd eller enligt gällande klinisk praxis.

Varning

Mepitel Film kan inte användas till primär fixering av IV, kanyler, ingångar eller andra infusioner samt livsuppehållande utrustning.

Mepitel Film sortiment (levereras sterila)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
296170	6 × 7	10	50
296270	10 × 12	10	70
296470	10 × 25	10	50
296670	15 × 20	10	70

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon 031 722 30 00
www.molnlycke.se
www.molnlycke.se/patient

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepitel® One are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB

Observera

- Mepitel Film är inte ett sårkontaktlager och tillåter inte sårsekret att passera till ett ytterförband.
- Om mer än en produkt används och de överlappar varandra minskar andningsbarheten. Det kan leda till att överflödigt fukt inte kan avdunsta från huden.

Användningsområden

Mepitel Film är utvecklat för flera olika typer av sår, så som:

- Behandling av ytliga
- - hudskador
- - trycksår kategori 1 och 2
- - brännskador
- Skydd av känslig och skör hud
- Skydd av öppna kirurgiska sår
- Fixering av primärförband
- Landing Zone för fixering av tejp
- Kan kombineras med geler och salvor



References:

1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2005; 3. Meaurio S et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer Ostomy Wound Management 2003; 4. Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication WUWHHS congress, Canada 2008; 5. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001; 6. Waring M, et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.

