

# Sterisols Ögondusch – effektiv hela vägen.

Ögondusch



Sterisols ögonduschprogram  
- alltid nära till hands.

**Sterisol**

[www.sterisol.se](http://www.sterisol.se)

## Ögondusch med alla rätt!

När ett öga skadas av stänk eller liknande behövs omedelbart effektiv första hjälpen-behandling. Sterisol Ögondusch är en av de säkraste och snabbaste produkterna:

- All vätska träffar ögat i ett kontinuerligt och jämnt flöde.
- En flaska räcker länge – 6 eller 12 minuters spolning.
- Snabb igångsättning – ett bestämt slag med handen på skyddshuven bryter säkerhetsförseglingen.
- Lätt att ta med – för spolning av skadat öga under transport till fast ögonspolningsanordning eller läkare.

## Användningsområde

Sterisol Ögondusch är ett tryggt komplement till fasta ögonduschstationer. Den passar utmärkt på rörliga arbetsplatser, i bilar, båtar, manskapsbodar etc. Det är lätt att ta flaskorna ur väggfästet och att använda dem för kontinuerlig spolning på väg till läkare eller fast ögonduschstation. När en flaska öppnats ska den användas omgående och sedan kastas. Ersätt med en oöppnad flaska! Se till att ha tillräckligt med ersättningsflaskor på lager för att komplettera med vid behov!

## Placering

Anordning för ögonspolning ska finnas i omedelbar närhet av riskfyllda arbetsplatser. Det är viktigt att vägen till ögonduschen är fri, utan hinder. Den skadade måste själv kunna hitta och ta sig fram, kanske utan att se och med smärtor i ögonen. När man hanterar alkaliska och andra frätande ämnen ska spolningsanordning finnas på armlängds avstånd.

## Gör så här!



Slå hårt och bestämt med handen på den gröna skyddshuven!



Ta bort den gröna skyddshuven som nu lossnat!



Öppna ögonlocken. Spola med huvudet bakåtlutat! Flaskan placeras så att spolkoppen hjälper till att hålla upp ögonlocken. Vätskan skall självrinna.

## Att tänka på...

När ett skadligt ämne kommit in i ögat så gäller framför allt tre saker:

- 1** Spolningen måste börja omedelbart för att det inte ska uppstå allvarliga skador. Spola hela tiden, även vid förflyttning till fast ögonduschläggning eller läkare!
- 2** Spolningen ska pågå länge. Tidslängden varierar beroende på vilket ämne som kommit in i ögat. Låt läkare avgöra när spolningen ska upphöra! Ha därför alltid ett antal extra flaskor i reserv för spolning under transport.
- 3** Ofta måste båda händerna vara fria för att hålla isär ögonlocken. Kalla därför snabbt på hjälp!

## Produktöversikt



### Sterisol Ögondusch-ställ - 0,5 liter

Bärbart väggfäste med 2 flaskor och väggskylt.

Art nr 4735 2x0,5 l



### Sterisol Ögondusch-ställ - 1 liter

Bärbart väggfäste med 2 flaskor och väggskylt.

Art nr 4635 2x1 l



### Sterisol Ögondusch

Engångsflaska, refill till väggfäste.

Art nr 4731 0,5 l

Art nr 4631 1 l



### Sterisol 5-pack Ögondusch

Väggfäste med 5 flaskor och väggskylt.


Art nr 4630 5x1 l

# Ögondusch

## Symbolförklaringar

Etiketten på Sterisol Ögondusch är försedd med de symboler som EU-direktiven föreskriver. Här är förklaringar på symbolerna:

- Sterile:** Steriliserad med ånga eller torr värme.
- CE:** Uppfyller kraven i EU:s direktiv för medicintekniska produkter.
- 0434:** Kontrollorganets sifferbeteckning (0434 DNV)
- 2:** Endast för engångsbruk.
- LOT:** Följs av siffra och betecknar tillverkningsatsens nummer.
- x:** Används före-datum. Anges med fyra siffror för året och två siffror för månaden, exempelvis 2012-06.

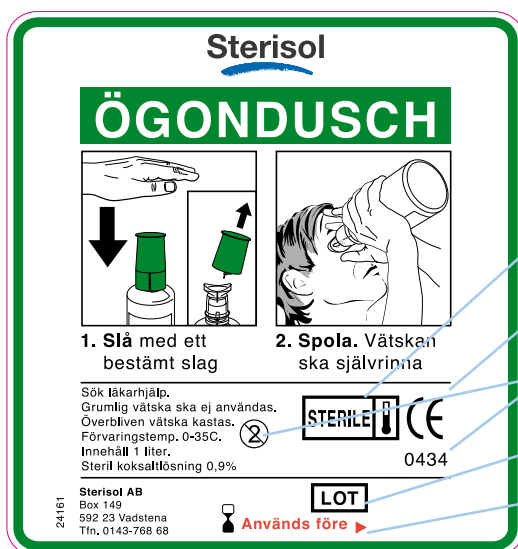

## Produktfakta

**Innehåll:** 0,5 eller 1 liter steril isoton koksaltlösning (0,9 %). Tömningstiden är ca 6 respektive 12 minuter.

**Hållbarhet:** Vätskan är hållbar i 3 år i öppnad flaska. Ett "används före-datum" finns tydligt skrivet på varje flaska. Efter detta datum ska flaskorna bytas ut, för att Sterisol AB ska garantera att innehållet är lämpligt för ögonspolning. Sterisol bevakar hållbarhetsdatum om svarkortet som följer med nya flaskor fylls i och skickas in.

**CE-märkning:** Sterisol Ögondusch har märket CE på etiketten. Det innebär att kraven i EU:s direktiv för tillverkning av medicintekniska produkter är uppfyllda. Ögonduschen är kategoriserad i klass 1, steril, och har därför granskats av ett så kallat tredjeparts organ – i det här fallet 0434 som är DNV.



Koncentrerad stråle i ca 6 minuter (gäller 0,5 liter) eller 12 minuter (gäller 1 liter), per flaska. Hela vätskemängden träffar ögat för effektiv sköljning.

## Glöm inte att förebygga!

När man ska placera ögonspolningsanordningar måste man ta hänsyn till de lokala förhållandena. Var finns de mest riskfyllda arbetsplatserna? Hur kommer man snabbast till ögonspolningen? Det är också viktigt att kartlägga vilka ämnen man arbetar med. På sista sida finns några exempel på ämnen som kan ge allvarliga skador vid kontakt med ögat.

# Så här behandlar du:

## Skador av alkaliska ämnen

När alkaliska ämnen – som t ex lut, kaustiksoda, ammoniak, aminer, osläckt kalk och maskindiskmedel – träffar ögat uppstår lätt en elakartad skada. De tränger snabbt djupt in i ögat. Vissa alkali, som t ex ammoniak, har påträffats i ögats inre redan efter 25 sekunder.

Utan snabbspolning kan skadorna bli omfattande och medföra förlust av synförmågan. Anordning för ögonspolning bör därför finnas på armlängds avstånd och lätt kunna tas med under transport till läkare.

### Åtgärd:

- Spola omedelbart ögat och fortsätt med det under transporten till sjukhus.
- Håll ögonlocken brett isär under spolningen och låt läkare avgöra när den ska upphöra.
- Alkaliska skador ska alltid behandlas på ögonklinik.

## Skador av syror och övriga irriterande ämnen

Stänk av syra i ögat innebär risk för frätsår och ärrbildning, med synnedsättning som följd.

Syra påverkar hornhinnans äggviteämnen. Dessa koagulerar och en skyddsbarriär bildas. Barriären fördröjer syran att tränga djupare in i ögat, men omedelbar spolning av ögat är nödvändig.

### Åtgärd:

- Spola genast ögat – håll ögonlocken brett isär – och åk till sjukhus för vidare behandling.
- Spolningen ska pågå kontinuerligt under transporten till läkare!
- Låt läkare avgöra när spolning ska upphöra.

## Mekaniska skador

Mekaniska skador orsakas av främmande föremål som damm, spån och smuts. Exempelvis metallspån kan ge sveda, smärta och ärrbildning, med viss synnedsättning som följd.

### Åtgärd:

- Spola genast ögat tills det främmande föremålet är borta.
- Var noga med att spola under ögonlocken när partiklar fastnat i ögat eller om smärta eller irritation kvarstår.

Sterisol AB, Box 149, 592 23 Vadstena  
Tel: 0143-768 68 Fax: 0143-136 09  
E-post: [info@sterisol.se](mailto:info@sterisol.se)

[www.sterisol.se](http://www.sterisol.se)

**Sterisol**  
  
[www.sterisol.se](http://www.sterisol.se)