


# Cystofix<sup>®</sup>

## Suprapubisk perkutan kateterisering

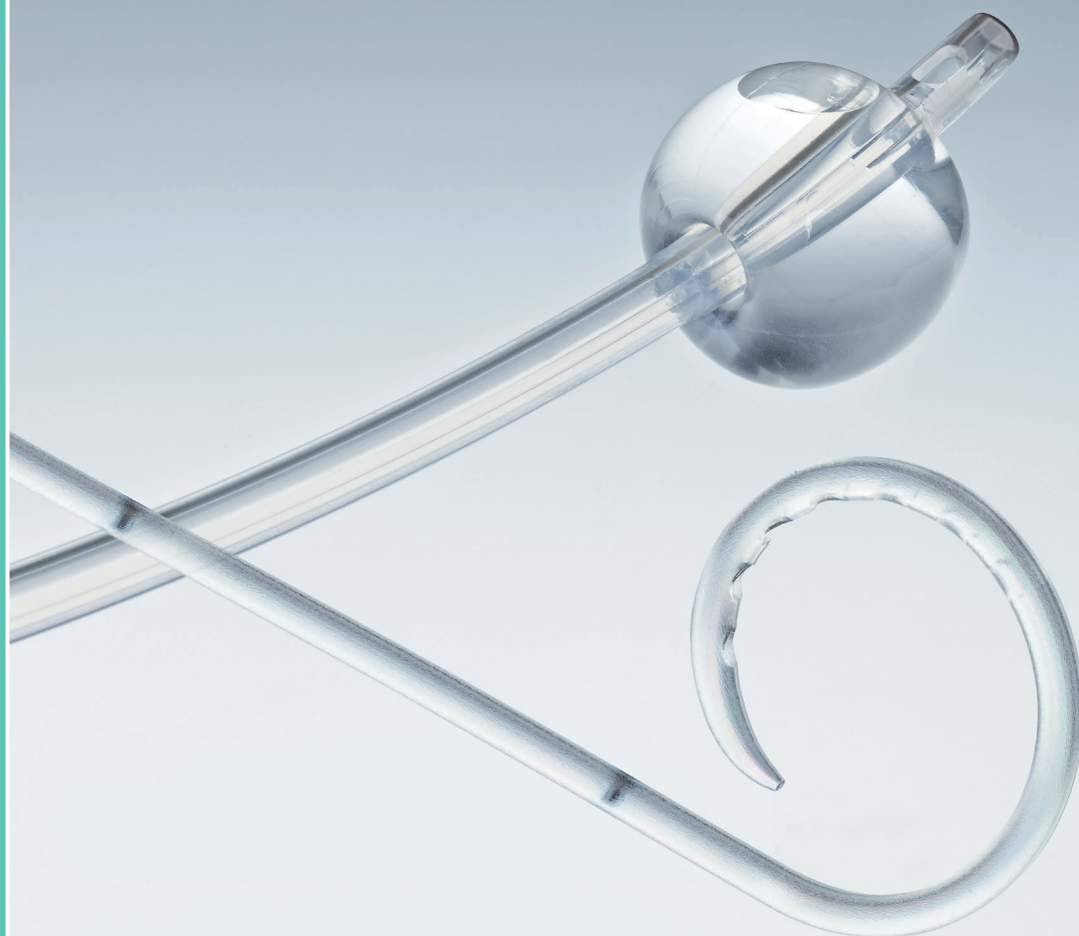


För säkra lösningar

# Cystofix<sup>®</sup>

ett etablerat namn inom suprapubisk  
perkutan kateterisering

## EN NY GENERATION CYSTOFIX<sup>®</sup> Ready-To-Use

Med förapterad kateter  
inne i kanylen

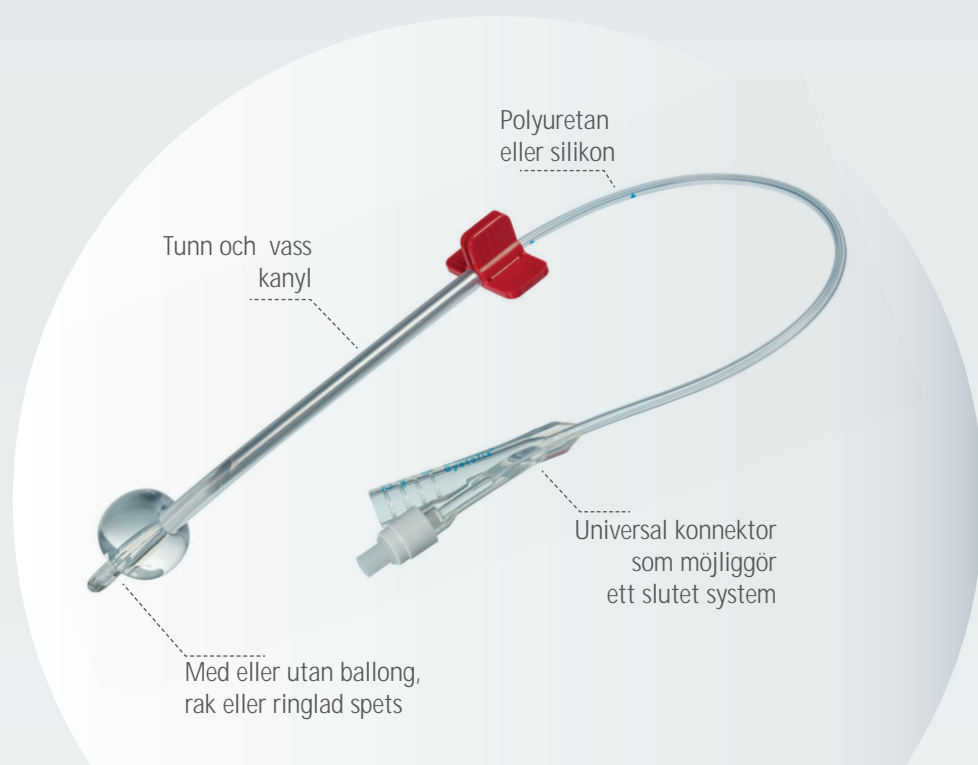


1, 2, ... 3 skäl att bli en användare!

## SPK som en förebyggande lösning av nosokomial infektion

Majoriteten av nosokomiala urinvägsinfektioner är kateterrelaterade. Denna risk kan signifikant minskas med en suprapubiskateter.

Med en procentandel på 42 % utgör urinvägsinfektioner den största andelen inom nosokomiala infektioner. Bland dessa är 80 % orsakade av en kvarliggande urinkateter.

<sup>1</sup> Infection 1997; 25: 199-201; Arch Intern Med 2000; 160: 678-682  
<sup>2</sup> World Health Organization; Prevention of hospital-acquired infections. WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12

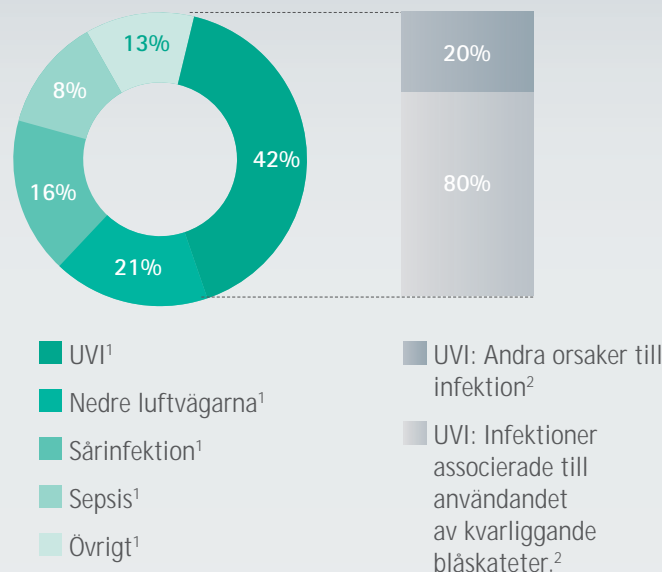

### INDIKATIONER

- När intermittent kateterisering inte är indicerat, för akut och kronisk urinretention och prostatit.
- Obstruktion, striktur, abnormal uretral anatomi, bäcken trauma.
- Faecesinkontinenta patienter som kontinuerligt smutsar ner transuretral kateter.


### FÖRDELAR

- + Mindre risk för uretralt trauma och nekros.
- + Förbättrat välmående för patienten: bättre komfort jämfört med kvarvarande kateterisering, speciellt för patienter i rullstol.
- + Reducerad risk för kateterkrosskontaminering.

## Säkerställ en enkel och säker dränering för dina patienter med den gyllene standarden för SPK

### Cystofix®-sortimentet, från akuta till långvariga applikationer...

Katetrarna är tillgängliga i polyuretan eller silikon. Med eller utan ballong, rak spets för minimal invasivitet eller ringlad för ett högre dränage tack vare antalet laterala ögon.

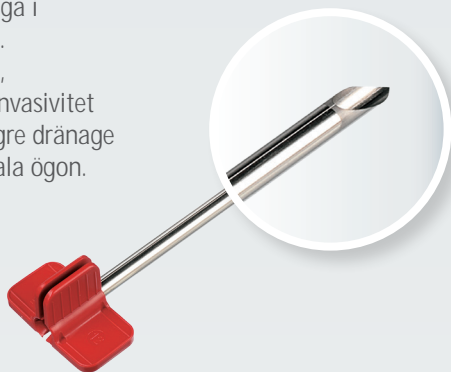


### FÖRDELAR

- + Hög punktionsprecision: vass och rostfri kanylspets
- + Enkel att greppa: 3-vingars grepp  
Delbar kanyl
- + Glideffekt: Kanylen silikoniserad för ett enkelt införande

## Välj rätt suprapubiskt urindränage

### VINNANDE KOMBINATIONER

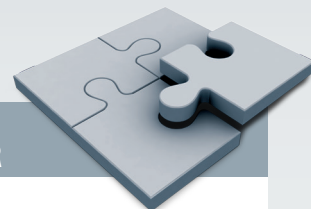

Ureofix®112 Plus




Urimed SP®



Ureofix® 500 Classic



UroTainer® Twin

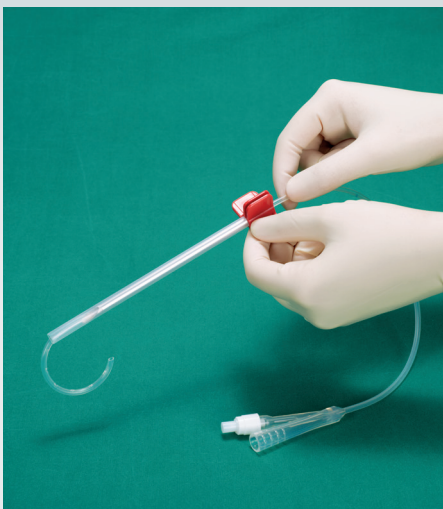


## 1 Säker

Öppna ytterförpackningen och förbered Cystofix® Set på ett sterilt område.

Katetern är förmonterad i kanylen med det transparenta skyddshöljet.


**OBS – Ta inte bort skyddshöljet från den förmonterade katetern.**

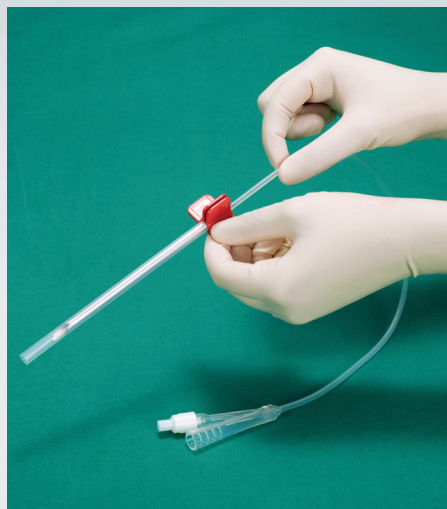

## 2 Lätt handhavande

Dra försiktigt tillbaka katetern till det sista märket syns bak vid hanteringsområdet.

**Det skyddande höljet motverkar att kanylens punktionsspets skadar katetern när den dras tillbaka.**

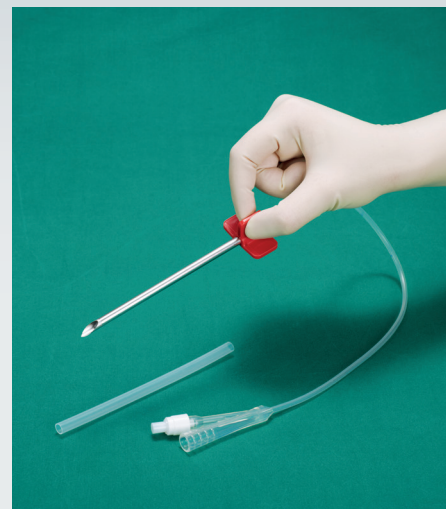


## 3 Ready to use

Kontrollera kateterns position: om den är rätt placerad bakom kanylens spets (avfasningen) ska skyddshöljet tas bort. Setet är redo för punktion av blåsan.

**Spara tid med Cystofix® Ready-to-Use!**

# Cystofix® | Suprapubisk perkutan kateterisering

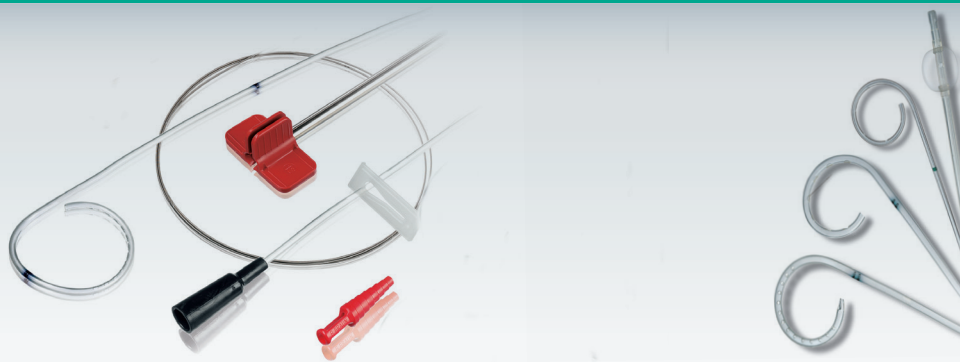

	PRODUKT	CH	K A T E T E R L Ä N G D	M A T E R I A L	K A N Y L L Ä N G D (M M)	ARTIKELNR	ENHETER P E R A V D F P
Akut och kortare tid (Innelligande tid max 14 dagar)	Cystofix® Set utan påse «Ready-to-Use», ringlad spets <b>NYHET</b>	10	65 cm	Polyuretan	80	445 0100	10
	Cystofix® Set utan påse «Ready-to-Use», ringlad spets <b>NYHET</b>	10	65 cm	Polyuretan	120	445 0120	10
	Cystofix® Set utan påse «Ready-to-Use», ringlad spets <b>NYHET</b>	15	65 cm	Polyuretan	120	445 0130	10
	Cystofix® Set med uppsamlande 2L-påse «Ready-to-Use», ringlad spets <b>NYHET</b>	10	65 cm	Polyuretan	80	445 0150	10
	Cystofix® Set med uppsamlande 2L-påse «Ready-to-Use», ringlad spets <b>NYHET</b>	10	65 cm	Polyuretan	120	445 0160	10
	Cystofix® Set med uppsamlande 2L- påse «Ready-to-Use», ringlad spets <b>NYHET</b>	15	65 cm	Polyuretan	120	445 0170	10
	Cystofix® Utbytesset, ringlad spets	10	65 cm	Polyuretan		444 1001	25
	Cystofix® Utbytesset, ringlad spets	15	65 cm	Polyuretan		444 1150	25
Längre tid (Mer än 14 dagar)	Cystofix® Set med ballongkateter «Ready-to-Use», rak spets <b>NYHET</b>	12	40 cm	Silikon	120	445 0200	10
	Cystofix® Set med ballongkateter «Ready-to-Use» <b>NYHET</b>	12	53 cm	Silikon	120	445 0210	10
	Cystofix® Utbytesset med ballongkateter, rak spets	12	40 cm	Silikon	-	444 1257	25
	Cystofix® Utbytesset med ballongkateter, ringlad spets	12	53 cm	Silikon	-	444 1451	10
	Cystofix® Dilation - Utbytesset med ballongkateter, rak spets	12	40 cm	Silikon	-	444 1117	25
	Cystofix® Dilation - Utbytesset med ballongkateter, ringlad spets	16	43 cm	Silikon	-	444 1338	25
Paediatriiskt & Neonatalogi	Cystofix® PAED Basset med uppsamlande påse 1,5L	10	50 cm	Polyuretan	50	444 0013	25
	Cystofix® PAED Utbytesset	10	50 cm	Polyuretan		444 1001	25
	Cystofix® MINIPAED Basset, ringlad spets	5	50 cm	Polyuretan, Ø 2,4	50	444 1036	10
	Cystofix® MINIPAED Utbytesset, ringlad spets	5	50 cm	Polyuretan		444 1230	10

## TILLBEHÖR

Artnr	Beskrivning	Antal/avdfp
4435001	Kateterpropp, röd	50 st
5206634	Combidyn® adapter, hona-hona	100 st



Artnr	Beskrivning	Antal/avdfp
4896610	Kateteradapter med luer, engångsoliv	100 st
4896629	Adapter luer till kateterfattning, hona	100 st



CD Urinary Catheterization of the Bladder ZG 00724



