


Produktfaktablad

IQ-Cath

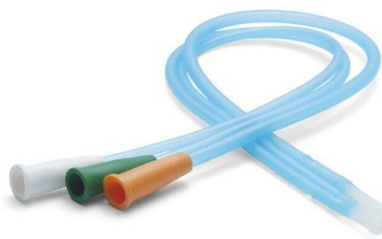

IQ-Cath Hydrofil tappningskateter med kulformad spets

Produktnamn: IQ-Cath, engångskateter för RIK
Certifiering: DIN EN ISO 10993
CE 0535

KARAKTERISTIKA

IQ-Cath tappningskateter är en engångs urintappningskateter tillverkad av PVC (polyvinylklorid) och täckt med tvärbunden PVP (Polyvinylpyrrolidon) för överlägsen hydrofil ren intermittent kateterisering. Ytskiktet på katetrarna har en hydrofil beläggning som binder vatten. Resultatet är en mycket blöt och hal yta som har en 90-95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. Den hydrofila ytan innebär att katetern har låg friktion när den förs in.

Friktionskoefficient $\leq 0,03$ N.

Katetern har jämn beläggning, slät yta och sidohålen väl avfasade.

Kulformad spets (patenterad):

Den färglösa mjuka spetsen består av en mjukt kulformad spets följt av en mycket böjbar zon.

Flexibelt område (patenterad):

Spetsen följs av ett flexibelt område av ungefär 5 cm längd.

Vägledande zon:

Följande delen av kateterskaftet på IQ-Cath, som fortsätter under resten av längden, är styvare.

Kateterkonnektorerna som ansluter till alla vanliga urinpåsar har en internationell färgkod enligt följande:

CH	10	12	14	16	18
Färg	Svart	Vit	Mörkgrön	Orange	Röd

SORTIMENT

För kvinnor, barn och män

17 cm, Ch 10 - 14

33 cm, Ch 10 - 14

43 cm, Ch 10 - 18

(Ch: Charriere 1mm = 3 Ch)

STERILISATION

Steriliseras med Etylenoxid

För engångsbruk

INDIKATIONER

- Tömning av urinblåsan, på sjukvårdsinrättning eller i hemmet
- Ren intermitterent kateterisering
- Använd ej utan att först aktivera med steril koksaltlösning eller rent vatten.
- Katetern bör användas genast efter aktivering

ANVISNING FÖR ANVÄNDNING

- Tvätta händerna noga före användning.
- Rör aldrig vid själva katetern. Ta i stället i förpackningen eller använd en steril pincett som ett gripande stöd.
- Öppna paketet vid trattänden. Håll katetern upprätt och fyll med saltlösning eller rent vatten för att säkerställa att kateterytan aktiveras av vätskan i 30 sekunder.
- Vänd på setet och töm ut vätskan. Öppna förpackningen vid den främre änden så att kateterspetsen friläggs.
- Förpackningen kan användas som en förlängning för att tömma urinen direkt i toaletten. Flytta tratten framåt för att täta förpackningen.
- Alternativt kan katetern tas ut från den bakre änden. Anslut om så önskas till en urinuppsamlingspåse.
- Rengör runt urinrörsmynningen enligt anvisningar från sjukvårdspersonalen
- För in katetern tills urinen börjar rinna. När urinen slutar rinna, dra långsamt ut katetern.
- Kassera den använda katetern i hushållsavfallet
- Sortera ytterförpackningen som kartong och lämna till återvinning.

MATERIAL

Kateterrör och spets	Medicinsk kvalitet PVC och TP, ftalatfri (DEHP m.fl.) i olika hårdhet, Latexfri.
Mjukgörare:	Hexamoll DINCH (1,2-cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester)
Konnektor	Medicinsk kvalitet (Medical Grade) PVC och TP, ftalatfri, latexfri
Ytbeläggning	PVP, NaCl
Styckförpackningar	PA/PE-kompositfilm
Vätska	Koksaltlösning 0,9%
Ytterförpackningar	Kartong
Katetern är latexfri	
Katetern är ftalat- DEHP-fri	

VARNINGAR

Anordning endast för engångsbruk och kan inte återanvändas. Måste kasseras efter användning. Använd inte katetern om förpackningen är öppen eller har skadats.

FÖRVARING

Förvara i rumstemperatur. Förvaras på en ren och torr plats åtskilt från värme och ljus.

STYCKFÖRPACKNING

Styckförpackningen är märkt med storlek, artikelnummer och tillverkare.

AVDELNINGSFÖRPACKNING

Innehåller 30 st.

Avdelningsförpackningen är märkt med produktnamn, storlek, längd, LOT nummer, utgångsdatum, steriliserad med EO, för engångsbruk.

TILLVERKARE : Manfred Sauer GmbH, Neurott 7 · 74.931 Lobbach · Tyskland

Beställningsinformation

Artikelnummer	Beskrivning
Utan vatten 17 cm	
IQ2902.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, Ch 10, 17 cm
IQ2902.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, Ch 12, 17 cm
IQ2902.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, Ch 14, 17 cm
Utan vatten 43 cm	
IQ2004.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, Ch 10, 43 cm
IQ2004.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, Ch 12, 43 cm
IQ2004.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, Ch 14, 43 cm
IQ2004.16	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, Ch 16, 43 cm

Med vattenpåse 43 cm	
IQ2104.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med vattenpåse, Ch 10, 43 cm
IQ2104.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med vattenpåse, Ch 12, 43 cm
IQ2104.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med vattenpåse, Ch 14, 43 cm
IQ2104.16	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med vattenpåse, Ch 16, 43 cm
IQ2104.18	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med vattenpåse, Ch 18, 43 cm

I vatten 17 cm	
IQ2302.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 10, 17 cm
IQ2302.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 12, 17 cm
IQ2302.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 14, 17 cm
I vatten 33 cm	
IQ2303.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 10, 33 cm
IQ2303.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 12, 33 cm
IQ2303.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 14, 33 cm
I vatten 43 cm	
IQ2304.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 10, 43 cm
IQ2304.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 12, 43 cm
IQ2304.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 14, 43 cm
IQ2304.16	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, i vatten, Ch 16, 43 cm

I vatten med sleeves 33 cm	
IQ4303.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 10, 33 cm
IQ4303.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 12, 33 cm
IQ4303.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 14, 33 cm
I vatten med sleeves 43 cm	
IQ4304.10	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 10, 43 cm
IQ4304.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 12, 43 cm
IQ4304.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 14, 43 cm
IQ4304.16	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 16, 43 cm
IQ4304.18	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath med kulformad spets, med sleeves, Ch 18, 43 cm

Med urinuppsamlingspåse 43 cm	
IQ2604.12	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath, kulformad spets med urinuppsamlingspåse, Ch 12, 43 cm
IQ2604.14	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath, kulformad spets med urinuppsamlingspåse, Ch 14, 43 cm
IQ2604.16	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath, kulformad spets med urinuppsamlingspåse, Ch 16, 43 cm
IQ2604.18	Hydrofil tappningskateter IQ-Cath, kulformad spets med urinuppsamlingspåse, Ch 18, 43 cm

30st./förpackning

Utgåva 2023-10-17