



Avfallsburk

Avfallsburk

Avfallsburkar, storlekar från 0,2 L till 21 L, är utformade för användning på sjukhus, prehospitala kliniker och andra vårdinrättningar. Behållaren är speciellt utformad för säkert bortskaffande av farligt avfall/vassa föremål - t.ex. sprutor, skalpeller och nålar. Uppfyller UN 3291 om kliniskt avfall, ospecificerat medicinskt avfall eller reglerat medicinskt avfall. Olika öppningar i locket vägleder användaren till rätt omhändertagande av kanyler och sprutor.

- Produkten är tillverkad i Danmark av miljövänlig, stark och tålig PP (polypropylen)
- Hög grad av säkerhet inom design och produktion (ISO 9001)
- Olika lockutformningar beroende på applikation
- Locket har två funktioner
 - tillfällig och permanent stängning
- Vätsketät skarv mellan locket och behållaren

Vagn till behållare 5, 11 och 21 liter.
Reglerbar höjd 50-85 cm, kan tillhandahållas.

Artikelnummer	Volym	Diam Ø / höjd cm	Avd. / Pall förp.
US-702-SWE	0,2 l	4,7 / 12,9	100 / 6400
US-705-SWE	0,5 l	9 / 10,8	100 / 3200
US-715-SWE	1,5 l	13,7 / 13	100 / 1600
US-720-SWE	2,0 l	13,7 / 18	100 / 1600
US-750-SWE	5,0 l	21 / 19	30 / 360
US-770-SWE	7,0 l	21 / 26	405
KL-77510931	11,0 l	26 / 26	198
KL-77510936	21,0 l	29 / 40	180
KL-77511910	Hållare i metall för montering på bord eller på vägg. Passar till 1,5 och 2 liter.		20



KL-77511910

Leverantör


USON PLAST A/S

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

ANVISNINGAR - nålbehållaren

Undvik stickskador. Läs instruktionerna noga innan du använder vassa föremål.

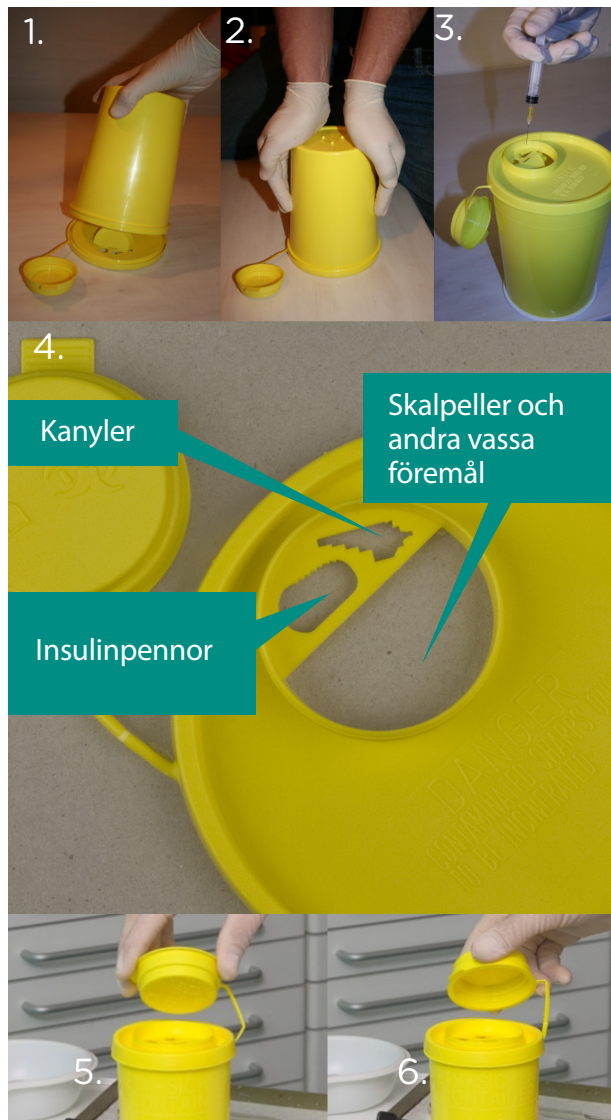

FÖRE ANVÄNDNING

1. Placera locket med ovansidan nedåt på ett fast underlag t.ex. ett bord. Placera behållaren upp och ner i locket.
2. Tryck med hjälp av kroppsvikten fast behållaren i locket tills ett klick hörs.
3. Nu är behållaren klar för användning.

UNDER ANVÄNDNING

4. Locken är avsedda för deponering av tre typer av farligt avfall: Nålar, insulinpennor, skalpeller och andra vassa föremål. Det är viktigt att använda rätt hål för ovan nämnda tre typer.

Kassering av föremål

Nålar: Nålens huvud bibehålls i skyddshylsan. Drag sprutan upprätt. Kanylen släpper och faller in i behållaren.

Insulinpennor: Stick in nålens luerfattning vid hålet med avlång öppning och skjut pennan mot den smalare änden. När nålens luerfattning har fastnat, vrid insulinpennan tills axeln är fri från fästet.

Ett enkelt tryck på pennan pressar nålen i behållaren.

Skalpeller/vassa föremål: kastas i det stora hålet.

5. Vändbart lock

Det lilla, vändbara locket med rem har två funktioner:

A: Tillfällig stängning

B: Permanent stängning

Om behållaren är tillfälligt stängd

("A" på locket uppåt). Om behållaren är fylld,

permanent stängning ("B" på locket uppåt).

OBS! Fyll aldrig över fyllningslinjen.

EFTER ANVÄNDNING

6. Deponering: Vänd locket (med "B" på omslaget uppåt) och pressa det över öppningen. Då locket inte kan öppnas igen är behållaren förseglad och redo för destruktion enl. institutionens anvisningar.