

## BARRIER® Knäartroskopilakan

- 100% vätsketätt material som förhindrar vätskegenomsläpp och bakterieöverföring
- Effektiv absorption innebär en torr arbetsyta
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt för en person att klä patienten
- Integrerad vätskeuppsamlingspåse för en effektivare hantering av vätska
- Integrerade slanghållare (kardborre) för att underlätta hantering av slangar



### BARRIER® bidrar till att ge bättre vård till fler patienter

Alla BARRIER® produkter är utformade för en optimal kombination av skydd, funktion och komfort. Erbjuder innovativa fullservicelösningar som kombinerar hög kvalitet, säkra produkter, leverans- och logistikfördelar samt kontinuerlig support och utbildning. Tillsammans skapar dessa element en ökad tids-, insats- och kostnadseffektivitet. Värdefulla resurser frigörs som i sin tur skapar ytterligare effektivitet - och bidrar till att ge bättre vård till fler patienter.

# Draperingsinstruktion



1 Vik ut ett instrumentbordslakan och placera det under patientens ben.



2 Täck benet antingen med en självhäftande op-handduk och fixera med op-tejp...



2 ...eller med en ortopedistrumpa och fixera med op-tejp.



3 Placera det hopvikta artroskopilakanet över patientens fot på det sätt som framgår av instruktionsetiketten.



4 För in handen genom den elastiska öppningen, fatta tag i patientens fot och dra den igenom öppningen.



5 Vik ut den nedre delen av lakanet under patientens ben och placera de två elastiska hålen i önskat läge runt knät. Vik ut operationslakanet över narkosbågen.



6 Placera benet i önskad position för operationen.



7 Operationslakanet kan också användas då operationsbordets fotända är nedvikta.

Art. nr.	Beskrivning	Förp. antal
60105	<b>Knäartroskopilakan</b> 230/300x320 cm, hål 7 och 5 cm elastisk, inslagen	5/10

Lakanet finns också tillgängligt för ProcedurePak®