

## **EZ Hold**

**För att fästa bl.a. slangar (t.ex. infusionsslangar), grimmor, sonder, CVK, sladdar (t.ex. elektrodspladdar) m.m. m.m.**




**CE**

***KAN ÖPPNAS OCH ÅTERFÖRSLUTAS!***

***TAS BORT UTAN ATT SKADA HUDEN!***

## EZ Hold

# BRUKSANVISNING

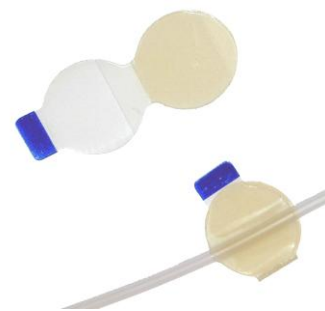

**EZ Hold** är avsedd att fixera slangar (t.ex. grimmor, infusions slangar eller andra slangar och sladdar) vid huden så att de inte kommer ur läge så lätt. Den kan öppnas och återförslutas, flera gånger, när man vill justera slangens läge eller när man ska byta till ny slang.

### FÖRBEREDELSE:

Innan man fäster en **EZ Hold** på huden så måste huden vara *ren och torr!*

När så behövs tvättas känslig hud med ljummet vatten eller en mild tvällösning och torkas torr med en kompress. Normal, tålig, hud på vuxen kan spritas av.

**EZ Hold** ska *alltid* vara uppvärmd innan man fäster den på huden. När den närmar sig hudtemperaturen kommer den att fungera som bäst.

### GÖR SÅ HÄR:

1. Värm **EZ Hold** mellan händerna i ca. 30 sekunder.
2. Tag försiktigt bort den tjocka/stela skyddsplasten från den beige fästytan och fäst **EZ Hold** på huden.
3. Håll fingrarna på den i ytterligare ca. 30 sekunder för bästa fästförmåga.
4. Tag nu bort nästa skyddsplast, som börjar vid den beige fästytan och täcker hela översidan t.o.m. den blå fliken.
5. Lägg slangens på den beige fästytan.
6. Tag i den blå fliken och vik över det mjuka "locket" så att det följer slangens rundning. Då sitter det bäst.
7. Öppna **EZ Hold** genom att ta i den blå fliken, hålla ett finger mot kanten på den beige fästytan, och försiktigt dra upp "locket".

**EZ Hold** håller för *flera* öppningar och förslutningar!

**EZ Hold** är mycket hudvänlig och låter huden andas. Den kan därför sitta i flera dagar och behöver inte bytas förrän man tycker det är nödvändigt.

**EZ Hold** tas bort med hjälp av en kompress med *riktigt* med ljummet vatten och lämnar inga rester på huden!

<u>Art.nr.</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Antal/Frp</u>
<b>N757</b>	<b>EZ Hold</b> , fästplatta 25mm Y.D. För fixering av slangar, katetrar, kablar, sonder, infusions slangar, CVK m.m. på både barn och vuxna.	<b>100st</b>

En produkt från NEOTECH Products Inc, USA.