


## Produktutbud & orderinformation

	ALTERNATIV 1: AUTOMATISK DOSERING	ALTERNATIV 2: MANUELL
STERILCENTRAL & ENDOSKOPIENHET	6 l dunk och Sekusept Doseringssystem <b>1+5</b>	6 l dunk och pump <b>1+3</b>
ENDOSKOPIMOTTAGNING	6 l dunk och Pulsar väggpump <b>1+6</b>	2 l flaska och pump <b>2+4</b>
KLINIKER OCH MINDRE AVDELNINGAR	6 l dunk och Pulsar väggpump <b>1+6</b>	2 l flaska och pump <b>2+4</b>

1	Sekusept MultiEnzyme	6 l	1x6	3046640
2	Sekusept MultiEnzyme	2 l	4x2	3046620
3	20 ml pumpdispenser till 6 l flaska	20ml pump	1	10018654
4	10 ml pump till 2 l flaska	10ml pump	4	10016760
	Dunkhållare till 6 l dunk	1	1	TBC

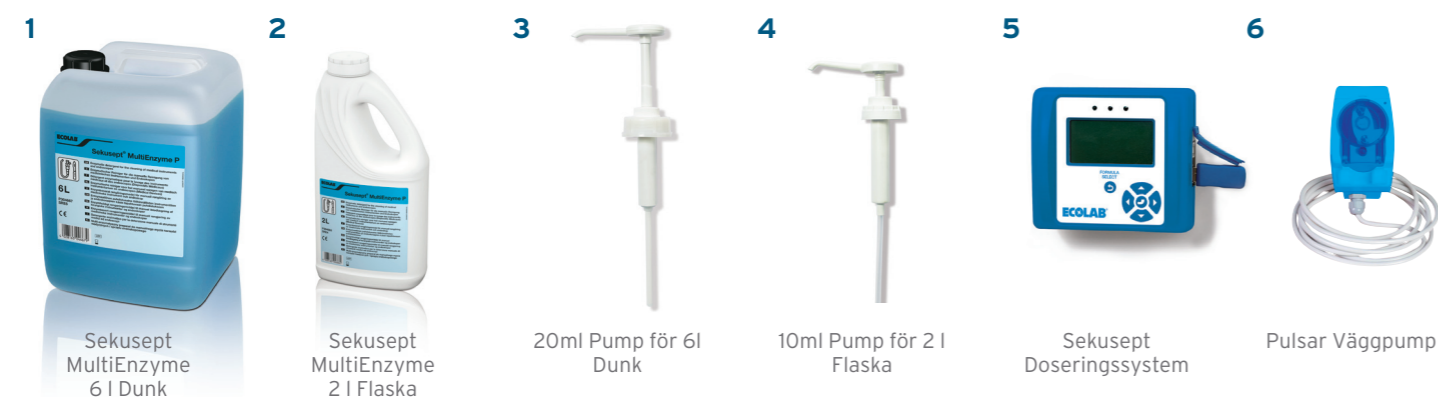

### INNEHÅLL

Proteas, Amylas, Lipas, Tensider, Korrosioninhibitor, Lösningemedel, Emulgeringsmedel

För ytterligare information: [www.se.ecolab.eu](http://www.se.ecolab.eu)

KONTAKTA ER LOKALA ECOLABREPRESENTANT FÖR MER INFORMATION

### REFERENSER

- Guidelines for Decontamination of Equipment for Gastrointestinal Endoscopy, BSG 2008
- Standards and Practice for Medical Device Decontamination, ID Sc 2007
- Decontamination Standards for Flexible Endoscopes, National Endoscopy Programme 2008

### ECOLAB AB.

BOX 164 125 24 Älvsjö.  
Armborstvägen 1 125 44 Älvsjö  
Tel : +46 8 603 22 00 Fax: +46 8 603 22 38  
Email: order.se@ecolab.com  
www.se.ecolab.eu

© Ecolab 2013 5512.1/01.13

**ECOLAB**



## Höj standarden på den manuella rengöringen

Sekusept® MultiEnzyme rengöringsmedel med Sekusept® Doseringssystem



**ECOLAB**  
Everywhere It Matters.™

# Sekusept® Multienzyme

## Enzymbaserat rengöringsmedel för medicinsk utrustning

### VARFÖR SEKUSEPT® MULTIENZYME?

Sekusept Multienzyme kombinerar en unik blandning av tensider och enzymer för utmärkt rengöringsförmåga:

- ▲ Proteas, lipas, amylas, enzymer som bryter ner protein, fett och stärkelse
- ▲ Lågskummande formula för lätt avsköljning
- ▲ CE märkt produkt och formula anpassad för medicinteknisk utrustning
- ▲ Blå färg för att indikera att produkten doserats
- ▲ Parfymfri
- ▲ pH neutral, användarvänlig och kompatibel med all medicinsk utrustning
- ▲ Val av doseringsutrustning ger korrekt dosering för alla applikationer.
- ▲ Välj mellan 6 l dunk eller 2 l flaska



Sekusept® MultiEnzyme finns i två storlekar med flera olika doseringsutrustningar för att underlätta användningen

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För manuell förrengöring av kirurgiska instrument och medicinsk utrustning inklusive flexibla endoskop även lämplig för ultraljudsbad

**“ENZYMBASERADE  
RENGÖRINGSMEDEL  
HAR FÖRMÅGAN ATT  
LÖSA UPP SLEM OCH  
ANNAT BIOLOGISKT  
MATERIAL”<sup>1</sup>**

## Korrekt dosering med ett tryck

### SEKUSEPT® DOSERINGSSYSTEM


Sekusept doseringssystem för manuell rengöring bidrar till att uppnå rätt koncentration varje gång med minimal insats

### HANTERINGSPROCEDUR

Med vårt system kan ni inhämta exakta data till hjälp vid validering av rengöringsprocessen.

- ▲ Data kan enkelt laddas ner via USB port på kontrollen
- ▲ Service- och inställningsdata är också tillgängliga

*“Rengöringslösningen skall kasseras efter varje användning.”<sup>2</sup>*

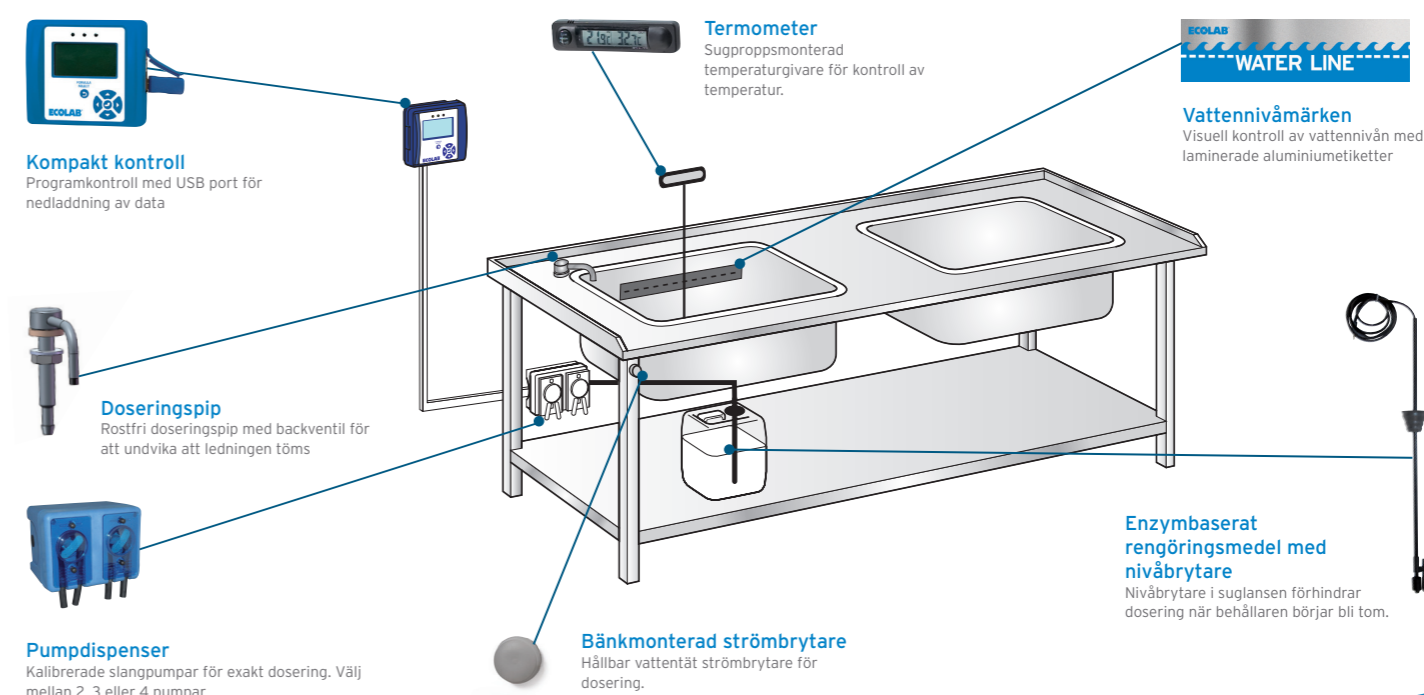

**“EN VALIDERAD  
METOD FÖR  
DOSERING AV  
RENGÖRINGSMEDEL  
ÄR ETT KRAV”<sup>2</sup>**



### INSTALLATION

Vår omfattande installationservice garanterar maximal rengöringseffektivitet med minimal störning av verksamheten.

Vi erbjuder:

- ▲ Genomgång före installation och modifiering av systemet för anpassning till era behov
- ▲ Komplet installation av lämplig utrustning med minimal störning av verksamheten
- ▲ Fortlöpande stöd, utbildning och rådgivning
- ▲ Årlig service och kalibrering ger exakt dosering och kalibrerings certifikat för full spårbarhet