

Område	Instrument skötsel
Dokumentnr	PI-0083
Författare	Arne Rende
Datum	091120

Endast för internt bruk!

<i>Titel</i>	Kranfett 27657 och sterilitet
<i>Artikelnummer</i>	27657
<i>Beskrivning</i>	<i>Ny information vad som gäller för kranfett och hopsättning av kranar.</i>
<i>Meddelande</i>	<p>Efter att jag fått frågan om det blir sterilt under kranfettet från en kund har jag frågat Tyskland vad som gäller:</p> <p>Kranfettet är inte till 100 % ånggenomträngligt och därför ska kranarna steriliseras ej monterade.</p> <p>100 % sterilitet fås inte om kranarna steriliseras hopsatta.</p> <p>Fettet kan tas bort med enzym diskmedel/ ultraljudsbad/ aceton/ rengöringsmedel i disk-decinfektorerna.</p> <p>I den nya urologimanualen som blir klar nästa vecka står det bland annat om detta på sidan 17. Sätt tillbaka kranarna och gör en funktionskontroll för att därefter ta isär kranen för att sedan sterilisera instrumentet.</p> <p>Se även sidan 13 i samma manual där det står om hur fettet ska appliceras och varför det ska användas. De flesta instrument kan steriliseras utan att tas isär. Skruvar och tillslutningar ska då inte dras åt för att ångan och värmen ska komma åt. Men för att vara 100% säker på sterilitet ska infettade kranar steriliseras isärtagna.</p>