

PRODUKTÖVERSIKT

Artikelnr	Storlek	Typ av rulle	Förband/ullar per fpk	Antal fpk/trp
Leukomed® I.V. film				
72390-00004	4,5 x 4,5 cm		50	10
72390-00000	6 x 8 cm		50	8
72390-00005	7 x 9 cm		50	6
72390-00003	8,5 x 11,5 cm		50	6
Leukomed® I.V.				
72389-00000	6 x 8 cm		50	8
Leukomed® T				
72381-00000	5 x 7,2 cm		50	10
72381-00001	8 x 10 cm		50	6
72381-00002	11 x 14 cm		50	8
72381-00008	10 x 12 cm		50	8
72381-00009	15 x 20 cm		50	8
72381-00010	15 x 25 cm		50	8
72381-00014	10 x 25 cm		50	8
72381-00003	5 x 7,2 cm		5	38
72381-00004	8 x 10 cm		5	38
72381-00005	11 x 14 cm		5	36
72381-00011	10 x 12 cm		5	36
72381-00012	15 x 20 cm		5	38
72381-00013	15 x 25 cm		5	36
72381-00015	10 x 25 cm		5	36
Leukoplast®				
01521-00000	5,0 m x 1,25 cm	Med skyddskåpa	24	240
01522-00000	5,0 m x 2,50 cm	Med skyddskåpa	12	120
01524-00000	5,0 m x 5 cm	Med skyddskåpa	6	60
01531-00000	5,0 m x 1,25 cm	Utan skyddskåpa	24	240
01532-00000	5,0 m x 2,50 cm	Utan skyddskåpa	12	120
01534-00000	5,0 m x 5 cm	Utan skyddskåpa	6	60
01536-00000	9,2 m x 1,25 cm	Utan skyddskåpa	24	240
01537-00000	9,2 m x 2,50 cm	Utan skyddskåpa	12	120
01539-00000	9,2 m x 5 cm	Utan skyddskåpa	6	60
Leukopor®				
02471-00000	5,0 m x 1,25 cm	Med skyddskåpa	24	240
02472-00000	5,0 m x 2,50 cm	Med skyddskåpa	12	120
02474-00000	5,0 m x 5 cm	Med skyddskåpa	6	60
02481-00000	5,0 m x 1,25 cm	Utan skyddskåpa	24	240
02482-00000	5,0 m x 2,50 cm	Utan skyddskåpa	12	120
02453-00000	9,2 m x 1,25 cm	På plastspole	24	240
02454-00000	9,2 m x 2,50 cm	På plastspole	12	120
02455-00000	9,2 m x 5 cm	På plastspole	6	60
Leukosilik®				
01021-00000	5,0 m x 1,25 cm	Med skyddskåpa	24	240
01022-00000	5,0 m x 2,50 cm	Med skyddskåpa	12	120
01024-00000	5,0 m x 5 cm	Med skyddskåpa	6	60
01031-00000	5,0 m x 1,25 cm	Utan skyddskåpa	24	240
01032-00000	5,0 m x 2,50 cm	Utan skyddskåpa	12	120
09566-00000	9,2 m x 1,25 cm	Utan skyddskåpa	24	240
09567-00000	9,2 m x 2,50 cm	Utan skyddskåpa	12	120
09569-00000	9,2 m x 5 cm	Utan skyddskåpa	6	60
Leukofix®				
02121-00000	5,0 m x 1,25 cm	Med skyddskåpa	24	240
02122-00000	5,0 m x 2,50 cm	Med skyddskåpa	12	120
02124-00000	5,0 m x 5 cm	Med skyddskåpa	6	60
02136-00000	9,2 m x 1,25 cm	På plastspole	24	240
02137-00000	9,2 m x 2,50 cm	På plastspole	12	120
02138-00000	9,2 m x 5 cm	På plastspole	6	60
Leukoflex®				
01121-00000	5,0 m x 1,25 cm	Med skyddskåpa	24	240
01122-00000	5,0 m x 2,50 cm	Med skyddskåpa	12	120
01124-00000	5,0 m x 5 cm	Med skyddskåpa	6	60
02131-00000	5,0 m x 1,25 cm	Utan skyddskåpa	24	240
02132-00000	5,0 m x 2,50 cm	Utan skyddskåpa	12	120
02134-00000	5,0 m x 5 cm	Utan skyddskåpa	6	6/60

Leukoplast®

Like Skin

LEUKOMED® I.V. FÖRBAND SKRÄDDARSYDD SÄKERHET

FÖR MINSKAD INFEKTIONSRIKSK GENOM SÄKER FIXERING



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15
SE-427 40 Billdal

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se
Tel 031 727 98 00
Fax 031 727 98 10

15-0511 10/2015

BSNmedical

THERAPIES. HAND IN HAND.

BSNmedical

LEUKOPLAST®

LIKE SKIN

FIXERINGS- TEJP

Säker fixering på alla hudtyper,
i alla situationer.

Fixomull® transparent
Fixomull® stretch
Leukoplast® • Leukosilk®
Leukopor® • Leukofix®
Leukoflex®

POSTOPERATIVA FÖRBAND

Skyddar postoperativa och akuta sår, minskar
risken för postoperativa infektioner.

Leukomed® Control • Leukomed® T plus
Leukomed® T • Leukomed®

KÄRLÅTKOMST

Minskar risken för infartsrelaterade
infektioner och flebiter genom säker
och skonsam vidhäftning.

Leukomed® T • Leukomed® I.V. film
Leukomed® I.V. • Leukoplast®
Leukosilk® • Leukopor®
Leukofix® • Leukoflex®

SKRÄDDARSYDD FIXERING SOM SKYDDAR KÄRLEN

MINSKAR RISKEN FÖR CVK-RELATERADE BLODBURNA INFEKTIONER

Percutan och intravenös behandling används rutin-
mässigt inom många olika medicinska områden.

Det lokala trauma som uppstår när t.ex. en CVK förs
in medför stora risker för huden och kärlsystemet. När
huden penetreras ökar risken för att bakterier följer
med katetern och tar sig vidare ut blodet.

Valet av fixeringslösning har stor betydelse när det
gäller att förebygga inflammation, flebit och CVK-
relaterade blodburna infektioner.

Fixera Infarter

Leukomed® I.V.-förbanden är utformade för
säker, tillförlitlig och hudvänlig fixering enligt
gällande rutiner. De kan användas för:

- Perifera venkatetrar (PVK)
- Centrala venkatetrar (CVK)
 - Inre halsvenen
 - Femoral
 - Subklavia
- Perifert insatta centrala katetrar (PICC-line)
- Tunnelerad CVK
- Dialyskatetrar



ETT SKYDD MOT INFEKTION

LEUKOPLAST®-serien är ett flexibelt och anpassningsbart fixeringsortiment för all behandling som kräver kärlåtkomst.

Med hjälp av IV-förband och medicinska tejper kan risken för kateterrubbningar och blodburna infektioner minskas på ett enkelt, säkert och hudvänligt sätt.

FÖRDELAR LEUKOMED®-FÖRBAND FÖR IV-FIXERING:



Tillförlitlig vidhäftning och följsamma material

- Skonsam och effektiv häfta som skyddar punktionsstället och håller utrustningen på plats
- Motverkar skjuvsador



Skräddarsytt sortiment

- Mångsidigt utbud av IV-förband och medicinska tejper i många olika storlekar



Material med mycket god andningsförmåga

- Motverkar hudmaceration
- Främjar en ostörd sårhäkning



Skyddande barriär

- Ger ett effektivt skydd mot extern kontaminering och minskar risken för CVK-relaterade blodburna infektioner



Leukomed® T – naturlig känsla

Flexibel, bakterie- och virussäker film med goda andningsegenskaper som håller katetern på plats och skyddar punktionsstället. Stabiliserar PICC-line eller CVKer och har en viktig roll när det gäller infektionshantering.



Leukomed® I.V. film – synbart bättre kontroll

För fixering av centrala och perifera venkatetrar och kanyler, med eller utan injektionsöppning. Tack vare filmens transparens kan punktionsstället kontrolleras löpande. De förstärkta vingarna ger extra säkerhet.



Leukomed® I.V. non-woven – sparar tid och är enkla att använda

Fixerar kanylen utan att fastna mot punktionsstället. Mjukt, hudvänligt material som ger god bärkomfort. Användningsklara och enkla att fästa för kortvarig fixering.



Leukoplast® medicinska tejper

Våra medicinska tejper bygger på mer än 130 års erfarenhet. De är avsedda för universalbruk på alla hudtyper samt för fixering av kanyler, katetrar, tuber och sonder. Tack vare den starka vidhäftningsförmågan och flexibiliteten kan de användas på många olika kroppsdelar.



LEUKOMED® T

Leukomed® T är ett sterilt, elastiskt förband för kateterfixering. Förbandet har en film med mycket goda andningsegenskaper som minskar risken för CVK-relaterade infektioner. Fungerar som ett effektivt skydd mot bakterier och virus. Tack vare den utmärkta vidhäftningsförmågan hindras katetrar och kanyler från röra sig eller rubbas.

TUNN, FÖLJSAM FILM – SOM EN ANDRA HUD

Utmärkt vidhäftningsförmåga och följsamhet

- Fixerar utrustningen säkert på plats
- Formar sig runt kanyler och katetrar utan att veckas
 - ▶ Skapar ett skydd över ingångshålet vilket minskar risken för kontaminering
- Följer med i hudens rörelser vilket motverkar skjuvsador
 - ▶ Mycket god användarkomfort

Transparent film med låg friktion och matt yta

- Förbandet syns eller känns knappt på huden

Rundade kanter

- Minskar risken att förbandet lossnar i förtid

Lätt att inspektera punktionsstället

- Genom tidig upptäckt kan infektioner behandlas snabbare
- Färre förbandsbyten
 - ▶ Sparar tid och minskar kostnaderna

Steril barriär

- Ger ett tillförlitligt skydd mot vatten, bakterier och virus
 - ▶ Minskar risken för flebit och CVK-relaterade blodburna infektioner

Mycket god andningsförmåga

- Minskar risken för kondens och minimerar därmed risken för mikrobiell tillväxt
 - ▶ Motverkar hudmaceration
 - ▶ Långvarig vidhäftning som stabiliserar utrustningen




Användningsområden

Leukomed® T är avsett för fixering av venkatetrar i t.ex. vena jugularis, vena subclavia, vena basilica.

TILLFÖRLITLIG VIDHÄFTNING

Resultat från en jämförande studie på hud visar att **Leukomed® T** har **bättre vidhäftningsförmåga** än andra jämförbara produkter.

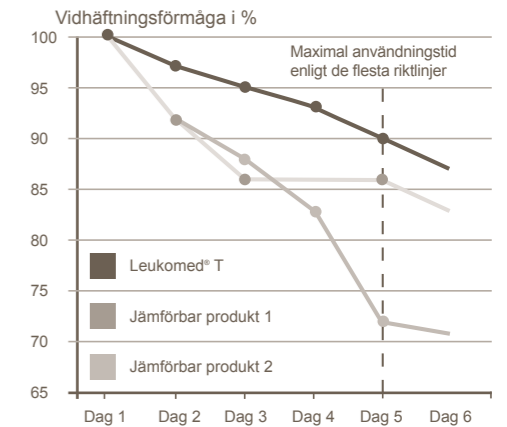

BRETT SORTIMENT

- Finns i många olika storlekar, klara att användas
 - ▶ Snabb och enkel hantering

LEUKOPLAST® Experttips

Den film som används för Leukomed® T är utvecklad för att vara extra skonsam mot huden tack vare goda andningsegenskaper och en hudvänlig häfta. På så sätt minimeras hudirritationer och utrustningen fixeras säkert.

LEUKOMED® I.V. FILM

Utformat för att säkerställa en tillförlitlig fixering av venkatetrar.

TUNN, FÖLJSAM FILM – SOM EN ANDRA HUD

Utmärkt vidhäftningsförmåga och följsamhet

- Fixerar utrustningen säkert på plats
- Följer med i hudens rörelser vilket motverkar skjuvsador
 - ▶ Mycket god användarkomfort
- Hudvänlig häfta
 - ▶ Minimerar smärtan vid borttagning

Transparent film med låg friktion och matt yta

- Förbandet syns och känns knappt på huden

Lätt att inspektera punktionsstället

- Genom tidig upptäckt kan infektioner förhindras
- Färre förbandsbyten
 - ▶ Sparar tid och minskar kostnaderna

Steril barriär

- Ger ett tillförlitligt skydd mot vatten, bakterier och yttre kontamination
 - ▶ Minskar risken för flebit och CVK-relaterade blodburna infektioner

Mycket god andningsförmåga

- Minskar risken för kondens och minimerar risken för mikrobiell tillväxt
 - ▶ Motverkar hudmaceration
 - ▶ Långvarig vidhäftning som stabiliserar utrustningen

SKRÄDDARSYTT SORTIMENT MED TRE OLIKA STORLEKAR

- Säker fixering av alla vanligt förekommande kanyler och katetrar



ANVÄNDARVÄNLIGT

- Röd greppremsa för enkel applicering
 - ▶ Säker och exakt placering av förbandet
- Medföljande remsor i non-woven ger ytterligare fixeringsmöjligheter
 - ▶ Bättre fixering, minskar risken för rubbningar
 - ▶ Utrymme för noteringar



LEUKOPLAST® Experttips

Om en kateter behöver fästas extra säkert kan en **MEDICINSK TEJP I Leukoplast®-serien** användas.

UTFORMNING SOM UNDERLÄTTAR APPLICERING


- Skräddarsydd djup slits
- Formar sig runt kanyler och katetrar utan att veckas
 - ▶ Skapar ett skydd runt ingångshålet vilket minskar risken för infektion
- Förstärkta vingar runt den djupa slitsen
- God vidhäftning under hela användningsperioden
 - ▶ Underlättar omslutning av kanyler, katetrar och slangar
- Rundade kanter
 - ▶ Minskar risken att förbandet lossnar i förtid

Användningsområden

Leukomed® I.V. film rekommenderas för säker fixering av perifera venkatetrar, centrala venkatetrar och kanyler med injektionsöppningar.




APPLICERING AV LEUKOMED® T PÅ EN CENTRAL VENKATETER

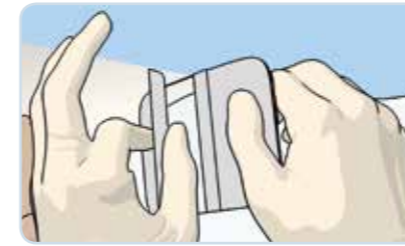

Avlägsna den första delen av det vita skyddspappret och placera förbandet över insticksstället.



Avlägsna det andra vita skyddspappret och forma filmförbandet runt katetern.

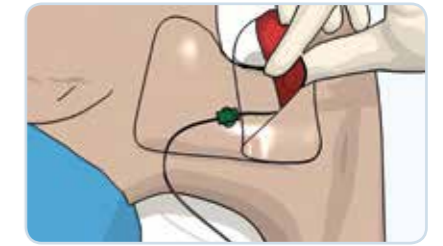


Ta tag i den röda fliken på den transparenta skyddsfilmen och dra försiktigt bort skyddsfilmen.


APPLICERING AV LEUKOMED® I.V. FILM PÅ EN PERIFER VENKATETER



Avlägsna den övre delen av det vita skyddspappret och placera förbandet över insticksstället. Vidhäfta filmen försiktigt mot huden.

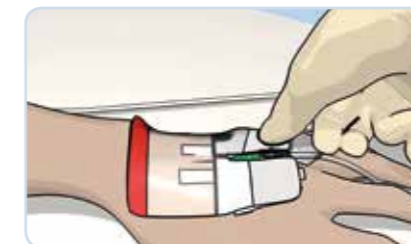

Avlägsna därefter de två återstående vita skyddspapprena och applicera fixeringstejpna över vingarna på katetern.

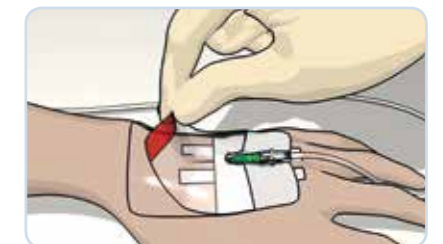

Ta tag i den röda fliken på den transparenta skyddsfilmen och dra försiktigt bort skyddsfilmen.

LEUKOPLAST® Experttips

För en så smärtfri och atraumatisk borttagning av **Leukomed® I.V. film** som möjligt, håll förbandet i hörnet och översträcker filmen genom att dra i det motsatta hörnet.



Den här filmen visar hur Leukomed® T ska användas:



Den här filmen visar hur Leukomed® I.V. film ska användas:

LEUKOMED® I.V.

Mjukt och elastiskt I.V.-förband i non-woven. Används för kortvariga och återkommande venpunktioner. Förbandet har en djup slits på ena kortsidan och kan därför omsluta kanyler och katetrar och förhindra rörelser i venen. Sårdynan fastnar inte i punktionsstället och en extra medföljande steril sårdyna kan användas som extra skydd på eventuella tryckpunkter.

STERILT FÖRBAND

- Användningsklar, steril lösning för akutvård och kortvarig användning

UTMÄRKT KOMFORT TACK VARE MJUK OCH FÖLJSAM NON-WOVEN

- God andningsförmåga
 - ▶ Släpper igenom luft och vätska vilket motverkar maceration
 - ▶ Mycket god användarkomfort

TRYCKAVLASTANDE SÅRDYNOR

- Integrerad mjuk och absorberande dyna
 - ▶ Fastnar ej i punktionsstället
 - ▶ Suger upp vätska
- Extra sårdyna i styckförpackningen
 - ▶ Kan användas som extra tryckavlastning
 - ▶ Kan användas som tork

TILLFÖRLITLIG VIDHÄFTNING

- Effektiv häfta som är skonsam mot huden
 - ▶ Fixerar utrustning säkert på plats och minskar risken för rörelse, förhindrar rubbning
 - ▶ Skyddar huden

LEUKOPLAST® Experttips

Välj Leukomed® I.V. film eller Leukomed® T när du behöver en steril, virusbarriär för katetrar som sitter i under längre tid.

Användningsområden

Leukomed® I.V. kan användas för fixering av venkatetrar samt för att täcka över och skydda punktionsställen.

LEUKOPLAST® MEDICINSKA TEJPER FÖR OLIKA HUDTYPER

Ett heltäckande sortiment av högeffektiva fixeringstejper som kan användas som komplement till **Leukomed® I.V.-förband** för att fästa katetrar och slangar på ett säkert sätt. Se till att du alltid har rätt tejp till hands – för alla hudtyper, situationer och förhållanden.

LEUKOPLAST® – KLASSIKERN

Det var så här det började för mer än 130 år sedan. **Leukoplast®** är vår mycket uppskattade, klassiska och mångsidiga tejp som kan användas för fixering av förband, tuber, katetrar, sonder och kanyler. Mycket stark vidhäftning vid akutvård och i många andra situationer som kräver fixering. **Leukoplast®** rekommenderas för normal hud.

- Väv med mycket hög hållfasthet
 - ▶ Stark, tillförlitlig vidhäftning och fixering vilket är särskilt praktiskt på rörliga eller motoriskt oroliga patienter
 - ▶ Kan bäras under längre tid
- Mycket god andningsförmåga
 - ▶ Låg risk för maceration
 - ▶ Tolereras mycket bra av normal hud



LEUKOPOR® – DEN SKONSAMMA

Tack vare kombinationen av en extra hudvänlig häfta och ett mikroporöst material i non-woven är det här det perfekta valet för mycket känslig hud. På den typen av hud lämpar sig denna tejp mycket väl för att fästa katetrar, elektroder och andra mätinstrument.

- God initial och permanent vidhäftning
- Skonsam borttagning utan att lämna rester på huden
- Mycket formbar, släpper igenom luft och vattenånga, samtidigt som den är vattenavvisande



LEUKOSILK® – DEN MJUKA

Mångsidig och hudvänlig medicinsk tejp som lämpar sig särskilt väl för känslig hud. Perfekt när en snabb och tillförlitlig fixering krävs som en del av den dagliga rutinen.

- Hudvänlig häfta som tolereras mycket väl av huden
- Väv av hög kvalitet som formar sig efter kroppen
- Kan enkelt rivas av utan att fransa sig
- Kan användas för märkning

LEUKOFLEX® – IMPERMEABEL

- Impermeabel filmtejp som bibehåller fästförmågan även under vatten tack vare god initial och permanent vidhäftning
- Tunn och elastisk tejp som enkelt formar sig efter kroppen, instrument och slangar
- Hudvänlig och tillförlitlig häfta som ger en bekväm och säker fixering



LEUKOFIX® – DEN TRANSPARENTA

Transparent film som gör det möjligt att observera och övervaka t.ex. kanyler och slangar utan att förbandet behöver bytas.

- Kan rivas av på tvären, på längden eller i mitten vilket möjliggör en mycket snabb fixering av t.ex. CVK:er, sonder, tuber och andra instrument vid akut- eller intensivvård
- Hudvänlig häfta som fäster omedelbart

