

Product Data Sheet

Termometer digital Terumo
oral/rektal
REF ET*C405S



Tryckt: 15.4.2015

REF	
ET*C405S	Oral/rektal
CE 0197	
Material:	Innehåller ej PVC/latex
Egenskaper:	<p>Digital termometer för kliniskt bruk. Termometern har två mätmetoder; beräknad mätning och direkt mätning (den faktiska temperaturen). Termometern slås automatiskt av eller på när den tas ur eller sätts i sitt fodral. Termometern är vattenresistent och kan desinficeras. Batteriet klara minst 10 000 mätningar.</p> <p>Oral mätning: Placera termometern så långt som möjligt under tungan. Stäng munnen och undvik att tala eller andas genom munnen under mätningen.</p> <p>Rektal mätning: För in termometerspetsen i ändtarmen och se till att den hålls på plats under mätningen.</p> <p>Avläsning beräknad mätning: En ljudsignal hörs efter ca 30 sekunder. Avlägsna termometern och läs av den beräknade temperaturen.</p> <p>Avläsning direkt mätning: Låt termometern sitta kvar efter ljudsignalen och den ändrar till att mäta den faktiska temperaturen. En ny ljudsignal hörs efter ca 5 minuter</p> <p>Vidare instruktioner se bipacksedel.</p>
Steril produkt:	Nej
Hållbarhetstid:	
MBA/st:	1
Avdelningsförpackning/st:	1
Transportlåda/st:	