



Salivette®

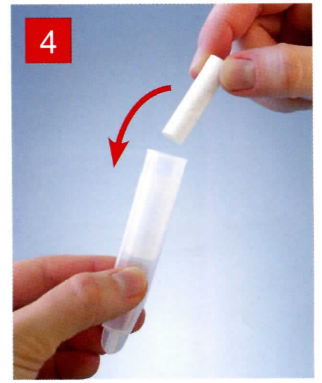

- Komplet system för uppsamling av saliv – provtagning & transport
- Enkel hantering som ger patienten möjlighet att samla saliv hemma

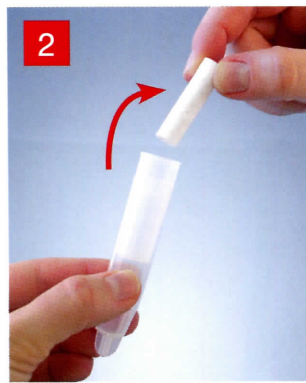

1. Ta av proppen.
2. Ta ut tamponaden från innerröret.
3. Samla saliv enligt instruktion.
4. Lägg tillbaka tamponaden i innerröret.
5. Sätt på proppen.

6. För att utvinna saliven ur tamponaden centrifugeras Salivette® i 1000xg i två minuter. Högre g-tal resulterar bara i en marginellt större mängd saliv. Centrifugeringen samlar eventuellt slem och fast material i botten på röret.
7. Den klara salivsupernatanten är nu färdig att analyseras.
8. Rulle och innerrör kan slängas. Proppen kan användas för återförslutning om så behövs.

Viktig information:

- Använd inte denna produkt för barn under 3 år eller patienter med ökad risk för att svälja den.
- Minimivolymer av utvunnen saliv bör vara 1 mL
- Validera salivens individuella parametrar före användning i rutinanalyser.

Artikelnr:	Benämning:	Inner/ytterfp:
51.1534	Salivette, bomull	100/500
51.1534.001	Salivette, citronsyrabehandlad bomull	100/500
51.1534.500	Salivette, syntet, för kortisolbestämning	100/500