



#### Produktbeskrivning:

ViTri:Xerisof är en superabsorberande dyna som utgörs av ett flerskiktssystem av superabsorbenter med en vätskeavvisande barriär på baksidan för att förhindra att vätska läcker samt att det utgör en barriär för sårområdet mot bakterier och virus. Tack vare förmågan att hantera stora mängder sårsekret utan att det sprids på omgivande hudområde medverkar Xerisof till en god sårålmkningsmiljö. Risken för maceration minskar samtidigt som förbandet är bekvämt för patienten då risken för läckage minimeras. Kan även användas under kompression eller i kombination med ett förband som utgör sårålmkningskydd.

#### Indikationer:

För måttligt till rikligt vätskande sår.

#### Applikation:

Efter rengöring och avtorkning av sårområdet väljs en lämplig storlek av förbandet, välj storlek så att förbandet överlappar omkringliggande frisk hud med 2-3cm. Den vita sidan av förbandet appliceras på sårområdet och fixeras med hjälp av lämplig fixeringsprodukt t ex en kohesiv binda eller ett tubförband om huden är skör. Även kompressionsbindning kan utgöra fixering vid behov.

#### Bytesfrekvens:

Xerisof byts enligt gällande kliniks praxis beroende på mängden vätska och förbandets mättnad.

Artnr	Beskrivning	Förpackning
803030	10 x 10cm, H	10st/avd fp, 200st/trp fp
803031	10 x 20cm, H	10st/avd fp, 200st/trp fp
803032	20 x 30cm, H	10st/avd fp, 200st/trp fp
803033	10 x 10cm, S	10st/avd fp, 200st/trp fp
803034	10 x 20cm, S	10st/avd fp, 200st/trp fp
803035	20 x 30cm, S	10st/avd fp, 200st/trp fp