

NYHET  
NU MED  
FICKA



- Debrisoft Branding på pad
- Ny förpackning
- **Nya indikationer**
- Ny ficka
- Ny storlek
- Nya artikelnummer

Debrisoft® Pad XL har  
2,5 ggr större yta än  
den lilla paden



## Debrisoft® – sårbehandlingsbehandling

Debrisoft® är ett nytt, modernt och revolutionerande sätt att rengöra sår. Den är enkel och säker att använda och kräver ingen specialistutbildning. För patienten är behandlingen snabb, smärtfri och utan några bieffekter.

Debrisoft® är avsett att användas för rengöring av sårbehandlingsprodukter. Det är en snabb, mycket effektiv och säker debrideringsmetod för behandling av ytliga sår och omgivande hud, t.ex. vid diabetiska fotsår, venösa bensår och trycksår. Vidare är den mild mot oskadad vävnad och särskilt skonsam mot ny granulationsvävnad och epitelceller.

En ren sårbedd är en nödvändig förutsättning, inte bara för att sår ska läka, utan också för att många moderna sårbehandlingsprodukter ska fungera så effektivt som möjligt. I ett kroniskt sår som inte är rent kan endast en begränsad nybildning av celler ske. En effektiv debridering är därför ett ofrånkomligt första steg vid sårbehandling.

### Indikationer:

- diabetiska fotsår
- arteriella och venösa bensår
- trycksår
- **Psoriasis**
- **Acne**
- postoperativa sår som läker genom sekundär intention
- hyperkeratos
- sår med skorpa och sår som innehåller mjuk, död vävnad
- borttagning av cellrester och förbands- eller produktrester.

Debrisoft® är inte alltid lika effektiv på tjock, hård sårskorpa eller tjock, elastisk och fast sårskorpa. Sådana sår kan behöva mjukas upp först genom autolytisk debridering innan Debrisoft® används.

Mycket goda resultat kan uppnås med Debrisoft®, även vid mycket hård/svår keratos eller nekros där såret tidigare har behandlats med autolytisk debridering, t.ex. mjukats upp med hjälp av Suprasorb X/X+PHMB.

| Storlek    | Lev art nr | Avd fp | Trp fp |
|------------|------------|--------|--------|
| 10 x10 cm  | 34 321     | 5      | 50     |
| 13 x 20 cm | 34 323     | 5      | 50     |

De flexibla fibrerna når ända in i sårbedden, till och med i djupare områden.

Cellavlagringar och -rester lossas effektivt från såret tack vare fibrernas vinklade kanter. Hudflagor och keratos avlägsnas också effektivt från den omgivande huden. De uppmjukade skorpena och keratoserna avlägsnas och inkapslas i Debrisoft®-dynans fiberkompositmaterial.

### Bruksanvisning

- Ta bort det gamla sårförbandet
- Öppna den sterila förpackningen.
- Fukta Debrisoft® med en sårtvättlösning av standardtyp i enlighet med tillämpliga lokala riktlinjer, ca. 20-40 ml.
- Använd den mjuka fibersidan på den fuktade produkten för att torka av sårytan med ett lätt tryck.
- Rengör om nödvändigt huden runt såret med en annan fuktad Debrisoft®-duk.
- Efter användning kasseras Debrisoft® som normalt kliniskt avfall i enlighet med lokala riktlinjer.

Debrisoft® är endast avsett för engångsbruk. Den får inte omsteriliseras. Det går inte att skölja bort sårrester och använda den på andra område.

Normalt ska såret debrideras först. Därefter debrideras den omgivande vävnaden med en ny Debrisoft®.

Om det behövs kan Debrisoft® användas varje gång sårförbandet byts.

### Försiktighetsåtgärder:

- Produkten ska inte användas som ett sårförband.
- Produkten ska inte användas efter det att såret har blivit rött eller vaskulariserats.
- Debrisoft® ska inte klippas eller jämnas till.
- Debrisoft® ska inte användas på patienter med känd allergi mot produktens beståndsdelar.
- Debrisoft® ska inte användas på patienter med svår upplevd smärta eller hyperestesi i sårområdet.

Debrisoft® är endast avsett för debridering och är **inte** ett sårförband.



*"Sårskorpor lossas aktivt av fibrernas kanter varefter de avlägsnas och tas upp av fiberkompositen."*