

**Produktnamn:****CPR Boussignac®****Beskrivning:**

Endotrakeal tub som används vid HLR.  
Tubens konstruktion möjliggör så kallad  
passiv oxygenering

Art.nr	Int. Ø – Ext. Ø (mm)	Längd mm	Avd.Fp st	Trp.Fp st
6508.70	7,0 – 10,0	325	1	20
6508.75	7,5 – 10,5	325	1	20
6508.80	8,0 – 11,0	325	1	20

**Material:**

PVC (DEHP-fri), PE, ABS

**Produkten är CE-märkt:**

Ja

## **Bruksanvisning**

- Koppla den gröna slangen till syrgaskällan.
- Öppna flödet till 15l/min.
- Intubera patienten med syrgasflödet på.
- Försök inte att koppla en rubens blåsa eller ventilator till Boussignac HLR-tub. Det sitter en plasthylsa vid syrgasslangens infästning som omöjliggör en sådan felkoppling.
- Blås upp kuffen
- Starta med hjärtkompressioner (100/min).

### **Vid ROSC**

- Koppla bort den gröna syrgasslangen och sätt sedan på den gröna korken på tubens laterala öppning.
- Koppla Boussignac HLR-tub till en mekanisk ventilator

### **Vid upprepat hjärtstopp**

- Koppla bort Boussignac HLR-tuben från ventilatorn.
- Ta bort den gröna korken och koppla åter på den gröna syrgasslangen och återanslut den till en syrgaskälla med ett flöde på 15l/min.
- Återuppta hjärtkompressioner (100/min).