

Produktfaktablad TENA Lady Mini och Mini Plus

Användningsområde

TENA Lady Mini och Mini Plus är läckagesäkra, bekväma och diskreta bindor för mindre till måttliga urinläckage.



Produktegenskaper

TENA Lady Mini och Mini Plus har en absorberande kärna med superabsorbenter och ett silkeslent ytskikt, Silky Softness, som ger mycket hög absorptionshastighet och bra återvätningsegenskaper. Det mjuka ytskiktet gör även produkterna mjuka och bekväma att bära.

Andningsbart spärrskikt som är klätt med textilliknande nonwoven ger ökad komfort och god hudmiljö*. TENA Lady har Fresh Odour Control. Unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred längsgående tejprens på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produktnamn/storlek. Produkterna är diskret enstycksförpackade.

I serien ingår även TENA Lady Discreet Mini Plus Wing som har vingar som viks runt trosans kant. Det gör att skyddet sitter extra säkert på plats och ger en god passform, även under fysisk aktivitet. Vingarna ger också extra skydd till trosans kanter.

*gäller ej Discreet Mini Plus Wing som har PE baksida.



Produktfaktablad TENA Lady Mini och Mini Plus

TENA Lady	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Mini	22	9.6	8	30	180	183	76 02 99
Mini Plus	25.5	9.8	12	16	160	231	76 03 51
Discreet Mini Plus Wing	25.5	9.8	12	16	128	258	76 23 09



TENA Lady ger trippelt skydd från läckage, lukt och fukt.



Fresh Odour Control
- unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Användarinstruktion

Ta skyddet ur enstycksförpackningen och vik upp det. Dra bort skyddspappret på baksidan. Fäst skyddet, med den bredare delen bak, i åtsittande trosa eller fixeringsbyxa. Se till att skyddet behåller sin skålform. Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshantering.



TENA Lady

Tillsammans gör vi skillnad

Produktfaktablad TENA Lady Mini och Mini Plus

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE). Wing-produkten polyetenfilm (PE).

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Lady skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

