




Styrka där det
behövs

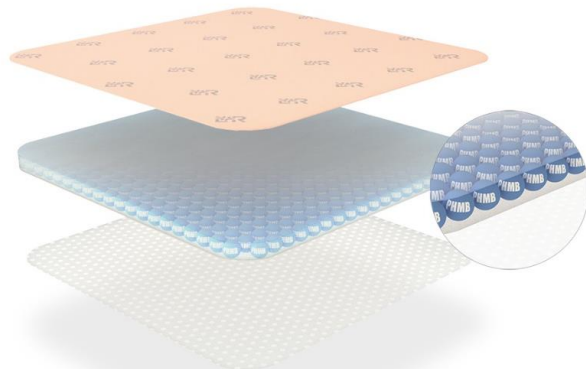

Suprasorb® P+PHMB

Egenskaper:

Suprasorb® P+PHMB imponerar med sin mycket breda antimikrobiella effekt. Kompressen innehåller PHMB 1 % vilket leder till en 99,9 % reduktion av patogener inom 6 timmar.

- Mycket god antimikrobiell effekt även mot multiresistenta patogener
- Mycket effektiv mot grampositiva och gramnegativa bakterier
- Minskar risken för re-kolonisering
- Kontinuerlig frisättning av PHMB upp till 7 dagar
- Snabb och långvarig effekt
- Tillförlitlig exsudat hantering som befrämjar naturlig sår-läkning
- Suprasorb® P+PHMB erbjuder pålitlig sårvårshandling
- Förbandet är lätt att forma, speciellt på ställen där det kan vara svårt att applicera ett förband
- Såret får en lång viloperiod med ostörd sårhäkning på grund av färre förbandsbyten, vilket också är hälsoekonomiskt fördelaktigt

Indikationer:

Akuta eller kroniska sår som är kritiskt koloniserade eller infekterade och som är:

- måttligt till kraftigt vätskande
t.ex.
- trycksår,
- ben- och fotsår,
- diabetessår
- kirurgiska sår.

Kompressen går utmärkt att använda under kompressionsbandage.

Kontraindikationer:

- Torra eller lätt vätskande sår
- Ska inte användas på patienter med känd allergi mot produktens beståndsdelar
- Kirurgisk implantation.

Omlägningsfrekvens:

Enligt behandlande läkares rekommendationer. Initialt vanligtvis en gång per dygn, beroende på sårets beskaffenhet och patientens kondition men förbandet kan sitta på i 7 dagar.

Material:

- Polyuretanfilm (toppskikt)
- Polyuretanskum, hydrofil
- Perforerad polyuretanfilm (sårkontaktlager)
- PHMB 1 %

Produktklassificering:

Medical device klass 3

Avfallshantering:

Användaren uppmanas att följa gällande lagstiftning, normer och riktlinjer för deponering av medicinskt avfall. Förpackningsmaterial måste också tas om hand i enlighet med gällande nationella krav.

Bruksanvisning

1. Välj en storlek som överlappar såret. Om så önskas, så kan kompressen klippas till för att passa såret.
2. Centrera kompressen över såret. Texten på kompressen (LR) skall vara på ovansidan.
3. Fixera kompressen på lämpligt vis, t.ex. med tejp. Var noga med att tejpens ej täcker hela kompressen utan endast fixerar kanterna på kompressen. I annat fall påverkas de semipermeabla egenskaperna hos kompressen. Förbandet kan användas under kompressionsbandage.
4. Kassera överblivet material från kompressen, då denna är för engångsbruk samt för att undvika kontamineringsrisk.



Måttligt till kraftigt exsuderande sår

Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
5x5cm	34 540	10	100
7,5x7,5cm	34 541	10	100
10x10cm	34 542	10	100
10x20cm	34 543	5	50
15x15cm	34 544	5	50
20x20cm	34 545	5	50

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.