

Intubation > Airtraq SP (engångs)



Airtraq SP (engångsmodell)

Svårbemästrade intubationer är en omständighet som läkare och sjuksköterskor ofta ställs inför både vid planerade intubationer av patienter vid narkos såväl som vid akuta livsräddande insatser. Generellt brukar man räkna med att ca 10% av alla intubationer kräver någon form av extraordinära åtgärder. Airtraq® från Prodol Meditec är för dessa situationer en innovativ lösning.

På så sätt uppnår användaren visuellt och direkt en tydlig överblick över luftvägsanatomien och kan med ett enkelt handgrepp säkert placera trakealtuben i rätt läge. 100% kontroll över trakealtubens läge under hela intubationen. Kräver inga onormala böjningar av patientens nacke eller läge, kan till och med utföras med patient i sittande läge - en stor fördel vid många olycksfall eller där rörelsebegränsningar kan förhindra lämplig arbetsmetod.



Airtraq® SP finns i ett antal färgmarkerade storlekar och passar alla standard trakealtuber oavsett fabrikat från Stl 6,0 tom 8,5mm id, samt en modell för användning vid nasal intubation och en avsedd för dubbellumentub. Airtraq® finns naturligtvis även för neonatalt och paediatriskt bruk - detta gör att sortimentet består idag av totalt 6 olika storlekar/modeller.

Den optiska kanalen är försedd med en ljuskälla med låg temperatur som dessutom har antikondensegenskaper för optimal visuell kontroll och hela 45 graders synvinkel. Eftersom Airtraq® är en engångsprodukt krävs inga omständiga rengöringsmetoder eller hopsättning, klar för användning inom maximalt 30-40 sek beroende på omgivande temperatur men vanligtvis tar det ca. 10 sek. innan produkten är klar för användande.

Airtraq® SP är klar att använda efter att produktförpackning öppnats och antikondenslampan slutat att blinka och detta tar vanligtvis ca. 15- 20 sek att utföra! Den guideade tubkanalen ger en enkel och säker införel av ETT tuben och med senaste versionen kan även tubspetsen manipuleras i sidled för att klara även mycket "svårtillgängliga" luftvägar.

Ingen investeringskostnad krävs med denna produkt heller, likt Avant modellerna så per intubation är detta en mycket kostnadseffektivt samt patientsäkerhetsfrämjande intuberingsprodukt!

Material

ABS-plast (Akrylnitril-Butadien-Styren) av medicinsk kvalitet

Standards

MDD 93/42 CEE Annex IX
EN ISO 13485:2012
FDA godkänd

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
A-071	Airtraq® för dubbellumentub, gul	6	30	N	N	OS	NEJ
A-061	Airtraq® Nasal vuxen för nasal intubation, orange	6	30	N	N	OS	NEJ
A-041	Airtraq® nr0 neonatal för tub id 2,5-3,5mm, grå	6	30	N	N	OS	NEJ
A-031	Airtraq® nr1 pediatrik för tub id 4,0-5,5mm, rosa	6	30	N	N	OS	NEJ
A-021	Airtraq® nr2 för tub id 6,0-7,5mm, grön	6	60	N	N	OS	NEJ
A-011	Airtraq® nr3 för tub id 7,0-8,5mm, blå	6	60	N	N	OS	NEJ

Produktbladsnr 1301

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2019-02-26 15:41