

EasyRoll Glidlakan SingleSheet







EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen



Alla våra standard glidlakan är märkta med glidriktningspilar för lättare användning.

Röda markeringsränder gör det lättare att kontrollera att glidlakanet ligger rätt placerat.

Art.nr	Produkt	Säng- bredd	Glid- bredd	Längd	Total Storlek	EAN
<input type="checkbox"/> 41901PS	Glidlakan SingleSheet	90 cm	60 cm	100 cm	100 x 200 cm	 7 350042 260805
<input type="checkbox"/> 41902PS	Glidlakan SingleSheet	90 cm	60 cm	140 cm	140 x 200 cm	 7 350042 260812
<input type="checkbox"/> 41903PS	Glidlakan SingleSheet	90 cm	60 cm	200 cm	200 x 200 cm	 7 350042 260829
<input type="checkbox"/> 411051PS	Glidlakan SingleSheet	105 cm	75 cm	100 cm	100 x 215 cm	 7 350042 262045
<input type="checkbox"/> 411052PS	Glidlakan SingleSheet	105 cm	75 cm	140 cm	140 x 215 cm	 7 350042 262052
<input type="checkbox"/> 411053PS	Glidlakan SingleSheet	105 cm	75 cm	200 cm	200 x 215 cm	 7 350042 262069
<input type="checkbox"/> 411201PS	Glidlakan SingleSheet	120 cm	90 cm	100 cm	100 x 230 cm	 7 350042 262076
<input type="checkbox"/> 411202PS	Glidlakan SingleSheet	120 cm	90 cm	140 cm	140 x 230 cm	 7 350042 262083
<input type="checkbox"/> 411203PS	Glidlakan SingleSheet	120 cm	90 cm	200 cm	200 x 230 cm	 7 350042 262090

Material:

Glidyta: Duchesse (Polyester)
Bäddflikar: Bomull/Polyester



Parkvägen 5
913 34 Holmsund

Tel. 090-14 26 25
Fax.090-13 64 52

E-post: info@protecta.nu

Protecta Medical AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

PROTECTA[®]
Medical AB

www.protecta.nu

EasyRoll Glidlakan SingleSheet

EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen

Brukarinformation

Brukarinformation ver. 2 050216



Alla våra standard glidlakan är märkta med glidriktningspilar för lättare användning.


Röda markeringsränder gör det lättare att kontrollera att glidlakanet ligger rätt placerat

EasyRoll Glidlakan SingleSheet


EasyRoll Glidlakan underlättar vändning i säng. Det bäddas som ett vanligt lakan direkt på sängen, dess bäddflikar bäddas in under madrassen för fixering. Lämplig för personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller svår värk då det är ett stort stöd vid självvändning om man ligger direkt på lakanet. Alternativt används EasyRoll i kombination med ett draglakan eller ett dragglidlakan som ett arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal vid vändning/förflyttning av liggande vårdtagare.

Placering


EasyRoll Glidlakan placeras med glidytan uppåt och centreras mitt i sängen. De röda markeringsränderna underlättar centreringen då de indikerar var glidlakanet ska vara placerat vid madrasskanterna. Vid sidorna av glidet finns textila sidopartier, bäddflikar, med högre friktion som bromsar upp vid vändning eller uppsittande vid sängkanten. Bilderna nedan visar de olika storlekarnas placering på sängen.

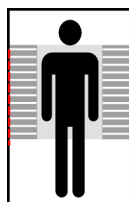

100x200
100x215
100x230

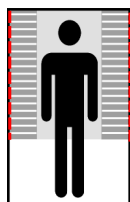

140x200
140x215
140x230

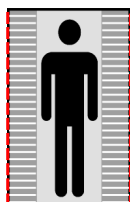

200x200
200x215
200x230

Säkerhet

Kontrollera alltid att glidlakanet ligger centrerat i sängen vid bäddning för att motverka risker för fall ur säng. När de röda markeringsränderna följer madrasskanterna ligger lakanet centrerat. Vid uppresning kontrolleras glidlakanets position innan brukaren sätter sig på sängkanten för att motverka urglidning ur sängen. Vid behov justeras lakanets position med hjälp av bäddflikarna som sedan bäddas fast igen innan uppresning påbörjas.

Kontrollera regelbundet material och sömmar så att de är hela och fria från skador. Gör även regelbundna funktionstester genom att kontrollera friktionen på glidytan (låg) och bromszonerna (hög). Jämför med ny produkt. Ett glidlakan som inte uppfyller ställda krav ska bytas ut.

Material:

Glidyta: Duchesse (Polyester)

Bäddflikar: Bomull/Polyester

Maxvikt: 200 kg



Skötselråd:

Tvättas före första användning.

Tvättas i max 90°C.

Ej Sköljmedel.

Torkning / tumling i max 70°C.

Hängtorkning rekommenderas för längre livslängd.

Strykning förbättrar glidförmågan ytterligare.



Vid frågor om produkten och dess användning

Kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Se även www.protecta.nu för instruktionsfilmer.

Parkvägen 5
913 34 Holmsund

Tel. 090-14 26 25
Fax.090-13 64 52

E-post: info@protecta.nu

Protecta Medical AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

PROTECTA[®]
Medical AB

www.protecta.nu