

Produktfaktablad TENA ProSkin Slip Active Fit

Användningsområde

TENA Slip Active Fit är ett mycket läckagesäkert och komfortabelt allt-i-ett skydd för medelstora till mycket stora urinläckage. Skyddet finns i tre absorptionsnivåer (Plus, Maxi och Ultima) och tillåter individanpassning tack vare ett stort antal storlekar.

Fixering med tejp för enkel hantering

Midjeelastik för en säker passform

Spridningsskiktet FeelDry™ kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Stabil och mjuk benelastik för god och säker passform

Läckagebarriär för hög säkerhet

Diskret våtindikator

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt



Produktfaktablad TENA ProSkin Slip Active Fit

Produktegenskaper

TENA ProSkin Slip Active Fit är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Vätskeavvisande läckagebarriärer och midjeelastik bak hjälper till att förhindra läckage.


Skyddet har Odour Neutralizer, d v s är försett med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt.

Enkel hantering med tejp underlättar fixering. Våtindikator och tydlig färgmarkering (visar absorptionsnivå) finns för hjälp vid val av rätt produkt.

TENA ProSkin Slip Active Fit

Uppsugningsnivå/ storlek	Midja/höft cm	Längd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart pall	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Essity Art.nr
Plus									
X-small	50-75	62	66	30	90	20	476	1427	71 04 49
Small	55-85	71	71	30	90	16	513	1538	71 05 49
Medium	70-120	82	93	30	90	16	734	2201	71 06 49
Large	90-145	100	110	30	90	12	793	2378	71 07 49
Maxi									
Small	55-85	71	90	24	72	16	670	2010	71 08 49
Medium	70-120	82	133	24	72	16	1051	3152	71 09 49
Large	90-145	100	164	22	66	12	1259	3776	71 10 49
Ultima									
Medium	70-120	82	155	21	63	16	1246	3739	71 07 21
Large	90-145	100	186	21	63	12	1448	4345	71 08 21

Användarinstruktion

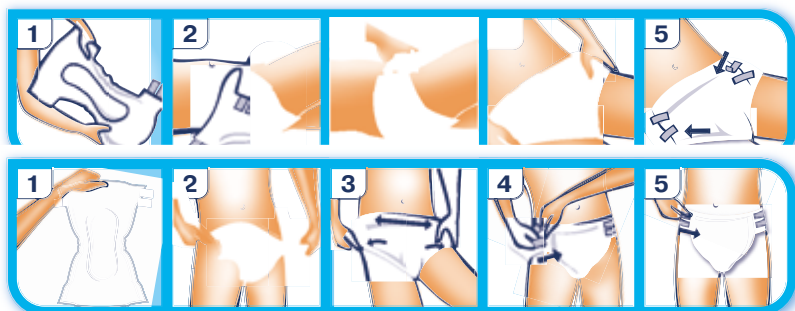

Produktfaktablad TENA ProSkin Slip Active Fit

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Polyethylene

Funktion: Ökad bekvämlighet

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORPTIONSKÄRNA, övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORPTIONSKÄRNA, undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

MIDJEELASTIK

Material: Polyuretan

Funktion: Passform, komfort, läckagesäkerhet

BENELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Passform och läckagesäkerhet

BARRIÄRELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Bidra till läckagesäkerhet

FASTSÄTTNING:

Material: Polypropylene adhesive

Funktion: Förslutning av produkt och passform

För samtliga TENA ProSkin Slip Active Fit skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsatts i produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige

