

Plåster
transparent



Ingående delar/material

Non-woven:

Viskos/PE-film

Färg

Transparent

Absorberande yta:

Viskos/polyester täckt med tunn polyuretanfilm

Beige

Häftämne:

Akrylatbaserad häftmassa

Skyddspapper:

Medicinsk papper av cellulosa

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

kartong
kartong

Avfallhantering*

kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl mm	Stl abs-dyna mm	St/AFP	St/TFP	MBA
6018114	38 x 38	20 x 20	250	40 x 250 = 10000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Skydda skadad hud. Absorbera blod och sårexsudat. Förband för småsår, skrubbsår eller som skydd efter injektion.

Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta på lådans lock.
2. Ta ett plåster ur asken. (250st ligger lösa i ask)
3. Stäng asken när de plåster som behövs tagits ut.
4. Lossa skyddspapperet och placera plåstret över såret.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium