

# Produktfakta TENA Proskin Flex

## Användningsområde

TENA Flex är ett mycket läckagesäkert och bekvämt bälteskydd framförallt för vårdtagare som behöver hjälp vid byte. Finns i fem och i fyra storlekar: Small, Medium, Large och Extra Large, vilket möjliggör individuell utprovning.



Unikt elastiskt bälte ComfiStretch som expanderar och går tillbaka i harmoni med kroppens form vid stående, sittande och liggande position

Midjeelastik fram för hög elasticitet och en säker passform<sup>1</sup>

Läckagebarriär för hög säkerhet

Diskret våtindikator

Hög elasticitet i ryggen för bästa passform i rygglutet

Höftbältet är stabilt och mjukt det rullar inte ihop sig utan sitter bekvämt under användning


Spridningsskiktet FeelDry™ kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Enkel att hantera  
Fixeras med kardborre direkt på bältet.  
Kan justeras och återförslutas flera gånger

Kan fixeras både bak och fram ger en ergonomisk arbetsställning för vårdpersonal och ökad värdighet för den enskilde

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt

Användarinstruktion på skydd och förpackning  
Underlättar fixering för vårdpersonal

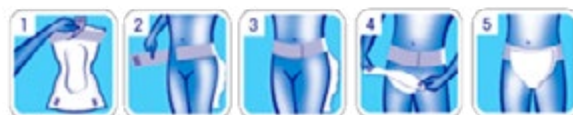

<sup>1</sup> TENA Flex i storlek XL har en extra kardborre istället för midjeelastik framtill, för extra säker passform

# Produktfaktablad TENA Proskin Flex

## Produktegenskaper

TENA Flex har ett unikt elastiskt höftbälte (ComfiStretch™) som tillsammans med midjeelastik både fram<sup>1</sup> och bak gör att produkten har hög elasticitet och bibehåller sin säkra passform under hela användningstiden, även vid lägesförändring. Höftbältet är stabilt, komfortabelt och mjukt, vilket gör att det bibehåller sin form under användning och rullar inte ihop sig utan sitter bekvämt för att undvika hudirritation. Bältet går att förlängas med TENA Flex förlängningsbälte om längden behöver justeras.






TENA Flex är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Produktens kroppsnära passform, benelastik och mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer med dubbla elastiktrådar hjälper till att förhindra läckage.

TENA Flex är ett mycket komfortabelt och hudvänligt skydd. Skyddet har en luftig anatomisk design och textilliknande andningsbara material för hög komfort och god hudhälsa. Fixeras med kardborre direkt på bältet. Skyddet kan enkelt justeras och återförslutas flera gånger.



TENA Flex är ett mycket diskret skydd. Den mycket goda passformen minskar risken för att skyddet är synligt utanpå kläderna. Samtliga TENA Flex har Odour Neutralizer, d v s är försedda med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt.

## Användarinstruktion

### Stående

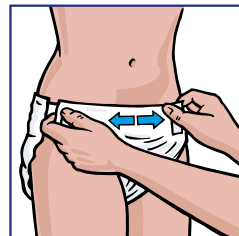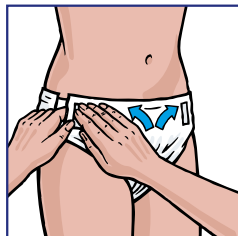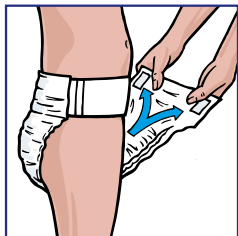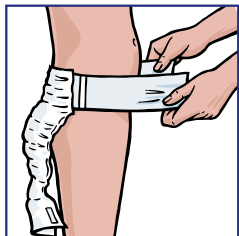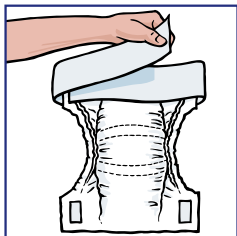


### Liggande

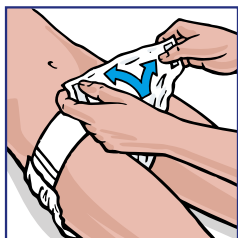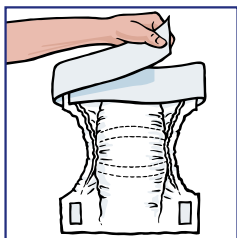

# Produktfaktablad TENA Proskin Flex

TENA Flex										
Uppsugningsnivå/ storlek	Midja/höft cm	Längd cm	Vikt g	Lår cm	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart halvpall	Latex fri	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Essity Art.nr
Normal										
Medium	75-105	80	65	< 84	34	102	16	Ja	1335	72 23 60
Large	85-120	86	73	< 99	34	102	16	Ja	1474	72 23 93
Plus										
Small	60-90	71	70	< 72	30	90	16	Ja	1542	72 05 14
Medium	70-105	80	81	< 84	30	90	16	Ja	1811	72 05 16
Large	85-120	86	95	< 99	30	90	16	Ja	2044	72 05 18
X-large	105-155	103	120	< 116	30	90	12	Ja	2541	72 05 19
Super										
Small	60-90	71	83	< 72	30	90	16	Ja	1838	72 49 00
Medium	70-105	80	93	< 84	30	90	16	Ja	2250	72 49 10
Large	85-120	86	103	< 99	30	90	16	Ja	2492	72 49 30
X-large	105-155	103	140	< 116	30	90	12	Ja	3296	72 49 40
Maxi										
Small	60-90	71	112	< 72	22	66	16	Ja	2764	72 52 28
Medium	70-105	80	120	< 84	22	66	16	Ja	3060	72 52 29
Large	85-120	86	143	< 99	22	66	16	Ja	3455	72 52 30
X-large	105-155	103	193	< 116	22	63	12	Ja	4735	72 52 31
Ultima										
Small	60-90	71	127	< 72	20	60	16	Ja	3202	72 51 30
Medium	70-105	80	144	< 84	20	60	16	Ja	3576	72 52 20
Large	85-120	86	170	< 99	20	60	16	Ja	4324	72 53 20
X-large	105-155	103	219	< 116	17	15	12	Ja	5112	72 54 00
TENA Flex Förlängningsbälte		-	-	-	10/120					72 00 00

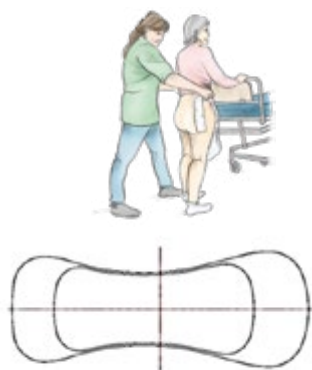

TENA Flex lika bra från båda håll tack vare en symmetrisk formad kärnabsorberare

# Produktfaktablad TENA Proskin Flex

## Ingående material

### YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

### YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

### INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene, High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

### ABSORBTIONSKÄRNA, Övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

### ABSORBTIONSKÄRNA, Undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

### SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

### HÖFTBÄLTE

Material: Non-woven

Funktion: Fixeringsyta för kardborrband från skyddet, mjukt för huden, luftgenomsläppligt

### ELASTIK I HÖFTBÄLTE

Material: SBS och Non-woven

Funktion: Följa kroppens rörelser och hålla skyddet på plats, bekvämlighet

### MIDJEELASTIK

Material: Polyeten och SBS

Funktion: Hålla skyddet på plats, bekvämlighet

### BEN ELASTIK

Material: Syntetiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

### BARRIÄRELASTIK

Material: Elastan

Funktion: Förhindra sidoläckage av urin och faeces

För samtliga TENA Flex skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)



TENA  
an Essity brand

