

# Mextra® Superabsorbent


Superabsorberande förband med vätskeavvisande barriär

## Vätskeavvisande barriär

- Förhindrar extern genomträngning av vätska samt skyddar mot kontamination<sup>1</sup>

## Spridningskikt

- Fördelar sårvätskan jämnt i förbandet till absorptionslagret<sup>1</sup>

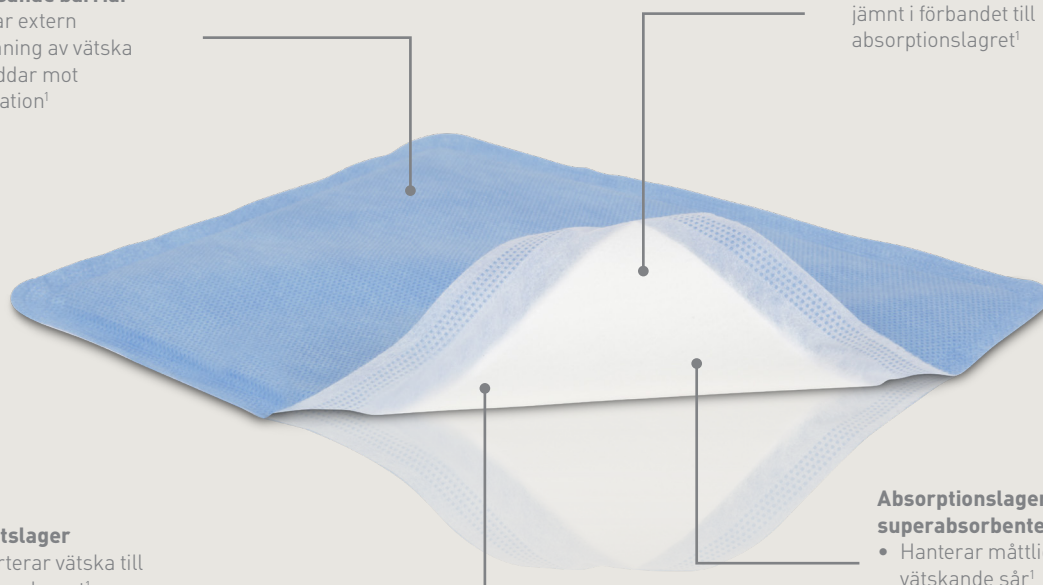

## Sårkontaktlager

- Transporterar vätska till absorptionslagret<sup>1</sup>
- Reducerar risken för maceration<sup>1</sup>
- Skyddar den omkringliggande huden<sup>1</sup>

## Absorptionslager med superabsorbenter

- Hanterar måttligt till rikligt vätskande sår<sup>1</sup>
- Utmärkt vätskehantering (absorption och retention)<sup>1,2</sup>



- Hög vätskehantering (retention<sup>1</sup> och absorption<sup>2</sup>)
- Mjukt och bekvämt<sup>1</sup>
- Skyddar den omkringliggande huden<sup>1</sup>


Mextra® Superabsorbent

  
Mölnlycke®


## Så här används Mextra® Superabsorbent



1. Rengör såret och välj en lämplig storlek av Mextra Superabsorbent.

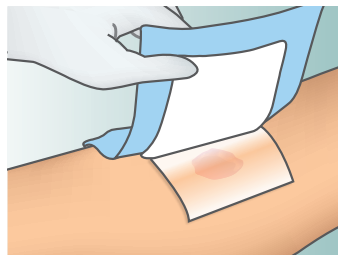

2. Applicera Mextra Superabsorbent direkt på sårområdet med den vita sidan av förbandet mot såret. För bästa resultat ska dynan överlappa den torra omkringliggande huden med minst 2 cm. Mepitel eller Mepilex Transfer kan också användas tillsammans med Mextra Superabsorbent.

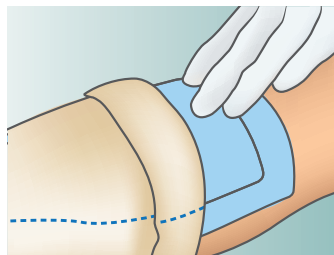

3. Fixera Mextra Superabsorbent med en lämplig fixeringsprodukt t.ex. Tubifast eller fixeringstejp. Förbandet kan vid behov även användas under kompression.

## Fördelar med Mextra Superabsorbent

- Minskar risken för läckage och maceration<sup>1</sup>
- Minskar behovet av täta förbandsbyten<sup>1</sup>
- Minskar behandlingskostnaderna<sup>1</sup>
- Behåller form och struktur utan att bli obekvämt och klumpigt vid absorption<sup>1</sup>
- Yttre lagret förblir torrt<sup>1</sup>
- Bekvämt för patienten att använda<sup>1</sup>
- Fungerar under kompression

## Användningsområden

Mextra Superabsorbent är utvecklat för användning på måttligt till rikligt vätskande sår. Förbandet absorberar sårsekret effektivt och behåller vätskan i kärnan, vilket minskar risken för maceration. Den vätskeavvisande baksidesbarriären förhindrar läckage samt skyddar mot extern genomträngning av vätska.

## Bytesfrekvens

Inspektera såret och Mextra Superabsorbenter regelbundet. Mextra Superabsorbent kan sitta kvar i flera dagar (max sju dagar), beroende på sårets tillstånd eller enligt rekommendation från vårdpersonal.

Mextra Superabsorbent levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
610700	10 x 10	10	50
610710	10 x 15	10	40
610720	10 x 20	10	90
610730	15 x 20	10	40
610740	20 x 25	10	40
610750	20 x 30	10	50
610760	20 x 40	10	50



Referenser: **1.** Tickle, J., Fletcher, J. Mextra Superabsorbent made easy. Wounds UK 2012; 8(4): 1-4. **2.** Mölnlycke Health Care Laboratory report no: PD-522474, 2016 (unpublished). **3.** Wiegand, C., Hipler, U.C. In vitro evaluation of MMP binding capacity of a superabsorbent dressing and the reduction of collagenase activity. Poster presentation at European Wound Management Association conference, Copenhagen, Denmark, 2013. **4.** Eming, S., Smola, H., Hartmann, B., Malchau, G., Wegner, R., Krieg, T., Smola-Hess, S. The inhibition of matrix metalloproteinase activity in chronic wounds by a polyacrylate superabsorber. Biomaterials 2008; 29(19): 2932-2940

Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00  
The Mölnlycke Health Care name and logo and Mextra Superabsorbent are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

  
**Mölnlycke®**