

+ ACTICOAT[◇] FLEX 3 och ACTICOAT FLEX 7 Antiseptiska förband

Försiktighetsåtgärder/Varningar

- Endast för externt bruk, t.ex. applicera ej förbandet på utsatta organ.
- ACTICOAT FLEX 3/ACTICOAT FLEX 7 är ej kompatibla tillsammans med oljebaserade produkter, såsom petrolatum.
- ACTICOAT FLEX 3/ACTICOAT FLEX 7 är ej alltid kompatibla tillsammans med topiska antiseptiska medel.
- Undvik kontakt med elektroder eller ledande geler under elektroniska mätningar t.ex. EEG och EKG.
- En övergående smärta kan upplevas vid applicering av ACTICOAT FLEX 3/ACTICOAT FLEX 7. Om smärtan fortsätter efter appliceringen bör förbandet avlägsnas och ej användas. För att lindra denna smärta applicera ett nytt förband och använd en hydrogelprodukt.
- Om smärta kvarstår, avlägsna förbandet och avbryt användningen.
- ACTICOAT FLEX 3/ACTICOAT FLEX 7 ska endast användas på för tidigt födda barn (kortare än 37 veckors graviditetstid) när de kliniska fördelarna överväger de potentiella riskerna. Inga kliniska data finns tillgängliga i denna åldersgrupp och endast begränsad data finns tillgänglig för användning på nyfödda.
- ACTICOAT FLEX 3/ACTICOAT FLEX 7 är produkter för engångsbruk. Om de används på fler än en patient, kan kontaminering eller infektion uppstå. Dessutom så minskar produktens antiseptiska egenskaper. När en förpackning har öppnats försvinner den sterila barriären och därför bör oanvända förband ej sparas för applicering vid ett senare tillfälle.



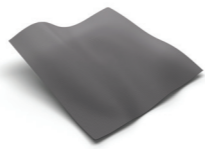
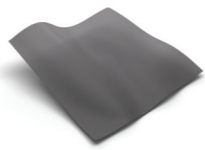
Kontraindikationer

- Använd ej på patienter som är överkänsliga mot silver.
- Använd ej på patienter som genomgår en MR undersökning (Magnetrontgen). ACTICOAT FLEX måste avlägsnas från den del av kroppen på patienten som ska röntgas. Om ACTICOAT FLEX är applicerat på ett område utanför det område som ska röntgas, kan förbandet vara kvar under MR undersökningen.
- Avlägsna ACTICOAT FLEX 3 och ACTICOAT FLEX 7 från patienten innan strålbehandling. Ett nytt förband kan appliceras efter behandlingen.

För en komplett lista med försiktighetsåtgärder, kontraindikationer och indikationer, vänligen läs bruksanvisningen.

+ ACTICOAT[◇] FLEX

Artikelnummer

Förband	Artikelnummer	Storlek	Antal/fp
ACTICOAT FLEX 3			
	66800396	5cm x 5cm	5
	66800398	10cm x 10cm	5
	66800399	10cm x 10cm	12
	66800409	10cm x 20cm	12
	66800419	20cm x 40cm	6
	66800432	40cm x 40cm	6
	66800435	10cm x 120cm roll	6
ACTICOAT FLEX 7			
	66800395	5cm x 5cm	5
	66800397	10cm x 12.5cm	5
	66800420	15cm x 15cm	5
	66800400	20cm x 40cm	6
	66800401	40cm x 40cm	6
	66800545	2.5cm x 60cm	5



Advanced Wound Management
Smith & Nephew Medical Ltd
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN, UK
T +44 (0) 1482 225181
F +44 (0) 1482 328326

www.smith-nephew.com
◇ Trademark of Smith+Nephew
All Trademarks acknowledged
©May 2020 Smith+Nephew
AWM-AWD-24914 | GMC1092

References

1. Smith+Nephew 2008. The antimicrobial activity of ACTICOAT and ACTICOAT FLEX 3 while under negative pressure wound therapy. Internal report. DOF 0810010.
2. Smith+Nephew 2009. Negative Pressure Wound Therapy Summary. Internal statement.
3. Smith+Nephew 2009. Investigation into wound bed pressure under ACTICOAT using an in vitro model. Internal report. DS/09/019/R1.
4. Smith+Nephew 2008. Antimicrobial activity of ACTICOAT FLEX 3 against a broad spectrum of wound pathogens. Internal report. DOF 0810016.
5. Smith+Nephew 2008. Antimicrobial activity of ACTICOAT FLEX 3 Dressings in a 3 day repeat challenge test. Internal report. DOF 0810017.
6. Smith+Nephew 2017. Silver release properties of ACTICOAT Dressings. Internal report. DS/16/363/R2.
7. Smith+Nephew 2008. Silver release testing of Project Andorra (7 day) dressings. Internal report. DS/08/062/R1.
8. Westaim Biomedical 2000. Long term comparative evaluation of Silverlon™ and ACTICOAT 7 Dressings activities against MRSA. Fort Saskatchewan, Alberta, Canada. Report - 001213.
9. Westaim Biomedical 2001. Seven day efficacy of ACTICOAT 7 Dressing against multiple organisms. Fort Saskatchewan, Alberta, Canada. Report - 010322.

+ ACTICOAT[◇] FLEX 3 och ACTICOAT FLEX 7

Antiseptiska Barriärförband

Appliceringsguide

Smith+Nephew

Hjälper dig CLOSER TO ZERO[®] när det gäller sårinfektion



+ ACTICOAT[◇] FLEX 3 och ACTICOAT FLEX 7 Antiseptiska Barriärförband

Indikationer

- ACTICOAT FLEX 3 och FLEX 7 är indikerade som antiseptiska barriärförband för användning både på ytliga och djupa sår såsom brännskador, kirurgiska sår, trycksår, venösa sår och diabetessår.
- ACTICOAT FLEX 3 och FLEX 7 kan användas på infekterade sår. Infektionen ska inspekteras och behandlas enligt lokala riktlinjer när produkten används.
- ACTICOAT FLEX 3 OCH FLEX 7 kan användas som sårkontaktlager i kombination med sårbehandling med negativt tryck (NPWT) upp till 3 dagar.¹⁻³
- Vänligen läs bruksanvisningen innan produkten används.
- När produkten används tillsammans med NPWT, ska sårfillnadsmaterialet fuktas och bytas enligt tillverkarens instruktioner.



+ Appliceringsinstruktioner

Vid behov ska såret rengöras enligt lokala kliniska riktlinjer.
Använd INTE NaCl.

1. Avlägsna ACTICOAT[◇] FLEX 3 eller FLEX 7 ur förpackningen på ett sterilt sätt.

2. Klipp förbandet enligt önskad form och storlek. Vid behandling med kompression, måste förbandet klippas till samma storlek som såret.



3. Fukta förbandet enligt lokala riktlinjer, doppa helt i vatten och tryck sedan försiktigt (**Använd INTE NaCl**). Låt överflödigt vätska rinna av innan förbandet appliceras.

Som ett alternativ kan ett tunt lager av en hydrogel-produkt t.ex. INTRASITE[◇] GEL appliceras direkt på såret och/eller på förbandet.

4. Utan att stretcha förbandet, applicera ACTICOAT[◇] FLEX 3 / FLEX 7 hela vägen upp till sårytan och se till att avlägsna eventuella veck. Förbandet ska appliceras i sträckningsriktningen vid tex en led för att tillåta rörelse.

ACTICOAT FLEX 3 OCH FLEX 7 kan användas till att fylla ut sårhålan.



5. Fixera ACTICOAT FLEX 3/FLEX 7 genom ett lämpligt sekundärt förband eller kompressionsbehandling som bevarar en fuktig sårmiljö.

På sår som vätskar rikligt är det lämpligt att använda ett absorberande sekundärförband. ACTICOAT FLEX 3/ FLEX 7 transporterar sårvätskan direkt till det sekundära förbandet.

Håll ACTICOAT FLEX 3/FLEX 7 fuktiga, men inte så fuktiga så att maceration av vävnaden uppstår.



Byt förbandet utefter hur mycket sårvätska som uppstår och sårets status.

ACTICOAT FLEX 3 antiseptiska egenskaper fungerar i upp till 3 dagar⁴⁻⁶ och ACTICOAT FLEX 7 fungerar i upp till 7 dagar.⁷⁻⁹