

UPPLEV DEN NYA SYNERGIEFFEKTEN PÅ ER STERILCENTRAL 5 ENZYM I EN UNIK PRODUKT

Aniosyme Synergy 5

UNIKT 5-ENZYMATISKT RENGÖRINGSMEDEL FÖR MANUELL OCH MASKINELL RENGÖRING

Aniosyme Synergy 5 är det första rengöringsmedlet med 5 enzym avsett för ett flertal applikationsområden. Enstående resultat vid såväl manuell som automatisk rengöring. Synergy 5 täcker alla behov av rengöringsmedel på sterilcentralen.

Aniosyme Synergy 5:

- **UNIK** - 5-enzymatiskt rengöringsmedel med bredspektrumprestanda.
- **EFFEKTIV** - Effektiv i diskdesinfektor från 5 minuter obereonde av vattenkvalitet.
- **SYNERGIEFFEKT** - Vår första produkt för både manuell och automatisk rengöring.



Aniosyme Synergy 5

UNIKT 5-enzymatiskt rengöringsmedel för både manuell och automatisk rengöring

KRAFTFULL

Bevisad effekt från 5 minuter, kombinerad med utmärkt materialkompatibilitet.

ENZYMATISK

Tar bort alla typer av förorening, på grund av den specialutvecklade 5-enzymatiska formeln och möjlighet till flexibel dosering.

EFFEKTIV

Hög effektivitet och utmärkt rengöringsresultat påvisad vid brukslösning från 0,1 till 0,5%.

KEMISK-FYSIKALISK DATA

Densitet	20°C	1,10 g / ml
pH värde* (koncentrat)	20°C	7,89
pH brukslösning* (vid dosering, 1 - 5 ml/l)	20°C	6,89 - 7,29
Konduktivitet: (Dosering, 1 - 5 ml/l i DI vatten)	20°C	0,08 - 0,33 mS / cm

*pH-värdemätningar under driftsförhållanden skall alltid utföras med en pH-mätare med temperaturkompensering.

BESTÄLLNINGSPERIOD

ANVÄNDS VID FÖRRENGÖRING ELLER ULTRALJUDSBAD	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	ARTIKELNUMMER
Aniosyme Synergy 5	12 x 1 L flaska	3104340

MASKINELL ANVÄNDNING	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	ARTIKELNUMMER
Aniosyme Synergy 5	2 x 5 L dunk	3104360
Aniosyme Synergy 5	200 L fat	3104390

ANVÄNDNINGSGRÖRLE

Rengöringsmedel innehållande 5 enzym avsedd för kirurgisk- och medicinskteknisk utrustning, endoskop, blötläggning av medicinsk utrustning, ultraljudsbad, automatiska diskmaskiner och diskutunnlar.

BRUKSANVISNING

Manuell rengöring

- Koncentrerad lösning för professionellt bruk.
- Späds till mellan 0,5% och 2%.
- Effektiv från 5 minuter.
- Justera koncentrationen, kontakttiden och temperaturen i enlighet med graden av nedsmutsning. Bearbeta mekaniskt vid behov. Skölj noga.
- Maximal temperatur: 35°C

Maskinell rengöring

- Koncentrerad lösning för professionellt bruk.
- Späds till mellan 0,1% och 0,5%.
- Effektiv från 5 minuter.
- Justera koncentrationen, kontakttiden och temperaturen i enlighet med graden av nedsmutsning. Skölj noga-programinställning.
- Maximal temperatur: 60°C

INNEHÅLL

Non- och katjoniska yttaktiva medel, komplexbildare, stabiliseringsmedel, komplexa enzymhjälpmiddel.

FÖRVARING

Fara - Vidta försiktighetsåtgärder vid användning (upprättade enligt gällande europeiska regler för klassificering och märkning av kemiska produkter). Lagring: mellan + 5°C och + 25°C.

CERTIFIKAT

På begäran tillhandahåller vi certifikat

MEDICINSKTEKNISK PRODUKT- VIDTA FÖRSIK- TIGHETSÅTGÄRDER

Vänligen läs etikett- och produktinformation



ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lille Lezennes
France

Levererad Av:
ECOLAB AB
Glasfibergatan 10
Box 164, SE-125 24 Älvsjö
+46 (0)8 603 22 00
www.ecolab.se

ECOLAB®

www.ecolab.se