



## Användningsområde

- Sonohysterografi.
- Hysterosalpingografi.

## Beskrivning

PM Hystero-katetern består av:

En kateter i transparent Pebax.

En envägskran fastsatt på katetern.

Ett stelt handtag i polyester.

PM Hystero har samma diameter på 2,45 mm och längd 330 mm men den tätande konen i polyuretanskum finns i 2 storlekar, liten 15 mm och stor 25 mm.

PM Hystero-katetern liten 15 mm, finns också med rörlig införingskateter.

## Beställningsinformation

Art nr	Benämning
700	PM Hystero liten
710	PM Hystero stor
720	PM Hystero liten, med införingskateter

*För engångsbruk.*

*Levereras i 5 individuella förpackningar.*

*Sterilt förpackade enheter.*

Erol AB, S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö.

Telefon: 042-21 07 90 | E-post: kontakt@erol.se | Web: www.erol.se



## Rekommendationer

- Läs hela bruksanvisningen före användning.
- Använd inte exemplar vars förpackning brutits eller skadats eller som är skadade till följd av transport, olämplig förvaring eller felaktig hantering.
- Kontrollera datummärkning och att förpackningen är hel.
- Öppna förpackningen genom att avlägsna pappret vid pilmarkeringen.

*PM Hystero-katetern är en medicinsk utrustning och bör endast användas av personer som har utbildning i gynekologiska undersökningsmetoder och som känner till de sjukdomar och komplikationer som kan uppstå.*

*Efter användningen kastas kateter och emballage i enlighet med de föreskrifter som finns för medicinskt avfall.*

*För andra användningsområden, kontrollera först om katetern är lämplig för ändamålet.*

## Handhavande

PM Hystero bör endast användas av personer som har vana att utföra sonohysterografi eller hysterosalpingografi.

För in ett speculum för att kunna se cervix.

Desinficera cervix noggrant.

Man kan behöva använda ett tenaculum för att sträcka ut cervix.

För in katetern i cervixkanalen och se till att konen kommer in i kanalen.

Ta bort spekulomet och eventuellt tenaculum-instrumentet.

Spruta in vätska i uterus-kaviteten.

Stäng avstängningskranen.

Fortsätt undersökningen enligt rutin.

## Steriliseringssätt

Etylenoxid.

## Förvaring

Lagra katetrarna i originalförpackning vid en temperatur mellan 5° C och 30° C.

Optimal lagringstemperatur är 20°.

Katetrarna ska förvaras liggande på ett plant underlag och får inte utsättas för tryck.

## Får ej återanvändas!