

SAFE  
HYGIENIC  
EASY TO USE

# SafeSwab

SÄKER HANTERING AV  
OPERATIONSDUKAR

**80%**  
ÅTERVUNNET  
MATERIAL



SVENSKTILLVERKAD

# SafeSwab

## Behållare med 5 fack och lock

SafeSwab är en plastbehållare med 5 fack för säker hantering och sluträkning av använda operationsdukar. SafeSwab används för att minimera risken för kvarglömda operationsdukar under operationen.

### Användning:

- Placera kontrolletiketten för OP dukarna på SafeSwab-behållaren.
- Efter kontroll av den använda OP duken, vik eller rulla ihop den och placera den i ett av facken, med röntgentråden väl synlig.
- När SafeSwab-behållarens 5 fack är fyllda med var sin OP duk, sätt locket på behållaren.
- Stapla efterhand de fyllda behållarna på lämplig plats.
- Sluträkning och kontroll görs enkelt och hygieniskt.
- SafeSwab-behållarna kan också vägas för att beräkna blödning. Kontakta oss för Viktprotokoll.



Material: PET (ca 80% återvunnet material)  
 Förvaring: Rent och torrt i rumstemperatur  
 Destruktion: Produkt: förbränning  
 Förpackningsmaterial: Återvinningsbart  
 Direktiv: Osteril, Class I. Mediplast AB (Tillverkare)  
 Steril, Class Is. Mediplast SRL (Tillverkare)



## SafeSwab

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Trpt.fp.
60SRL810S	SafeSwab, behållare och lock, steril	Ø 24 cm	24 (2 x 12)
60SRL810	SafeSwab, behållare och lock, osteril	Ø 24 cm	100
60SRL809S	SafeSwab Mini, behållare och lock, steril*	Ø 15 cm	24 (2 x 12)
60SRL809	SafeSwab Mini, behållare och lock, osteril*	Ø 15 cm	200
SWAB806	Rostfri ställning på hjul för 4 behållare och lock		1

\* Preliminärt Q2 2023

Trpt.fp. = min.kvant/best



## SVENSKTILLVERKAD

Mediplast AB  
 Box 1004  
 212 10 Malmö  
 T: 040-671 23 00  
 info.se@mediplast.com