

Beskrivning av produkten samt indikation för användning av MediLimes Mätsticka

MediLime Stoma Mätsticka har ett rörformat skaft med en graderad skala, en tratt med en uppblåsningsventil och en ballong.

Mätstickan från MediLime är gjord i 100% silikon.

MediLimes Mätsticka är designad för att avgöra djup (längd) av en väletablerad gastrostomi för att hjälpa till med korrekt val av MediLime-Gastrostomi knapp (G-Button).

Avsedd för övergående användning (mindre än 60 minuter). MediLime Mätsticka har storleken: 12 Fr 5ml.

Fyll aldrig med mer än 7 ml.

MediLime G-Button Fr och Längd storlekar

Length (mm)	8	10	12	15	17	20	23	25	27	30	35	40	45	50	55	60	65
Size (Fr/Ch)	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Läs noga igenom instruktionerna innan användning!

Kontraindikation:

Användningen av Mätstickan är kontraindicerad hos personer som inte har en väletablerad stomi.

Var uppmärksam:

Varje produkt är individuellt sterilt förpackad. Produkten är garanterat steril så länge förpackningen är obruten och inte skadad.

För engångsbruk endast. Produkten får inte återanvändas, bearbetas eller omsteriliseras. Använd inte om förpackningen är öppen eller skadad. Återanvändning kan orsaka infektionsrisk och/eller äventyra funktionssäkerheten. Verifiera utgångsdatum. Använd inte efter detta datum.

Skada inte Mätstickan genom att klippa, riva, punktera eller skada den på annat sätt.

Använd inte Mätstickan för enteral matning.

Om motstånd påträffas när katetern förs fram genom stomin i magsäcken kan detta indikera att stomin har stängt.

Ytterligare försök till en kraftig påtryckning av katetern kan medföra uppkomst av en kanal i bukväggen.

Varning:

Placering ska utföras av eller under ledning av en läkare. Storlekar (Fr och längd) ska förskrivas av läkaren.

Placering av Mätstickan:

1. Smörj spetsen på Mätstickan med vattenlösligt smörjmedel. Använd inte mineralolja.

Använd inte vaselin (Bild 1)

2. Skjut försiktigt spetsen på Mätstickan genom stomin i magen. (Bild 2)

3. Använd Luer Slip-spruta för att blåsa upp ballongen med 5 ml vatten och fäst den i ballongporten. Tryck in sprutkolven och blås upp ballongen.

4. Dra försiktigt Mätstickan mot buken tills ballongen vilar mot insidan av magväggen (Bild 3)

5. Skjut plastskivan ner till buken och registrera mätningen ovanför skivan. (Bild 4)

6. Ta två avläsningar, en i upprätt läge och en i ryggläge. Beräkna genomsnittet för de två avläsningarna och välj nästa större storlek.

7. Använd en Slip-tip spruta för att tömma ballongen innan du tar bort MediLime Mätsticka. (Bild 5)

8. Dokumentera datum, Lotnummer och den uppmätta längden. Mätningarna är i steg om 0,25 cm: varje hel centimeter är markerad med ett tal.

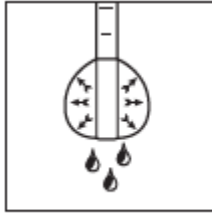


Figure 1

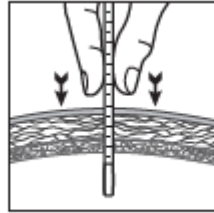


Figure 2

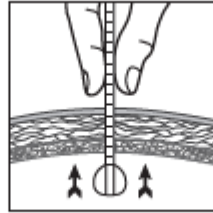


Figure 3

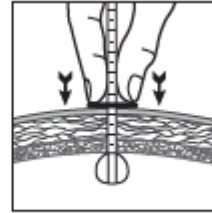


Figure 4

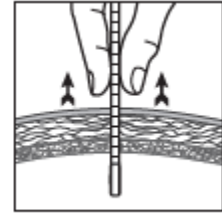


Figure 5

Varning:

Understorlek kan orsaka erosionsinbäddning i magväggen, vävnadsnekros, infektion, sepsis och associerade följder.

Placera MediLime G-knappen:

Placering av MediLime G-knappen ska göras enligt IFU som medföljer produkten (G-Button 50-208)

Förvaring:

Produkterna ska förvaras i originalförpackningen, vid rumstemperatur och i en torr miljö. Undvik direkt solljus och värmestrålning.