

Smearsafe™ Blood dispenser

Artikelnummer: 11555893

Antal/fp.: 1000 st



Smearsafe Blood Dispenser är avsedd att ge ett säkert sätt att erhålla en droppe blod från ett slutet uppsamlingsrör utan att användaren behöver öppna röret. Det är en engångsenhet och är kompatibel med Vacutainer® och Vacuette-rör®.

Smearsafe Blood Dispenser är godkänd för överföring av litiumheparinstabiliserat helblod till Atellica VTLi hs-cTnI testkassett direkt från det slutna provröret.

Användning:

1. Smearsafe™ är avsett att tillhandahålla ett säkert sätt att överföra en droppe blod från ett slutet uppsamlingsrör utan att användaren behöver öppna röret. Den är utformad för att producera en droppe blod som är lämplig för manuell utstrykning. Den är avsedd för engångsbruk och är kompatibel med rören Vacutainer® och Vacuette®. Smearsafe är genomskinligt, vilket gör att du kan se bloddroppen när den dispenseras. Smearsafe är avsedd att användas av laboratoriepersonal.
2. Håll provröret upprätt. Rikta in Smearsafe-enhetens kanyl så att den är parallell med provröret. För in Smearsafe-enheten i provrörets membran tills kanylen inte längre är synlig.
3. Vänd provröret och placera Smearsafe på mitten av ett objektglas eller annan målyta. Tryck försiktigt ned röret tills en bloddroppe bildas på spetsen av Smearsafe-enheten.
1. Släpp trycket när droppen vidrör glaset och lyft röret rakt upp från objektglaset. NOTERA: Droppens storlek kan styras med hjälp av hastigheten och trycket på röret. Efter användning ska Smearsafe-enheten kasseras i en behållare för medicinskt skärande/stickande avfall. Smearsafe kan kasseras instucken i röret eller tas bort från röret och kasseras separat. Om den kasseras separat, håll fast provrörslocket medan Smearsafe dras ut.