


# Applicering

## Steg 1



Drag bort det vit- och orangefärgade skyddspappret, märkt 1.

## Steg 2

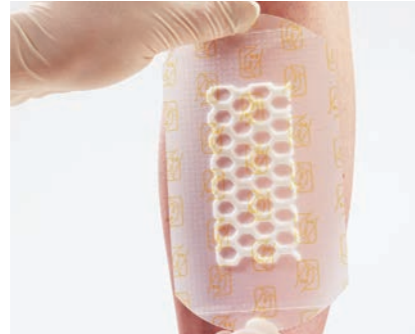

Håll i de icke vidhäftande flikarna i förbandets kant och placera försiktigt förbandet över sårytan.

## Steg 3



Stryk ut förbandet med ett lätt tryck, se till att inga veck bildas och tryck lite extra runt kanterna.

## Steg 4



Drag försiktigt bort det översta appliceringslagret, märkt 2, med hjälp av den lilla fliken. Jämna till förbandet. Kontrollera att patienten tycker att förbandet sitter bekvämt.

## Avlägsnande



- 1 Lyft upp ena hörnet.
- 2 Dra det mot dig – bort från dynan.
- 3 Släpp.
- 4 Upprepa steg 1–3 längs förbandets kanter.

### OPSITE Post-Op Visible beställningsinformation

Art. nr	Storlek	Förpackning
66800136	8 x 10 cm	20
66800137	15 x 10 cm	20
66800138	20 x 10 cm	20
66800139	25 x 10 cm	20
66800140	30 x 10 cm	20
66800141	35 x 10 cm	20

## Försiktighet

Används på torr hud som är förberedd i enlighet med lokala regler. Förbanden ska inte överlappa varandra. Kontrollera regelbundet förbandet och sårområdet för att bekräfta att förbandet sitter fast, speciellt efter bad eller dusch, eller om förbandet på annat sätt blivit vått. Om förbandet lossnar, fäst ett nytt förband. Som med alla självhäftande produkter, applicera och avlägsna försiktigt från känslig eller ömtålig hud.

Förbandet bör inte användas under kompressionsförband eller övrigt material som kan ge tryck då blåsor eller blåmärken kan uppstå. Tryck på förbandet till följd av direkt kroppsvikt kan ge övergående blåmärke eller markeringar på huden efter den nätformade skumdynan.

När förbandet avlägsnas kan ett mönster från den nätformade skumdynan vara synliga på huden. Detta är normalt och bör försvinna inom några timmar.

## Indikationer

Förband för akuta sår såsom postoperativa sår, skärsår, skrubbsår och mindre brännskador där nivåerna av sårvätska är låga/måttliga.

## Vill du veta mer – kontakta oss gärna

Smith & Nephew  
Box 143, 431 22 Mölndal  
sn@smith-nephew.com, www.smith-nephew.se  
Tel: 031-746 58 00, fax: 031-87 05 31

### Referenser:

- 1 Hammond, V; DS/07/209.
- 2 Tompkins, L; DS/07/115.
- 3 Referensrapport WRP-TW042-281 test av bakteriebarriär för IV3000.

\* Vid jämförelse med OPSITE Post-Op  
\* Varumärken som tillhör Smith & Nephew.

Jun 2011, 11-0174

circusom.se



## Framtiden för postoperativ sårbehandling är klar och tydlig

Öppna dina ögon för ett bakterietätt<sup>1</sup> förband med bättre absorptionsförmåga\* som gör det enkelt att ha uppsikt över postoperativa sår.

 **OPSITE<sup>®</sup>**  
**POST-OP VISIBLE**  
Vatten- och bakterietätt  
polyuretanförband med transparent  
absorberande dyna

# Klart bättre skydd

Efter att ha arbetat hårt för att förhindra infektion inne i operationssalen, är det mycket viktigt att fortsätta att skydda operationssåret från infektion. Ett bra sätt är att använda ett postoperativt förband som skyddar såret mot bakterier.

Det gör OPSITE® Post-Op Visible. Förbandet har dessutom en överlägsen absorptionsförmåga<sup>1,2</sup> och eftersom det är transparent kan du enkelt överblicka sårets status.


# Infektionsskydd

- OPSITE Post-Op Visible har en unik, bakterietät<sup>3</sup> film. Den fuktgenomsläppliga filmen håller sårytan torr<sup>1</sup>. På så sätt skyddas såret samtidigt som förbandet sitter bättre på plats.
- Den hydrocellulära nätformade skumdynan gör att du hela tiden kan se såret. Det ger dig möjlighet att upptäcka tidiga tecken på infektion utan att du behöver lyfta på förbandet.



# Optimal sårhelingsmiljö

- OPSITE Post-Op Visible skapar en optimal sårhelingsmiljö eftersom skumdynan absorberar överskott av sårvätska, och filmen med hög genomsläpplighet för vattenånga (MVTR) låter överskottsfukt dunsta bort.
- OPSITE Post-Op Visible hanterar större mängder sårvätska än ledande postoperativa förband<sup>1,2</sup>.

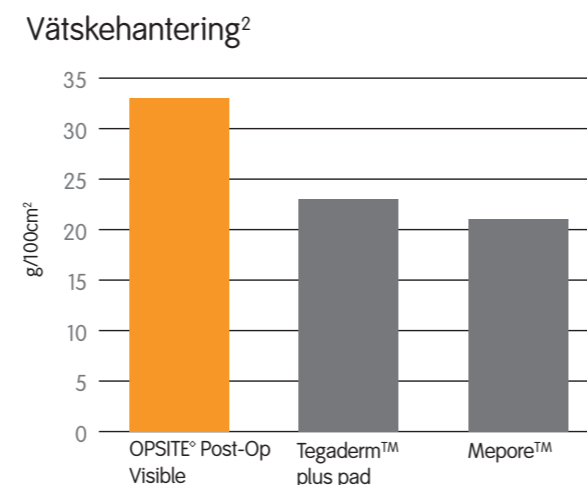

# Bättre översikt

- Den innovativa utformningen av den hydrocellulära skumdynan innebär att du kan övervaka läkningsprocessen utan att byta förbandet. Det ger dig möjlighet att upptäcka tidiga tecken på infektion och snabbt vidta eventuella åtgärder.

OPSITE Post-Op Visible är ett innovativt postoperativt förband som förenar överlägsen absorption<sup>1,2</sup> med möjligheten att kontrollera sårets status, utan att behöva avlägsna förbandet eller störa sårhelningen.

# Huvudegenskaper

OPSITE Post-Op Visible har utformats speciellt för sparsamt till måttligt vätskande postoperativa sår, rivsår, skärsår, skrubbsår och lindrigare brännsår.

