

3M Science.
Applied to Life.™

3M Hälsovård

3M™ Tegaderm™ HP

Säker fixering på fuktig hud

Tegaderm HP är en tunn och elastisk polyuretanfilm med ramsystem och ett häftämne anpassat till fuktig hud. Förbandet är avsett att användas till sår och fixering av infarter, speciellt på fuktiga hudområden.



3M™ Tegaderm™ HP

Polyuretanfilm för fuktiga hudområden

Tegaderm HP är en hudvänlig, tunn och elastiskt polyuretanfilm avsedd att användas till sår och fixering av infarter. Den speciella filmen och häftämnet ger en bättre vidhäftning under fuktiga förhållanden.

Egenskaper

- **Film och häftämne för fuktig hud:** anpassad för fuktiga hudområden. Även lämplig att användas på barn.
- **Mycket tunn och elastisk:** komfortabelt för patienten.
- **Lätt att applicera:** 3M:s ramsystem säkrar en aseptisk hanteing.
- **Transparent:** möjliggör inspektion genom förbandet.
- **Semipermeabel:** Tegaderm HP är genomsläpplig för fukt och syre, vilket låter huden "andas".
- **Bakterie- och virus* barriär:** skyddar instickstället eller såret mot kontamination utifrån.
- **Noteringstejp:** en Micropore™ tejp sitter på ramen av vissa storlekar, kan användas till signering och till borttagning av förbandet.

* Laborrietester visar att Tegaderm HP skapar en virusbarriär (HIV-1 och HBV) så länge förbandet är intakt utan läckage

Applicering

Välj en lämplig storlek av förbandet.

1. Håll förbandet i fliken på sidan och dra bort skyddspappret från baksidan. Håll förbandet över såret eller insticksstället med den häftande sidan nedåt. Undvik att sträcka eller dra i förbandet.
2. Tryck försiktigt förbandet på plats och stryk med handen från mitten och utåt.
3. Avlägsna ramen samtidigt som du pressar lätt på förbandet för att säkerställa en god vidhäftning av kanten på förbandet.

Borttagande: Ge huden stöd och "stretcha" av förbandet, för att förebygga mekaniska hudskador.

Indikationer:

Tegaderm HP är framtagen för att ge en bättre vidhäftning under fuktiga förhållanden:

- Fixering av infarter och medicintekniskt material till exempel centrala venkaterar, insulinpumpar och subcutan venport.
- Rena kirurgiska sår, som ett postoperativt förband.
- Ytliga hudskador.
- Täckförband över andra förband.
- Trycksårsprofylax, som skydd mot hudskador orsakade av friktion och skjuvningseffekt.

Beställningsinformation		
Art nr	Storlek	Ant/fp
9534HP	6 x 7 cm	100
9536HP	10 x 12 cm	50
9546HP	10 x 11,5 cm	50
9525HP för nexiva	6,5 x 7 cm	100



3M Svenska AB
Avd. Hälsovård
Herrjärva torg 4
170 67 Solna

Tel: 08-92 21 00

3M, Tegaderm och Micropore är varumärken som tillhör 3M Company. Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige. © 3M 2018. Alla rättigheter förbehålles. LL53 0046-4 SE 181105