

Mepiform®

EFFEKTIVT SJÄLVHÄFTANDE FÖRBAND FÖR ÄRRBEHANDLING


- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten^{1,2,3}
- Ingen extra fixering krävs
- Formar sig väl efter kroppens konturer
- Kan användas vid dagliga aktiviteter

Safetac® -yta

- Vidhäftning med mjukt silikon
- Minskar smärta och vävnadsskada vid avlägsning¹

Nonwoven baksidesfilm

- Andningsbar
- Vattentät

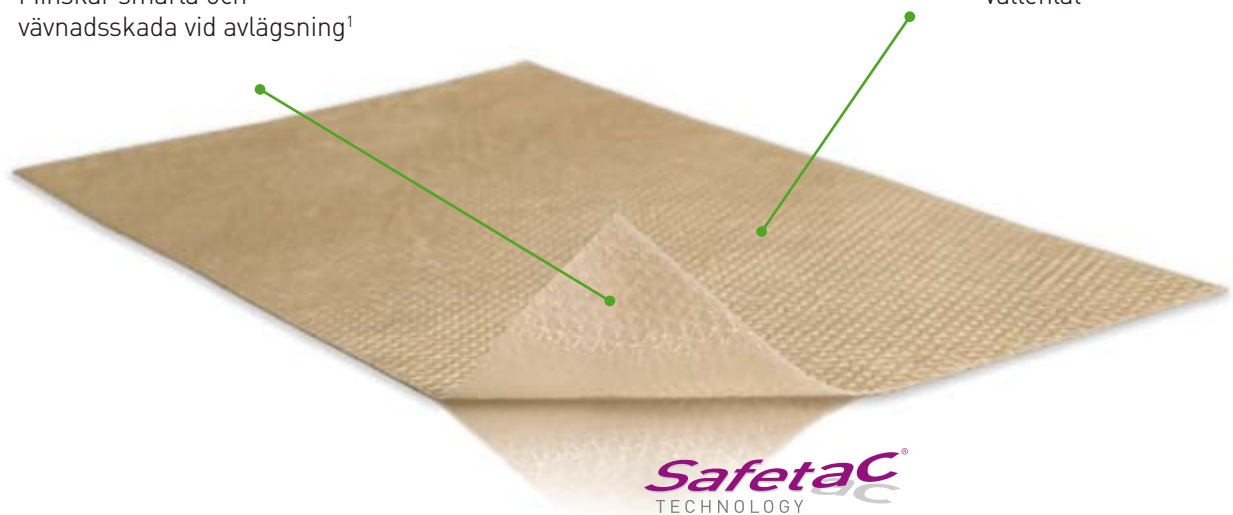


Safetac® -teknologi

Safetac® -teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information besök www.safetac.se

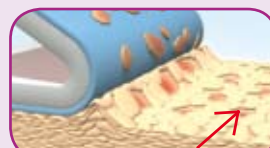


Hudceller dras av (hudstrippning) med traditionell vidhäftning




Få eller inga hudceller dras av med Safetac-teknologi


Så här används Mepiform®

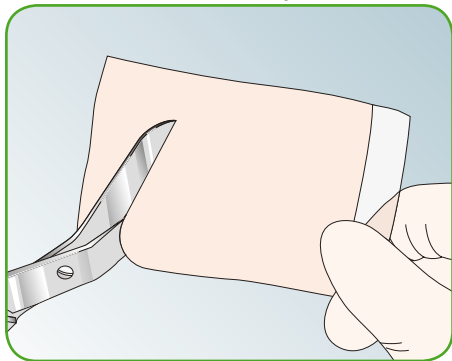

Avlägsna skyddspappret. Vid behov klipp till rätt storlek.

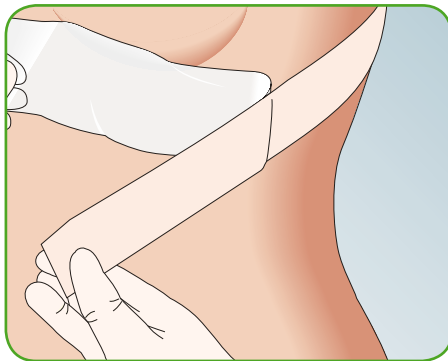

Applicera Mepiform på äret. Säkerställ att huden är ren, torr och fri från eventuell salva etc.

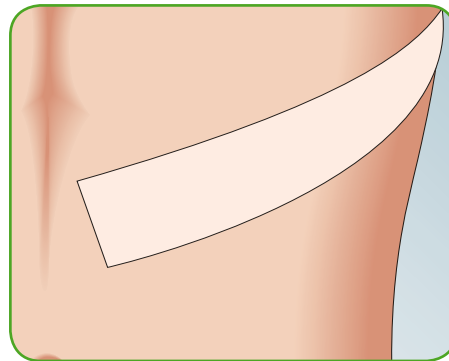

Återapplicera efter daglig rengöring av äret. Torka huden innan Mepiform sätts på igen.

Så här fungerar Mepiform

Silikon har en bevisad positiv påverkan på hypertrofiska ärr och keloider^{4,5}. Det kan ta 3 månader upp till ett år att förbättra gamla ärr, beroende på ärrvävnadens tillstånd. För optimal effekt ska Mepiform bäras 24 timmar per dag. Det är rekommenderat att Mepiform avlägsnas en gång dagligen, t.ex. vid dusch eller bad, för inspektion och tvätt av huden. För profylaktisk behandling, ska Mepiform användas 2–6 månader beroende på hudens tillstånd.

Fördelar med Mepiform

- Minskar smärta och vävnadskada vid förbandsbyte
- Ingen extra fixering krävs
- Tunn, flexibel och diskret
- Kan användas vid dagliga aktiviteter
- Kan återappliceras efter avlägsning
- Mepiform kan sitta kvar i flera dagar
- Mepiform har en solskyddsfaktor på UPF 5⁺

Användningsområde

- Gamla och nya rodnade och upphöjda hypertrofiska ärr och keloider
- Slutna sår som kan förhindra att hypertrofiska ärr och keloider bildas

Observera

Om maceration eller rodnad skulle förekomma, låt huden vila till dess att symptomen har försvunnit. Fortsätt med behandlingen och öka behandlingstiden gradvis per dag.



MEPIFORM SORTIMENT levereras sterila, enstykspörpackade

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
293100	4 x 30	5	50
293200	5 x 7,5	5	25
293400	10 x 18	5	35