


Activon Tulle

Viskoskompress impregnerat med medicinsk manukahonung

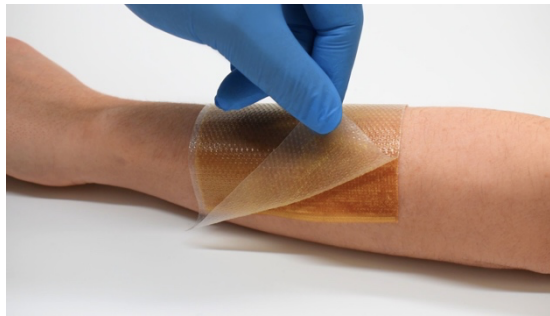

Produktinformation

Activon Tulle viskoskompress verkar antiseptiskt och antiinflammatoriskt. Utformat för att skapa en fuktig sårhelingsmiljö, effektivt reducera odör i kombination med antibakteriell verkan. Lämpligt för granulerande sår samt för debridering och upprepning av nekrotisk vävnad. Förbandet är formbart och icke vidhäftande, reducerar smärta vid förbandsbyte. Impregnerad med 100% medicinsk manukahonung.

Indikationer

Kan användas på alla typer av sår

- Infekterade sår
- Trycksår
- Bensår
- Operationssår
- Nekrotiska sår
- Brännskador, typ 1 och 2
- Illaluktande sår
- Transplantations- och donatorsår

Användarinstruktioner

- Se till att såret har rengjorts
- Torka försiktigt den omgivande huden
- Ta ur förband från förpackning
- Placera förband (uppåt eller nedåt) på sårytan
- Kan placeras sida vid sida vid större områden eller klippas till önskad storlek
- Täck med lämpligt sekundärförband
- Förvaras i rumstemperatur

Förbandsbyte

Beroende på sårexsudat kan Activon Tulle lämnas på plats i upp till 7 dagar. Activon Tulle kommer att vara mindre effektivt när honungen blir utspädd av sårexsudat, för att upprätthålla effektiv nivå bör du byta förband när färgen på förbandet ändras avsevärt.



Hållbarhet: 2 år i obruten förpackning

Material: Viskosnöt, 100% medicinsk manukahonung

Orderinformation

Art.nr	Benämning	Storlek	Avd. fp	Trp. fp	Klass
CR3761	Activon Tulle	5x5cm	5	280	MD IIb, steril
CR3658	Activon Tulle	10x10cm	5	280	MD IIb, steril